


製品説明

PENTAFLEX® マットレスは、リバーシブル 4 ウェイターン、片面当たり 5 つの体圧分散ゾーンを有する高反発ポリウレタンコア、透湿性、伸縮性および防水カバーと言う特徴がある製品です。

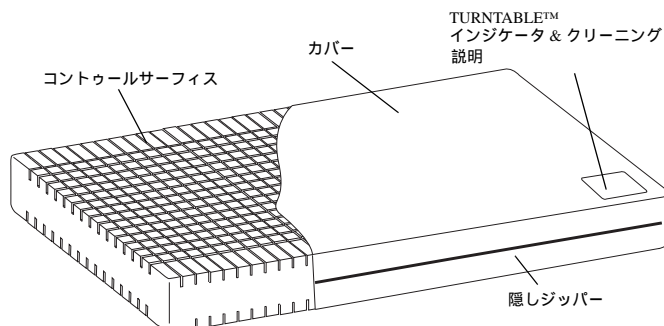

ベッドエクステンションを使用する際は、PENTAFLEX フォーム延長マットレスがご利用になれます。詳細については製品カタログ 609903 をご参照ください。

アプリケーション

利用方法

PENTAFLEX 120 は、体重 120 kg までのユーザーに適応しています。PENTAFLEX 250 は、体重 250 kg までのユーザーに適応しています。床ずれ等を患っている方も含む広範囲の患者に適しています。

※ 本製品説明書は、あくまでガイドラインであり、臨床経験や臨床判断に置き換わるものではありません。患者の状態が悪化する場合、専門家に助言を求めるようにしてください。

警告

本製品のカバーは透湿性ですが通気性ではないため、窒息の危険が発生することがあります。利用者が本製品を安全に使用できるよう様にすることは、介助者の責任です。

取扱説明

- 梱包材をすべて取り除きます。
- PENTAFLEX マットレスをベッドフレームに置いて、カバーを傷つける鋭利な先端がないことを確認してください。

カバーを付けずにマットレスを使用しないでください。

カバーはマットレスを保護して、製品寿命を延ばすのに役立ちます。

- マットレスの足部先端に TURNTABLE™ (ターンテーブル) インジケータで適正月が表示されるようにしてください。適正月が表示されていない場合、適正月が足部先端にくるようマットレスのローテーションを行ってください。月は以下のように表示されます：

1/12 = 1 月 2/12 = 2 月

- 月単位で実施すべきマットレスローテーションの目安として TURNTABLE インジケータをご利用ください。これにより、マットレスの消耗が均等化して、製品寿命を延ばすことができます。

汚れの除去

カバーのクリーニング

洗剤と水を含ませたクロスで全面を拭いてください。表面に付着している有機堆積物を除去した後、乾燥させます。

カバーの消毒

消毒剤として、1,000 ppm に希釈した NaOCl または NaDCC のような次亜塩素酸系溶剤を推奨します (範囲は汚染状態と地域の法令により 250 ~ 10,000 ppm の間で変化)。

あるいは、アルコール (70%) に浸したクロスを使用し、自然乾燥させます。

日常検査項目

フォームコアとカバーは、損傷の兆候、汚れあるいはシミがないか定期的に検査するようにしてください。

廃棄

PENTAFLEX 製品の廃棄については、以下の方法に従うことを推奨します。但し、これに関わらず、地域の法令および、該当する場合、病院や介護施設等の運用規則を確実に遵守してください。

- 汚染の疑いがあるフォームコアは、医療廃棄物として廃棄してください。
- 汚染の疑いがないフォームコアは、特に地方自治体の指定が無い限り裁断後、一般ゴミとして廃棄できます。

警告とサービス

アルジョハントレーの標準約款はすべての販売に適用されます。要求に応じてその複写が入手できます。

標準約款は保証条件の完全な詳細内容を含んでおり、消費者が有する制定法上の権利を制限することはありません。

サービス、メンテナンスおよび本製品に関するご質問、あるいはその他のアルジョハントレー製品に関する情報に付きましては、以下にお問い合わせください：

arjohuntleigh.com

技術データ

一般的なベッド サイズ	-	-	-	-	-	施設向け標準 サイズ	施設向けスモール サイズ
サイズ 長さ x 幅 x 高さ (cm)							190 x 82 x 17
PENTAFLEX 120 製品コード						120PM190/088JP	120PM190/082JP
PENTAFLEX 250 製品コード						250PM190/088JP	250PM190/082JP
材質	高反発ポリウレタンフォーム						
カバー材質	耐久性ポリウレタンコーティングされたポリエステル繊維。						

PENTAFLEX マットレスはカスタムメイドサイズでご利用になれます。例えば、製品コード 120PMYYY/ZZZ で、YYY は長さを (140 ~ 216cm)、ZZZ は幅を (66 ~ 140cm) 指定します。すべてのサイズは 2cm 刻みで指定する必要があります。

上表に記載されていないベッドとマットレスを組み合わせる場合、マットレスとベッドフレームの適合性を確保することはお客様の責任です。ベッドメーカーの推奨マットレスサイズをご参照ください。詳細については、アルジョハントレーにお問い合わせください。

難燃性




PENTAFLEX マットレスシステムは、BS EN 597-1:2015、BS EN 597-2:2015、および BS 6807:2006, 5 の要件を満足します。

火災の警告

タバコ、ライター、裸火および加熱エレメント（例：電気ヒーターや電気機器等）は火災の原因となり、ベッド用シーツ、毛布およびベッドカバーを発火させる恐れがあります。火災の原因になるものは、マットレスから遠ざけてください。

注意：寝タバコは厳禁です。

カバー記号

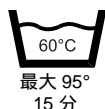

推奨洗浄温度：
60°C で 15 分
最大洗浄温度：
95°C で 15 分



湿らせたクロスと中性洗剤を用いて汚れを拭き取る
こと



アイロンを使用しないでください



最初の使用の日付



フェノール系洗剤を使用しないこと



取扱説明書を参照すること



病院名



日常の消毒：1,000 ppm



60°C で回転乾燥
最大乾燥温度 80°C



ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden
www.arjohuntleigh.com

ARJOHUNTLEIGH
GETINGE GROUP