

# Maxi Twin





1. Закрепите стропу на пациенте (убедитесь, что используется нужный размер).
2. Расположите Maxi Twin перед пациентом так, чтобы широкая часть крановой балки находилась на уровне плеч или немного ниже. При необходимости разведите ножки шасси.
3. Закрепите зажимы стропы в соответствующих местах крановой балки.
4. Поднимите пациента с помощью пульта управления и отрегулируйте рукоятку для перемещения таким образом, чтобы пациент оказался в лежачем положении.
5. Сведите ножки шасси и перевезите пациента к креслу, кровати или туалету.
6. Опустите пациента и отрегулируйте рукоятку для перемещения, чтобы перевести его в подходящее положение.
7. Расстегните зажимы стропы.
8. Отодвиньте Maxi Twin, убедившись, что ноги и тело пациента не касаются подъемника.
9. Снимите стропу с пациента.




Перед началом работы с Maxi Twin, а также для получения подробной информации и инструкций по работе с подъемником, информации о мерах безопасности при использовании крепления стропы, о зарядке аккумулятора и уходе за Maxi Twin всегда обращайтесь к полной инструкции по эксплуатации Maxi Twin.




CE  
2797

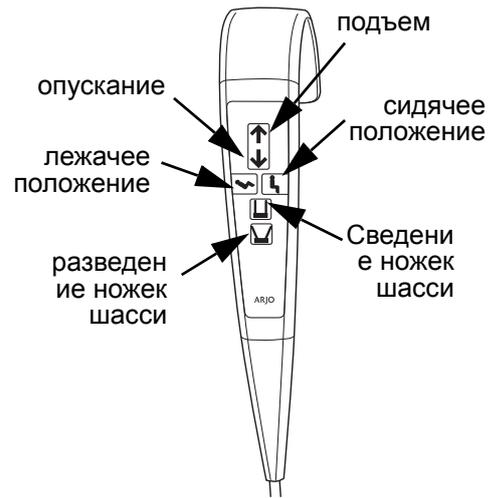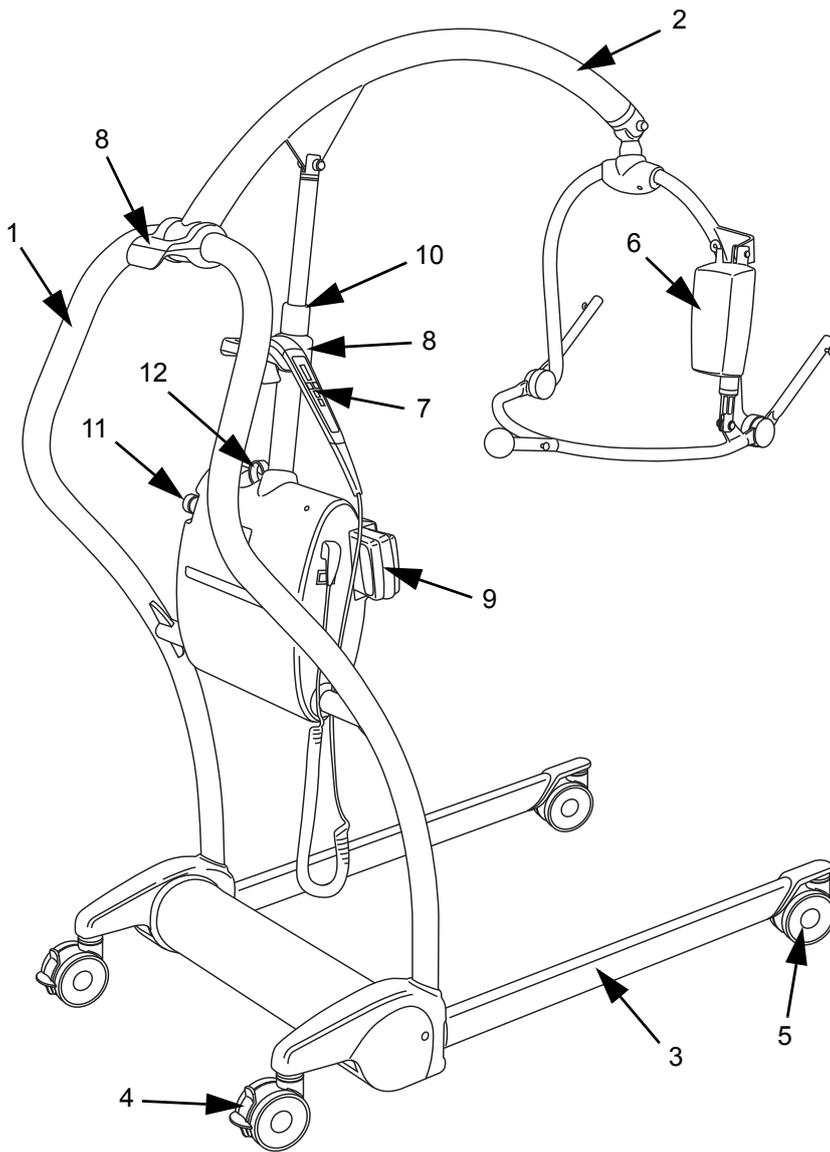

### Крепления стропы

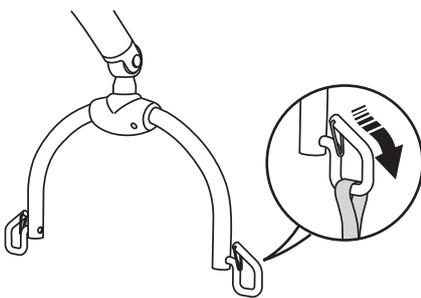

**Петля**

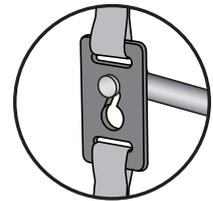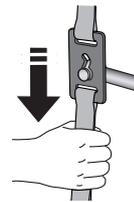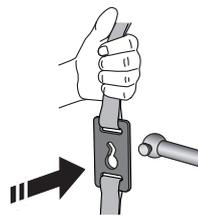

**Зажим**

- |   |   |  |
|---|---|--|
| 1. Рукоятка для перемещения стойки/подъемника | 6. Крановая балка с автоматической системой DPS | 10. Главный привод подъемника  |
| 2. Стрела крана                               | 7. Пульт дистанционного управления              | 11. Кнопка экстренной остановки/сброса                                   |
| 3. Регулируемые ножки шасси                   | 8. Подвес для пульта управления                 | 12. Механизм переключения на ручное управление при неисправности системы |
| 4. Ролики с тормозами (задние)                | 9. Блок аккумуляторов подъемника                |  |
| 5. Ролики без тормозов (передние)             |   |  |

Дополнительные аксессуары см. В инструкции по применению.