

## 肢体压力套

只能在医师指导下使用 • 未经灭菌 • 100% 不含乳胶 • 仅供单个患者使用

- ☞ 仅与安究亨特立（ArjoHuntleigh）或亨特立（Huntleigh Healthcare）制造的 Flowtron 预防深静脉血栓形成（DVT）气泵结合使用。不能与 Flowtron Hydroven 3 或者 Flowtron Hydroven 12 间歇式充气压力气泵（Intermittent Pneumatic Compression）一起使用。
- ☞ 有关肢体压力套更为全面的信息，可在 Flowtron 预防深静脉血栓形成气泵相关使用说明文件中找到。

### 使用说明

1. 将泵的电源插头插入合适的电源插座。此时不要开启泵。
2. 从密封袋中取出肢体压力套，可被用于任何一条腿。展开肢体压力套并将充气式囊袋直接置于患者小腿的后面。
3. 用肢体压力套将患者的腿紧贴舒适地包裹起来并将拉链卡舌固定好，用同样的方式包裹另外一条腿。
4. 将肢体压力套与泵管组连接起来，确保听到每个卡口式连接器发出咔哒声。
5. 如果您的 Flowtron 预防深静脉血栓形成气泵具备可调节压力调整器，请将调整器表盘旋转到所建议的压力值，医生另有指示的情况除外。如需更多信息，请参阅 Flowtron 预防深静脉血栓形成气泵相关使用说明文件。
6. 启动泵。绿色电源指示灯应发亮。

### 预期用途

通过仪器给肢体压力套充气加压，压力套挤压肌肉群，促进血液和淋巴液回流。

### 适应症

适用于预防在骨科、创伤、泌尿和普通外科手术期间由于血栓形成风险因素的存在而出现的深静脉血栓。它也适用于包括神经内科、重症监护和普通内科以及产科在内的其他患者群体。

### 建议

#### 一般建议：

- 肢体压力套应被定期取下以检查皮肤
- 在适当情况下，患者应得到关于正确使用该系统、治疗的目的以及患者应向护理人员报告的任何问题的指导

#### 深静脉血栓的预防：

- 应在术前麻醉诱导之前给患者戴上肢体压力套
- 手术后系统应在患者身上被连续使用至少 72 小时，或直到患者完全能自己走动为止
- 如果在手术中肢体压力套不能在患者被施术的肢体上使用，则一旦患者到达恢复病房，肢体压力套即可被用于该肢体。
- 在非手术患者身上，一旦确定深静脉血栓形成风险的存在，应立即启动该系统。

### 禁忌症

间歇式充气压力系统不得被用于下面的病症：

1. 严重的动脉硬化或其它局部缺血性血管疾病。
2. 已查明或怀疑患有急性深静脉血栓（DVT）或静脉炎。
3. 严重的充血性心力衰竭或任何其它当进入心脏的流体增加时会造成损害的疾病。
4. 肺栓塞。
5. 肢体压力套会造成干扰的任何局部问题，包括坏疽、近期接受皮肤移植术、皮肤炎或未经处理的、感染的腿部伤口等。

如果您不能确定任何这些禁忌症，可以在使用该系统前向患者的医师咨询。

### 注意

1. 如果患者感到刺痛、麻木或疼痛，肢体压力套应被立即取下。
2. 当用于深静脉血栓形成的预防时，建议连续使用该系统，任何一个相当长时间的治疗中断应该由医师酌情决定。

**生产日期：见管壁 有效期限：3 年**

### 符号



单个患者使用

® 及™ 是安究亨特立（ArjoHuntleigh）公司集团所属的商标。

由于我们的政策需要不断改进，我们保留在不事先通知情况下修改设计的权利。

医疗器械生产备案凭证

编号：苏苏食药监械生产备

20161003 号

医疗器械产品备案号/产品技术要求

编号：苏苏械备 20160226 号

生产企业（备案人）名称：

安玖医疗器械（苏州）有限公司

生产企业（备案人）住所：

苏州工业园区方洲路 158 号

生产地址：苏州工业园区方洲路 158 号

215024

联系电话：0512-69561799

售后服务单位：安捷祐（苏州）医疗设备贸易有限公司

售后服务单位地址：苏州工业园区方洲路 158 号

联系方式：400-087-2882

说明书修订日期：2018年08月08日