




Esta guía de referencia rápida ha sido preparada para ayudar a los profesionales sanitarios y otros usuarios con los aspectos funcionales del sistema. Esta guía no sustituye las advertencias, precauciones y recomendaciones generales de seguridad incluidas en las instrucciones de uso del producto, número de referencia KKX52180M-ES. Consulte las instrucciones del producto antes de usarlo.


Presentación del producto

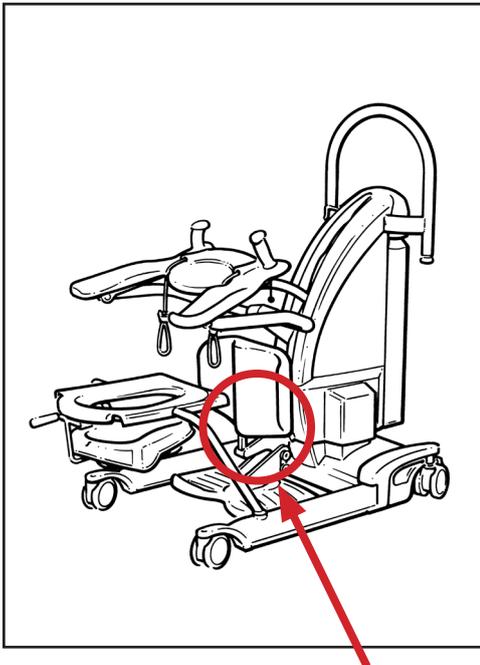


Tome cada cuerda de ajuste y acóplela sucesivamente al sling



Utilice el control de mano para accionarlo

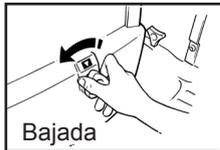

En caso de necesidad gire el botón de neutralización para bajar al residente

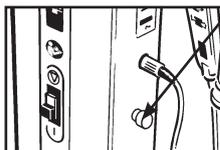


En caso de necesidad, pulse el botón de parada de emergencia para detener todo el movimiento eléctrico



Advertencia: La almohadilla Pro-Active puede quitarse para realizar ejercicios de rodilla o de andar. Cuando quite la almohadilla, asegúrese de que también extrae el soporte de apoyo contiguo antes de empezar la terapia. Cuando se vuelva a montar, asegúrese de que la almohadilla se coloca de nuevo y de que cubre el soporte de apoyo. Si no lo hace, podrían producirse lesiones graves.

1. Coloque el sling al residente, asegurando que sea del tamaño correcto. Asegúrese de que la correa autoadherente queda sujeta con seguridad y de que los brazos del residente permanezcan fuera del sling.
2. Sitúe el SARA PLUS enfrente del residente, abra las patas del chasis si es necesario, ayudando al residente a colocar sus pies en el resposapiés con las rodillas apoyadas sobre la rodillera y aplicando los frenos de las ruedas, dejando que el residente se agarre a los agarraderos y repose los brazos en el Arcrest™.
3. Ajuste la altura del Arc-rest a su posición más baja, ajustando la rodillera según convenga.
4. Sujete el sling a los enganches del cable y tire de éstos para eliminar la holgura.
5. Usando el control manual o el control doble, levante al residente hasta una posición erguida.
6. Suelte los frenos, cierre las patas y transporte al residente a la silla, la cama o el servicio.
7. Sitúe al residente enfrente de la silla, cama o servicio con la parte posterior de las piernas en contacto con la silla, etc. y baje hasta quedar sentado.
8. Afloje la tensión sobre los cables y retire éstos del sling.
9. Retire la SARA PLUS, teniendo cuidado de remover los pies del residente del apoyapiés.
10. Retire el sling de alrededor del residente.

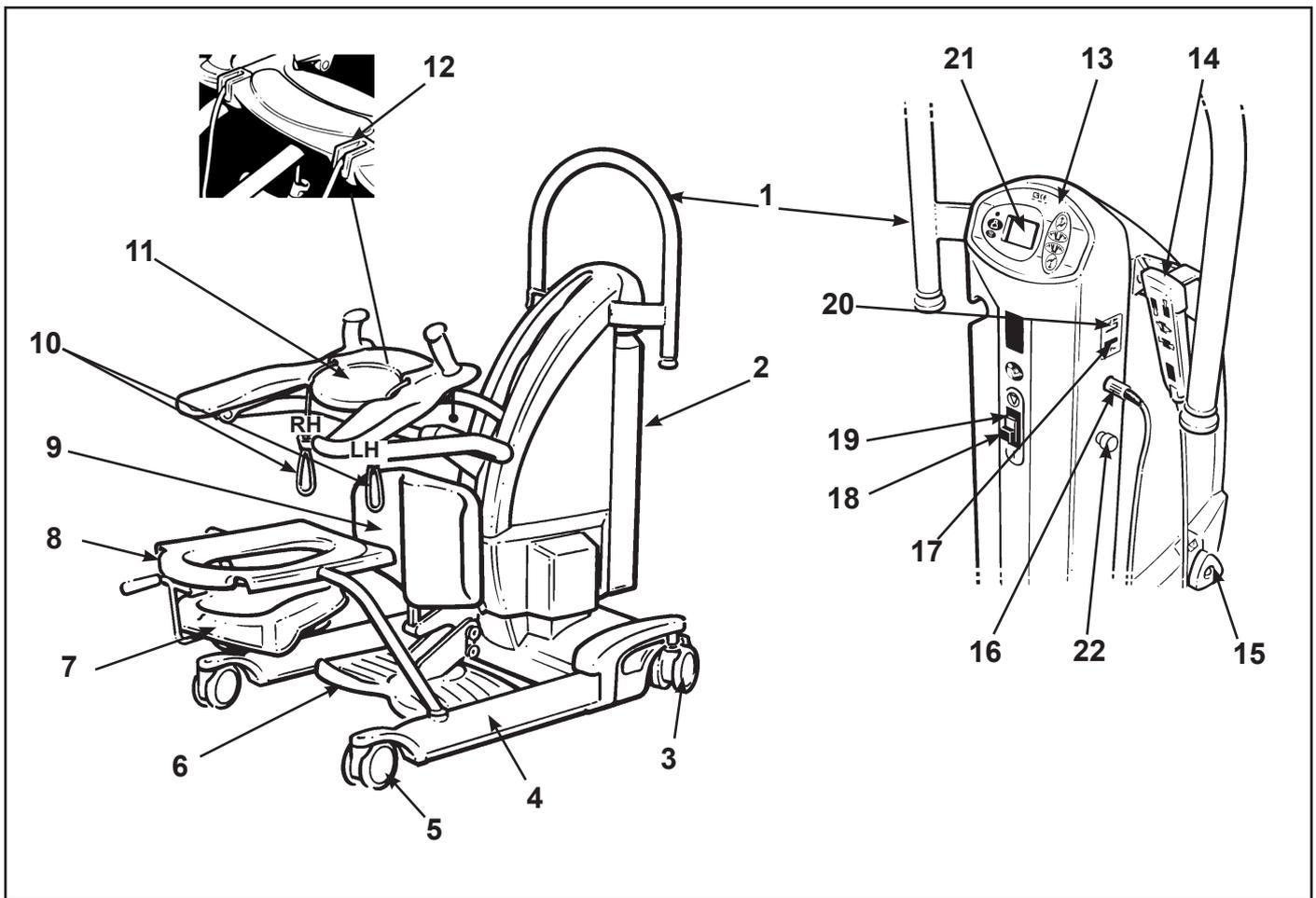

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 1. Palanca de maniobra 2. Paquete de baterías 3. Ruedas con freno (traseras) 4. Patas del chasis 5. Ruedas delanteras (sin freno) 6. Reposapiés (desmontable) 7. Receptáculo de orinal (opcional) 8. Asiento de inodoro y marco (opcional) 9. Proactive Pad™ (ajustable) 10. Cables de sujeción de sling 11. Arc-Rest™ (apoyabrazos con asideros manuales) | <ul style="list-style-type: none"> 12. Vista detallada de los tacos de bloqueo de la cuerda 13. Panel de control doble 14. Control manual 15. Botón de neutralización de bajada por fallo 16. Conexión del cable del control manual 17. Indicador de descarga de batería 18. Botón de Encendido/ Reseteado (verde) 19. Botón de parada (rojo) 20. Contador 21. Panel de visualización de báscula (si se incluye) 22. Botón de parada de emergencia |
|--|---|

® y ™ son marcas registradas pertenecientes al grupo de empresas Arjo.

© Arjo 2019.

Como parte de nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho a modificar los diseños sin previo aviso. El contenido de esta publicación no podrá ser copiado de manera total o parcial sin el consentimiento de Arjo.

