



	Functie
1	Geel knipperen: het programma kan worden beëindigd. Geel: programma in uitvoering. De display geeft de huidige status aan, bijvoorbeeld de reinigingsfase en de temperatuur.
2	Groen: het programma is voltooid. Het lampje gaat uit als de deur wordt geopend en op het display wordt korte tijd een overzicht van het programma in het venster weergegeven, bijvoorbeeld de maximumtemperatuur.
3	Rood: foutmelding. De display toont een foutmelding.
4	Display. Een onderhoudstechnicus kan invoeren welke informatie er op het display moet worden getoond.
5	Knop voor het spaarprogramma, voor licht vervuilde voorwerpen.
6	Knop voor het normale programma, voor normaal vervuilde voorwerpen.
7	Knop voor het starten van een programma.

Code	Beschrijving	Maatregel
U1	Te weinig ontkalkingsmiddel	Vul ontkalkingsmiddel bij.
U2	Te weinig procesmiddel	Vul procesmiddel bij.
U3	Te weinig spoelmiddel	Vul spoelmiddel bij.
U7	Waarschuwing: goederen met hoge temperatuur	Laat de goederen afkoelen.
U9	Waarschuwing voor niet-gebruik	De machine is 72 uur niet gebruikt. Voordat de machine wordt gebruikt om goederen te reinigen moet een programma worden uitgevoerd met een lege kamer.
H6	Startpoging met open deur	Sluit de deur: de machine onderneemt dan een nieuwe startpoging. Als de fout niet verdwijnt, neem dan contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.
H7	Deur kan niet worden gesloten	Bevestig de foutmelding. Sluit de deur op de juiste manier. Probeer opnieuw te starten. Als de fout niet verdwijnt, neem dan contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.
H8	Deur kan niet worden ontgrendeld	Bevestig de foutmelding. Als de fout niet verdwijnt, neem dan contact op met bevoegd onderhoudspersoneel.

Zie de gebruiksaanwijzing voor foutcodes van het type F.