



Knap/lampe	Funktion
1	Når den gule lampe tændes: Maskinen kører et program. Temperatur og rengøringsfase kan ses i displayet.
2	Når den grønne lampe tændes: Programmet er gennemført. Den grønne lampe slukker, når døren åbnes, og processens højeste temperatur vises på displayet.
3	Når den røde lampe tændes: Maskinen opnåede ikke desinfektionstemperatur, eller der er opstået en anden fejl (fejlkode F).
4	Display.
5	Knap til at starte randskylling uden desinfektion!
6	Knap til manuelt at tilføje eller fjerne procesmiddel i en proces.
7	Åbn/luk dør
8	Sensor til at åbne/lukke døren og til at starte det forvalgte program.
9	Knap til at starte økonomiprogrammet for urinflasker.
10	Knap til at starte normalt program til normalt urene emner.
11	Knap til at starte intensivt program til svært urene emner.
6+11	Knapkombinationen til valg af programmer med rengøringsmidler til svært urene emner.
6+10	Knapkombinationen til valg af programmet med rengøringsmidler til cirkulations-emner til generel brug.

	U1/U4	Procesmiddel, lavt niveau.
	U7	Advarsel om høj temperatur for emner.

Se Brugsanvisning vedr. fejlkoder af type F.