



الزر/المصباح	الوظيفة
١	عندما يتم تشغيل المصباح الأصفر: يوجد برنامج قيد التشغيل على الجهاز. يمكن عرض درجة الحرارة ومرحلة التنظيف على شاشة العرض.
٢	عندما يتم تشغيل المصباح الأخضر: تم الانتهاء من البرنامج. يتم إيقاف تشغيل المصباح الأخضر عندما يتم فتح الباب ويتم عرض أقصى حد لدرجة حرارة العملية على شاشة العرض.
٣	عندما يتم تشغيل المصباح الأحمر: لم يبلغ الجهاز درجة حرارة التعقيم أو حدوث خطأ آخر (كود الخطأ F).
٤	شاشة العرض.
٥	زر بدء تشغيل شطف الحواف بدون تعقيم!
٦	زر لإضافة عامل التصنيع أو إزالته بشكل يدوي في العملية.
٧	افتح/أغلق الباب.
٨	مستشعر لفتح/غلق الباب ولبدء برنامج محدد مسبقاً.
٩	زر بدء تشغيل البرنامج الاقتصادي لزجاجات البول.
١٠	زر بدء تشغيل البرنامج العادي للعناصر المتسخة بشكل طبيعي.
١١	زر بدء تشغيل البرنامج المكثف للعناصر المتسخة بشدة.
١١+٦	مجموعة الأزرار لتحديد برامج بعوامل تنظيف للعناصر المتسخة بشدة.
١٠+٦	مجموعة الأزرار لتحديد برنامج بعوامل تنظيف للعناصر المتداولة العامة.

انخفاض مستوى العامل	U1/U4	
تحذير ارتفاع درجة حرارة العناصر	U7	

راجع إرشادات الاستخدام، فيما يخص رسالة الخطأ من النوع F.