



FD1800, FD1805

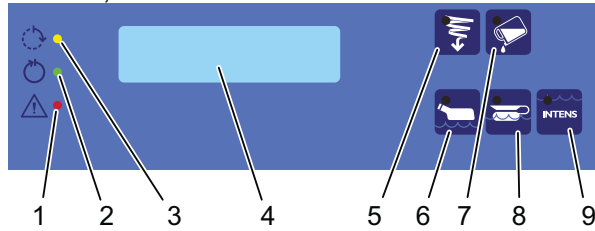

FD1810

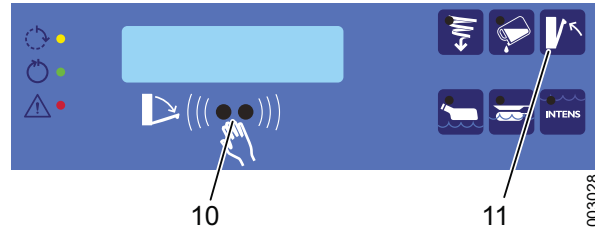

	Функція
1	Червоний: індикація помилки. На дисплеї з'явиться повідомлення про помилку.
2	Зелений: програма завершена. Світло згасає, коли дверцята відкриваються, і на короткий час на дисплеї відображаються зведені дані програми у вікні, наприклад, максимальна температура.
3	Блимаючий жовтий: виконання програми можна припинити. Жовтий: програма виконується. На дисплеї відображається поточний стан, наприклад, фаза очищення і температура.
4	Дисплей. Фахівець служби технічного обслуговування може ввести інформацію, яка буде відображатися на дисплеї.
5	Кнопка для вибору промивання по периметру.
6	Кнопка вибору економічного режиму для незначно забруднених предметів.
7	Кнопка для вибору чистильного засобу (опція).
8	Кнопка вибору стандартного режиму для предметів із середнім рівнем забрудненості.
9	Кнопка вибору інтенсивного режиму для сильно забруднених предметів.
10	Інфрачервоний датчик для відкриття/закриття дверцят і запуску попередньо вибраної програми (опція).
11	Кнопка для відкриття/закриття дверцят (опція).

Код	Опис	Міра
U1	Низький рівень засобу для видалення вапняного накипу	Додайте засіб для видалення накипу.
U2	Низький рівень робочого засобу	Додайте робочий засіб (опція).
U3	Низький рівень ополіскувача	Додайте ополіскувач (опція).
U6	Необхідно виконати огляд	Зверніться до уповноваженого спеціаліста з обслуговування.
U7	Попередження про високу температуру предметів	Почекайте, поки предмети охолонуть.
U8	Зовнішній зв'язок	Зовнішній зв'язок перерваний.
U9	Попередження про неактивність	Машина була неактивною протягом 72-х годин. Перед використанням машини для чищення предметів необхідно запустити програму з порожньою камерою.
H1	Відсутній засіб для видалення накипу	Додайте засіб для видалення накипу.
H3	Відсутній засіб для ополіскування	Додайте засіб для ополіскування.
H6	Спроба запуску з відкритими дверцятами	Закрийте дверцята (машина виконає нову спробу запуску). Якщо помилка виникає знову, зверніться до уповноваженого спеціаліста з обслуговування.
H7	Низький рівень заряду акумулятора.	Зверніться до уповноваженого спеціаліста з обслуговування.

Інформацію про коди помилок типу F див. в «Інструкціях з використання».