



FORTSCHRITTLICHES HOCHRISIKO PFLEGE BETT

# Total Lift Bett

Aufrechte Lagerung im Bett für immobile Patienten

# Progressive aufrechte Positionierung per Knopfdruck

Längere Bettruhe und Immobilität kritisch kranker Patienten können zu schwerer körperlicher Dekonditionierung, erheblichem Verlust von Muskelmasse und erhöhter Muskelschwäche führen, was zu einem längeren Aufenthalt auf der Intensivstation und im Krankenhaus führen kann.<sup>1</sup> Anerkennung der langfristigen physischen und psychischen

Folgen einer anhaltenden Immobilität haben dazu geführt, dass für ICU-Patienten eine frühzeitige Mobilisierung befürwortet wird.<sup>2</sup> Während frühes Stehen ein wünschenswertes Ziel ist, kann es für die Pflegekräfte eine Herausforderung sein, dies bei schwerkranken Patienten konsequent zu erreichen.

Mit nur einem oder zwei Betreuern kann das Total Lift Bed™ die Patienten schrittweise zum vollen Stehen bewegen, um die Rehabilitation frühzeitig in der akuten Phase einer kritischen Erkrankung zu unterstützen.

**Einhaltung der Protokolle für frühe Mobilität**  
Ohne das Bett zu verlassen, können Patienten, die einen stufenweisen Übergang von der Bettruhe zur Übernahme ihres vollen Körpergewichts benötigen, schrittweise in die stehende Position gebracht werden.

**Patentiertes Fuß Lifter™ Trittbrett**  
Bei aktivierter Kippfunktion bewegt sich der patentierte Fußheber in Richtung der Füße des Patienten.

Bei Kontakt beginnt das Bett sanft auf den gewünschten Winkel oder das gewünschte Kräfte-Leistungsvermögen des Patienten zu kippen, während er in einer sicheren Position gehalten wird. Der Fußheber stellt sich automatisch so ein, dass er bündig mit dem Boden abschließt, damit der Patient gegebenenfalls aus dem Bett steigen kann.

**Sicherheit bei Bewegung und im Stehen**  
Ein flexibles Gurtsystem hilft, den Patienten während der Bewegung in die aufrechte Position in Position zu halten.



## Patentiertes Steuerungssystem für die Druckentlastung

Beim Kippen des Bettes wird die vom Patienten erreichte Änderung der Kraft-Leistungsfähigkeit auf dem Fußheber-Trittbrett angezeigt. Dieses visuelle Feedback hilft den Betreuern, den Fortschritt zu überwachen und Meilensteine für Rehabilitations- und Mobilitätsziele zu setzen.

## Flexible Positionierung

Neben progressivem Stehen bietet das Total Lift Bett eine flexible Patientenlagerung zur Unterstützung von Pflegeverfahren und Patientenmobilisierung. Es ermöglicht auch die Trendelenburg-Position für ausgewählte Pflegeverfahren.

## Hautschutz

Das integrierte fünfzonige Matratzensystem bietet dem Pflegepersonal die Wahl zwischen Low-Air-Loss oder Wechseldruck, um bei der Vermeidung und dem Management von Druckverletzungen zu helfen. Die Festigkeit der Matratze kann über die Komfortsteuerung verändert werden.

## In Liegestuhlposition

Die Sitzpositionierung hilft, den Patienten, zwischen den Stehphasen, in einer aufrechten Position zu halten, wobei die Beine nach unten gehen. Die Position des Fußteils kann vom Mobilteil aus an die unterschiedlichen Bedürfnisse des Patienten angepasst werden.



## Synergie: Total Lift Bett und Sara Combilizer®


Das frühzeitige Kippen und Stehen im Bett kann durch tägliche Kipp-, Steh- und Stuhlpositionssitzungen mit dem Sara Combilizer verbessert werden.

Das Aufstehen aus dem Bett hilft, viele positive psychologische Vorteile zu generieren, da Patienten und ihre Familien Fortschritte in Richtung Leben außerhalb der Intensivstation wahrnehmen.



Arjo Sara Combilizer

## Progressive aufrechte Positionierung

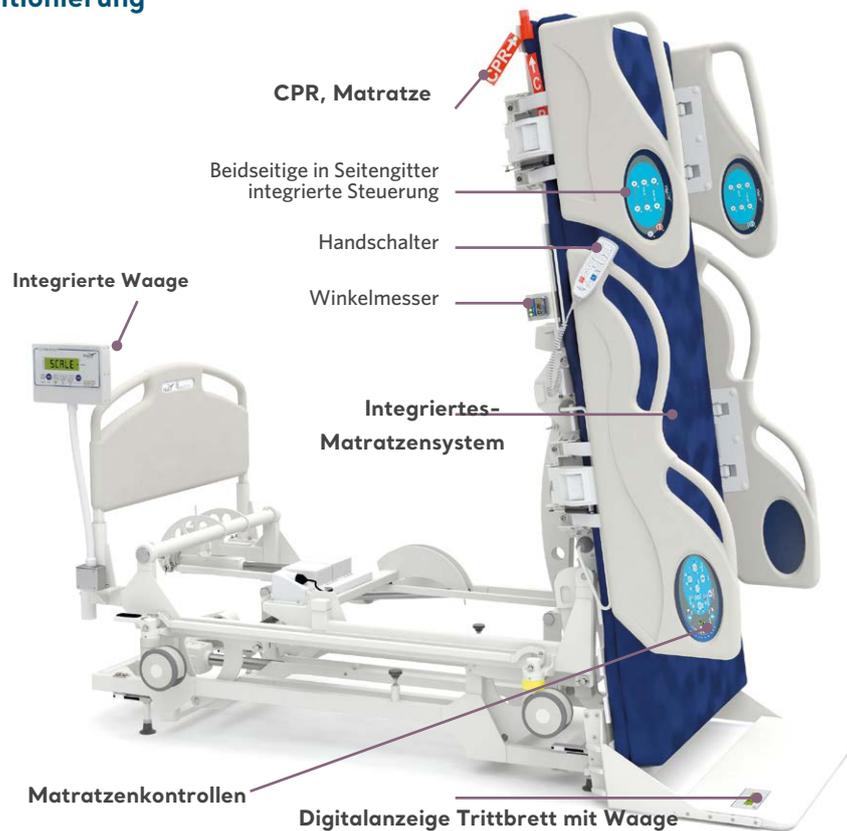

## Technische Daten

### TECHNISCHE INFORMATIONEN

#### Länge

**Gesamtlänge (in normaler Position)** 85.83 in (218 cm)

**Gesamtlänge - Voll ausgefahren (Fußaushebung)** 89.76 in (228 cm)

#### Breite

**Gesamtbreite - Mit Seitenschiene** 40.95 in (104 cm)

#### Höhe

**Niedrige Position - Deck zu Boden** 20.67 in (52.5 cm)

**Hohe Position - Deck zu Boden** 29.72 in (75.5 cm)

**Von der Bettkante bis zum Boden (stehende Position)** 80 in (204 cm)

#### Abstand

**Vom Untergestell bis zum Boden** 1.38 in (3.5 cm)

**Rollendurchmesser** 5 in (12.7 cm)

### FÜßHEBER

Bewegt sich 7.9 in (20 cm) über die Matratze in Richtung Kopfteil

Verlängert das Bett um - 3.95 in (10 cm)

Bewegt sich in Sitz - Position (bis Kontakt mit Füßen) oder max 7.9 in (20 cm).

Sichere Arbeitslast 616 lb (280 kg)

Max Patienten Gewicht is 425 lb (193 kg)

### Standards

CE according to MDD 93/42 EEC, IEC 60601-1 3rd Ed. IEC 60601-2-52, IEC606-1-6, IEC62366, FDA Registration (CFR21 Part 820).

#### References:

1. Truong AD, Fan E, Brower RG, Needham DM. Mobilizing patients in the intensive care unit from pathophysiology to clinical trials. Crit Care. 2009;13:216.
2. Morris PE, Goad A, Thompson C, et al: Early intensive care unit mobility therapy in the treatment of acute respiratory failure. Crit Care Med. 2008;36(8):2238-2243.

Die hier aufgeführten Modelle werden von VitalGo Systems, Inc. hergestellt und unter Vertrag von Arjo AB vertrieben. Verpackung, Etikettierung und Dokumentation des Produkts werden dies widerspiegeln. Da es sich bei unserer Politik um eine kontinuierliche Weiterentwicklung handelt, behalten wir uns das Recht vor, Konstruktionen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Total Lift Bed™ und Foot Lifter™ sind Warenzeichen von VitalGo Systems, Inc. Alle anderen ® und ™ sind Marken von Arjo AB.

Oktober 2019 Nur von Arjo entworfene Teile, die speziell für diesen Zweck entworfen wurden, sollten für die von Arjo gelieferten Geräte und Produkte verwendet werden. Da es sich bei unserer Politik um eine kontinuierliche Weiterentwicklung handelt, behalten wir uns das Recht vor, Konstruktionen und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. ® und ™ sind Marken der Arjo-Unternehmensgruppe.

Bei Arjo engagieren wir uns für die Verbesserung des Alltagslebens von Menschen, die von eingeschränkter Mobilität und altersbedingten gesundheitlichen Herausforderungen betroffen sind. Mit Produkten und Lösungen, die eine ergonomische Patientenbehandlung, Körperhygiene, Desinfektion, Diagnostik und die effektive Prävention von Druckverletzungen und venösen Thromboembolien gewährleisten, helfen wir Fachleuten in allen Pflegeumgebungen, den Standard der sicheren und würdevollen Pflege kontinuierlich zu erhöhen. Alles, was wir tun, tun wir with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500  
Arjo Austria GmbH, Lemböckgasse 49A, 1230 Wien, 01 86656  
www.arjo.com/de-at

**arjo**

Arjo.A00026.1.0.INT.EN