

HIGH CARE EN INTENSIVE CARE BED

# Enterprise 9000X



## Ontworpen voor u en uw zorgvrager

Het Enterprise 9000X bed van Arjo biedt voordelen voor de zorgvrager, de zorgverlener en de zorginstelling. Bij Arjo wordt de ontwikkeling en verbetering van producten gestuurd door de uitdagingen die verpleegkundigen elke dag ervaren. Samen gaan we op zoek naar de best mogelijke oplossing om de uitdagingen te overkomen. Bij het ontwerp van het Enterprise 9000X-bed lag de basis in aspecten die in alle zorgomgevingen van groot belang zijn:

- Veiligheid voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener
- Voldoen aan de actuele internationale normen
- Apparatuur die degelijk, intuïtief en gebruiksvriendelijk is
- Oplossingen die zijn gericht op de kwaliteit van zorg

Het Enterprise 9000X-bed voor high en intensive care is gebaseerd op de belangrijkste eigenschappen van de Enterprise 5000X- en 8000X-bedden. Dit nieuwe bed besteedt bijzondere aandacht aan de klinische functionaliteit en veiligheid. Met het gepatenteerde profileringssysteem, geïntegreerde weegunit, bedexit-alarm en anti-beknellingssensoren onder het bed, is de Enterprise 9000X ontworpen om te voldoen aan de wensen van zowel de zorgvrager, de zorgverlener en de zorginstelling.

# Specificaties



## BIO-CONTOUR®

Het gepatenteerde Bio-Contour®-systeem biedt een unieke combinatie van bewegende onderdelen en een licht gebogen matrasbodem.



## GEÏNTEGREERDE BEDVERLENGING

Het bed kan eenvoudig naar verschillende bedlengtes worden geconfigureerd. Dat biedt gebruiksgemak en grotere flexibiliteit.



## LICHT ONDER HET BED

Het uitstapgedeelte aan beide zijden wordt verlicht als hulpmiddel voor zorgvragers bij het uitstappen in een slecht verlichte ruimte.



## INFECTIEPREVENTIE

Het bed is zo ontworpen dat het aan alle kanten eenvoudig toegankelijk is. Daarmee wordt het reinigingsproces vereenvoudigd. De onderdelen van de bedbodem zijn licht, soepel en eenvoudig te verwijderen.



## WEEGUNIT

De geïntegreerde en gebruiksvriendelijke weegunit kan een gewicht aan tot 250 kg. De zorgvrager kan in elke stand van het bed gewogen worden. De automatische compensatiefunctie zorgt ervoor dat het gewicht van de zorgvrager niet beïnvloed wordt wanneer er voorwerpen op het bed worden gelegd of er juist vanaf worden gehaald.



## ANTI-BEKNELLINGSSENSOREN

De anti-beknellingssensoren nemen voorwerpen/personen onder het bed waar. Wanneer de infraroodstraal wordt onderbroken als de bedbodem omlaag wordt gebracht, beweegt de bodem automatisch omhoog en weg van het obstakel. Het risico op beknelling wordt hiermee verkleind.



## PIT-STOP ONDERHOUD

Ontwikkeld met het oog op 'pitstop onderhoud'. Het open design zorgt ervoor dat het verwisselen van onderdelen in enkele minuten kan worden uitgevoerd.



## BEDEXIT-ALARM

Na activering van het bedexit-alarm, kan deze op verschillende gevoeligheidsniveaus worden ingesteld. Er wordt een hoorbaar alarmsignaal geactiveerd om de zorgverleners te waarschuwen wanneer de zorgvrager het bed verlaat.



## CARDIAC CHAIR-POSITIE

Middels een gebruiksvriendelijk bedieningspaneel kan het bed eenvoudig in de zitstand gezet worden.



## LAGE STAND

Een belangrijk voordeel dat het risico op letsel door vallen beperkt.



## 30 GRADEN-RUGLEUNING

De rugleuning stopt tijdens het omhoog of omlaag zetten bij een hoek van 30°. Hierdoor kan deze gemakkelijk steeds opnieuw in de juiste hoek worden gezet.



Optioneel:  
IndiGo

## INDIGO (OPTIONEEL)

IndiGo is een gemotoriseerd vijfde wiel dat, met slechts een lichte aanraking, lichter transport mogelijk maakt voor alle zorgverleners - voor veiligheid en eenvoud. IndiGo is altijd beschikbaar en wordt direct op uw Citadel- of Enterprise-bed gemonteerd.

AFMETINGEN	AFMETINGEN
Totale standaardlengte	2350 mm (HOB), 2300 mm (HOD)
Totale breedte	1030 mm
Matraslengte standaard versie	2020 mm
Matrasbreedte	880 mm
Totale lengte verlengde stand	2470 mm (HOB), 2420 mm (HOD)
Matraslengte verlengde stand	2140 mm
Totale lengte korte stand	2240 mm (HOB), 2190 mm (HOD)
Matraslengte korte stand	1910 mm
Hoogste stand (met 125 mm zwenkwielen)	760 mm
Laagste stand (met 125 mm zwenkwielen)	320 mm
Lengte rugsteun	850 mm
Zitlengte	215 mm
Kuitlengte	560 mm
Bovenbeenlengte	365 mm

PRODUCT	AFMETINGEN
Veilige werkbelasting/maximale gewicht zorgvrager	250 kg / 185 kg
Configuratie hoofdeinde 'off base'	
Veiligheidsnorm	IEC60601-2-52

  

ELEKTRISCHE	GEGEVENS
Bescherming vochtindringing	IPX4
Bescherming tegen elektrische schok	Beschermingsklasse 1, Type B
Spanning in	3 A max. bij 230 V AC, 50/60 Hz
Spanning in	5,8 A max. 120 V AC, 60 Hz

HOEKEN	AFMETINGEN
Kanteling hoofdeinde	12°
Benen naar beneden	12°
Hoek rugsteun	62°
Pauzeerstand rugsteun	30°
Kantelhoek boven-beengedeelte	20°
Kantelhoek kuitgedeelte	16°

## LEES MEER OVER ENTERPRISE EN INDIGO



Demonstratievideo  
Enterprise-serie



Demonstratievideo  
IndiGo

Oktober 2019 Gebruik uitsluitend Arjo-onderdelen die speciaal voor dat doel zijn ontworpen bij door Arjo geleverde apparatuur en producten. We voeren een beleid dat is gericht op continue ontwikkeling en behouden ons daarom het recht voor ontwerpen en specificaties zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. ® en ™ zijn handelsmerken van de Arjo Groep.  
© Arjo, 2019

Bij Arjo engageren we ons om de levenskwaliteit van mensen met een verminderde mobiliteit en ouderdomsgerelateerde gezondheidsproblemen te verbeteren. Met producten en oplossingen voor de ergonomische transfer van zorgvragers, persoonlijke hygiëne, desinfectie en de effectieve preventie van decubitus en veneuze trombo-embolie helpen we zorgprofessionals om de standaard van veilige en waardige zorg te verhogen. Altijd "with people in mind".

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500  
Arjo Belgium nv · Evenbroekveld 16 · 9420 Erpe-Mere · Belgium · +32 (0) 53 60 73 80

www.arjo.be

**arjo**

Arjo.A001051.0.BE-NL