

Lectura del contador de funcionamiento del paciente: horas y minutos

1




Las horas se muestran de forma predeterminada siempre que se enciende la bomba.
La «h» indica el valor de las horas (p. ej., 12 h).

2



Pulse el botón derecho durante 1 segundo para ver los minutos.

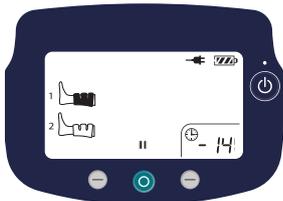

Los minutos aparecen durante 5 segundos al pulsar el botón.
El valor de los minutos está precedido por un guion (p. ej., - 14 = 14 minutos).


3



Las horas vuelven a mostrarse automáticamente.
Tiempo de compresión = 12 horas y 14 minutos.


Reinicio del contador de funcionamiento del paciente: horas y minutos

1

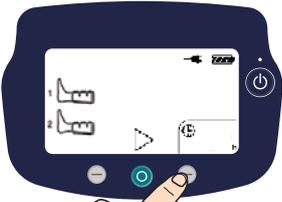

Ponga la bomba en pausa. Mantenga pulsado el botón derecho durante 2 segundos hasta que el valor de las horas parpadee.

2

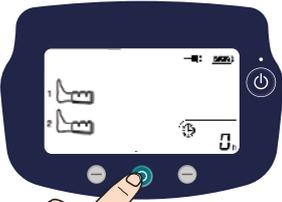

Mantenga pulsado el botón central durante 3 segundos para reiniciar a cero.

3



Pulse el botón derecho para confirmar el reinicio.