



## Očitavanje vremena rada na pacijentu – sati i minute

1

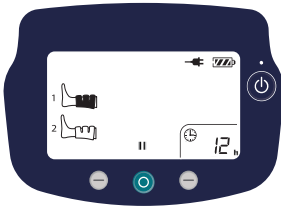


Prema zadanim postavkama sati se prikazuju svaki put kad se uključi pumpa. Polje „h“ prikazuje vrijednost u satima (npr. 12 h)

2

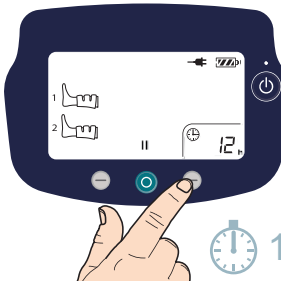


Pritisnite desni gumb na 1 sekundu za prikaz minuta.

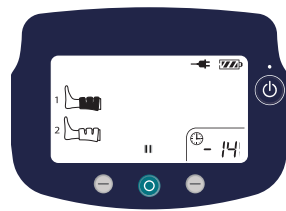

Kad pritisnete gumb, minute se prikazuju 5 sekundi. Ispred vrijednosti za minute nalazi se crtica (npr. - 14 = 14 minuta).


3

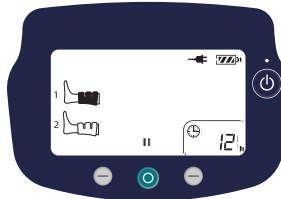

Prikaz sati vraća se automatski. Vrijeme kompresije = 12 sati, 14 minuta.


## Ponovno postavljanje vremena rada na pacijentu – sati i minute

1

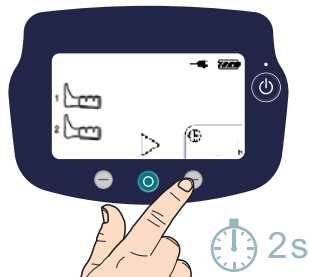


Pauzirajte pumpu. Pritisnite i dvije sekunde držite desni gumb dok vrijednost sati ne zatreperi.

2

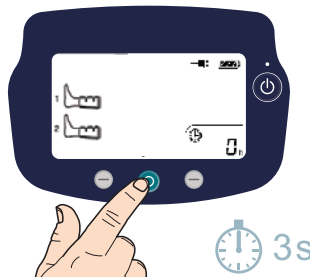

Pritisnite i tri sekunde držite srednji gumb za vraćanje vrijednosti na nulu.

3

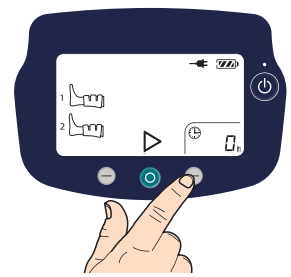

Pritisnite desni gumb za potvrdu ponovnog postavljanja.