



Vysvetlenie prevádzkového časovača pacienta – hodiny a minúty

1

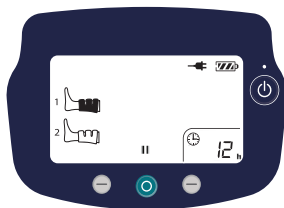


Pri každom zapnutí pumpy sa predvolene zobrazujú hodiny.
Symbol „h“ uvádza hodnotu v hodinách (napr. 12 h).

2

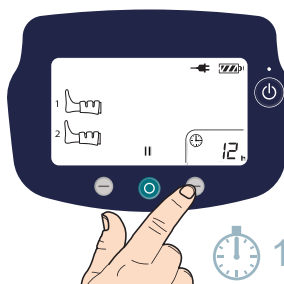


Stlačením pravého tlačidla na 1 sekundu zobrazíte minúty.

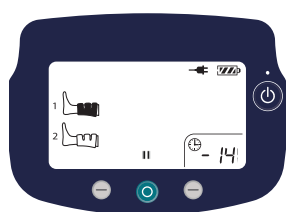

Po stlačení tlačidla sa minúty zobrazujú 5 sekúnd.
Pred hodnotou minút sa uvádza spojovník (napr. – 14 znamená 14 minút).




3

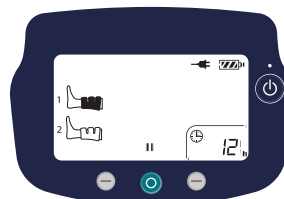

Zobrazenie hodín sa automaticky obnoví.
Čas kompresie = 12 hodín, 14 minút.


Obnovenie prevádzkového časovača pacienta – hodiny a minúty

1

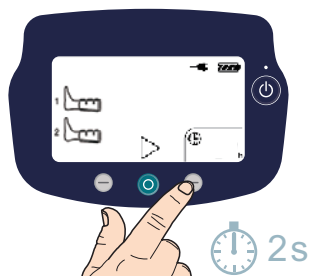


Zastavte pumpu. Stlačte pravé tlačidlo a podržte ho 2 sekundy, kým nebude hodnota hodín blikat’.

2

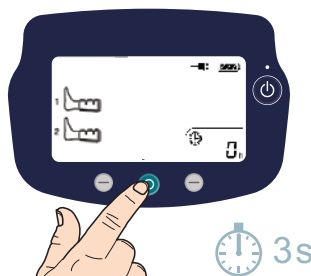

Stlačením stredného tlačidla a jeho podržaním na 3 sekundy hodnotu obnovíte na nulu.

3

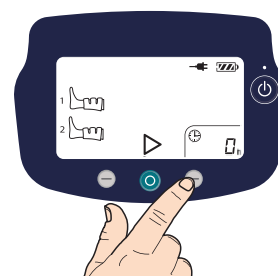

Stlačením pravého tlačidla potvrdíte obnovenie.