

Nimbus Professional

Bauchlagerung

- Bauchlagerungen sollten nur von Pflegekräften vorgenommen werden, die in deren Anwendung geschult sind. Befolgen Sie das krankenhausinterne Protokoll zur Bauchlagerung von intensivpflichtigen Patienten.
- Bei Bedarf sollten Bettseitengitter entsprechend der krankenhausinternen Leitlinien verwendet werden.
- Die folgenden Informationen dienen als Kurzanleitung für die Verwendung der Matratze, wenn ein Patient in Bauchlage gedreht wird. Eine detaillierte Anleitung und andere wichtige Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts.

1



Positionieren Sie den Patienten in Rückenlage auf der Matratze. Der Patient muss so positioniert werden, dass die Schultern auf gleicher Linie mit der – vom Kopfende ausgehend – 4. Zelle der Matratze liegen.

Drücken Sie den Statik-Knopf, um den Kompressor in den Statik-Modus zu bringen, sodass sich alle Matratzenzellen auf einer Ebene befinden.

Um zu gewährleisten, dass der Patient korrekt auf der Matratze positioniert werden kann, muss die Matratze stabil sein und darf sich nicht im dynamischen Modus befinden, während der Patient gedreht wird.



Alle Wundventile müssen geschlossen sein und nach oben zeigen. Das bedeutet, dass alle Zellen der Matratze aufgepumpt sind.



Wählen Sie den statischen Modus. Wenn das gelbe Lämpchen auf der Taste leuchtet, befindet sich das System im Statik-Modus.




Wundventile sollten nur geöffnet werden, wenn bestimmte Zellen für einen längeren Zeitraum entlüftet bleiben müssen. Alle Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts.



Die Komfortkontrolle ist auf „fest“ eingestellt.

2

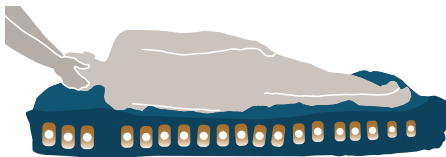

Zur Entlüftung des Kopfbereichs öffnen Sie die Wundventile an den drei Kopfsegmentzellen, um diese zu entleeren.

Die für die Sicherung der Atemwege und die Positionierung des Kopfes zuständige Person koordiniert am Kopfende des Bettes die Umlagerung.

Bewegen Sie den Patienten auf eine Seite des Bettes, soweit dies sicher und bequem ist. Drehen Sie den Patienten in die Seitenlage.



Öffnen Sie zur Entlüftung des Kopfbereichs die Wundventile an den drei Kopfsegmentzellen, sodass nur diese sich entleeren.



Statischen Modus beibehalten.




Alle anderen Wundventile sollten zu diesem Zeitpunkt geschlossen bleiben.



Die Komfortkontrolle ist weiterhin auf „fest“ eingestellt.

3

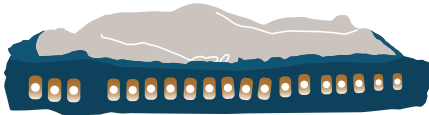

Halten Sie den Kopf des Patienten und drehen Sie ihn langsam in die Bauchlage.
Die Schultern des Patienten sollten vom Kopfende des Bettes aus gesehen über der 4. Zelle liegen.
Achten Sie darauf, dass Kabel und Überwachungsgeräte nicht unter dem Körper des Patienten eingeklemmt werden.
Passen Sie die Position des Kopfes an, indem Sie Schaumstoff- oder Gelkissen benutzen. Vermeiden Sie Überdehnung und achten Sie auf eine physiologische Positionierung.



Alle Wundventile zeigen nach oben (alle Zellen sind aufgepumpt), mit Ausnahme der Wundventile des Kopfbereichs, die offen sein sollten, wenn die Entlüftung des Kopfbereichs erforderlich ist.



Statischer Modus wird beibehalten.



Die Komfortkontrolle ist weiterhin auf „fest“ eingestellt.

4



Wählen Sie den Wechseldruckmodus, indem Sie erneut den Statik-Modus-Knopf drücken. Die gelbe Anzeige leuchtet nicht mehr.
Positionieren Sie die Gliedmaßen und den Kopf des Patienten entsprechend Ihrem krankenhauses internen Protokoll für die Bauchlagerung.
Mit Anwendung der Wundventil-Technologie können bestimmte Luftzellen entleert werden, um empfindliche Körperbereiche zu entlasten, z. B. unter den Zehen und im Genitalbereich. Alle Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Produkts.
Regelmäßige Beobachtungen sollten durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass anatomisch sensitive Bereiche keinem übermäßigen Druck ausgesetzt werden.



Passen Sie die einzelnen Wundventile nach Bedarf an, um an bestimmten anatomischen Bereichen eine Druckentlastung zu erreichen.

- Entlüften Sie nur eine Zelle im Rumpfbereich.
- Entlüften Sie nur eine Zelle im Waden-/Fersenbereich.

Entlüften Sie nicht mehr Zellen in jedem Bereich. Dies könnte die Unterstützung des Patienten während des normalen, wechselnden Zyklus beeinflussen.



Wählen Sie den Wechseldruckmodus, indem Sie den Statik-Modus-Knopf noch einmal drücken. Die gelbe Anzeige leuchtet nicht mehr.



Die Komfort-Bedienanzeige ist entsprechend eingestellt.

