


Nimbus Professional

Positionnement en décubitus ventral

- Les procédures de positionnement en décubitus ventral ne doivent être effectuées que par un personnel formé. Suivez le protocole de l'établissement en matière de positionnement en décubitus ventral des patients gravement malades.
- Des barrières de sécurité de lit doivent être utilisées quand cela s'avère nécessaire et conformément à la politique en vigueur dans l'établissement.
- Les informations suivantes constituent un guide rapide d'utilisation du matelas lors du positionnement d'un patient en décubitus ventral. Consultez le mode d'emploi du produit pour des instructions détaillées et autres informations importantes.

1

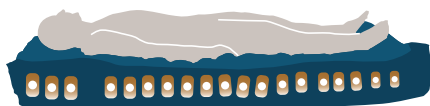

Installez le patient en position allongée sur le matelas. Positionnez le patient de sorte que ses épaules soient alignées avec la 4e cellule en partant du haut du matelas.

Appuyez sur le bouton Statique pour mettre la pompe en mode Statique, afin que toutes les cellules du matelas soient gonflées de la même manière.

Le matelas doit être stable et ne doit pas subir de pression alternée pendant que le patient est retourné, afin qu'il soit correctement positionné sur le matelas.



Toutes les valves de décharge doivent être fermées et orientées vers le haut, ce qui indique que toutes les cellules du matelas sont gonflées.



Les valves de décharge ne doivent être ouvertes que lorsque des cellules spécifiques doivent rester dégonflées pendant des durées prolongées. Consultez le mode d'emploi du produit pour plus de détails.




Sélectionnez le mode Statique. Le mode Statique est confirmé par l'allumage du voyant jaune de la commande.



La commande de confort est réglée sur Ferme.

2

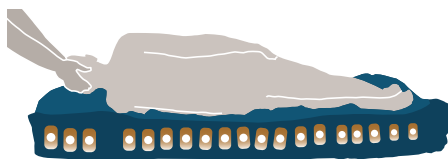

Si le dégonflage de la section de tête est nécessaire, ouvrez les valves de décharge sur les trois cellules de la section de tête pour les dégonfler.

La personne en charge de l'assistance respiratoire et du positionnement de la tête doit se placer à la tête du lit pour coordonner la procédure de retournement.

Déplacez le patient vers l'un des côtés du lit, aussi loin que possible tant que cela reste sans risque et confortable pour lui. Retournez le patient en position latérale/couché sur le côté.



Ouvrez les valves de décharge sur les trois cellules de la zone de tête afin que seules les cellules de la zone de tête se dégonflent si le dégonflage de cette zone est nécessaire.



Toutes les autres valves de décharge doivent rester fermées à ce stade.




Restez en mode Statique.



La commande de confort doit rester réglée sur Ferme.

3

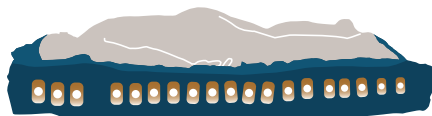

En soutenant la tête du patient, retournez lentement ce dernier jusqu'à ce qu'il se retrouve en décubitus ventral.

Les épaules du patient doivent être positionnées sur la 4e cellule en partant de l'extrémité tête du matelas.

Assurez-vous que les sondes et le matériel de surveillance ne se retrouvent pas coincés sous le corps du patient.

Ajustez la position de la tête à l'aide de coussins ou de coussinets en mousse ou en gel pour qu'elle soit dans une position confortable sans hyperextension.



Toutes les valves de décharge sont orientées vers le haut (toutes les cellules gonflées) à l'exception des valves de décharge de la zone de tête qui doivent être ouvertes si le dégonflage de cette zone est nécessaire.



Restez en mode Statique.



La commande de confort reste réglée sur Ferme.

4



Sélectionnez le mode Pression alternée en appuyant sur le bouton de mode Statique. Le voyant jaune n'est plus allumé.

Positionnez les membres et la tête du patient conformément au protocole de positionnement en décubitus ventral en vigueur dans votre établissement.

Grâce à la technologie Wound Valve, des cellules d'air spécifiques, à savoir les cellules situées sous les orteils et la région génitale, peuvent être dégonflées pour décharger la pression des régions du corps les plus sensibles. Consultez le mode d'emploi du produit pour plus d'instructions.

Vérifiez régulièrement que le patient ne souffre pas d'accumulation de pression, en particulier au niveau des zones anatomiques sensibles.



Réglez chaque valve de décharge comme nécessaire pour une décharge de la pression au niveau de points anatomiques spécifiques.

- Dégonflez une seule cellule dans la section dorsale.

- Dégonflez une seule cellule dans la section des mollets/talons.

Ne dégonflez pas d'autres cellules dans chaque zone, pour ne pas affecter le soutien du patient pendant le cycle normal de pression alternée.



Sélectionnez le mode Alternatif en appuyant une fois sur le bouton Statique. Le voyant jaune n'est plus allumé.



La commande de confort peut être réglée comme nécessaire.

