


Nimbus Professional

Buikligging

- Procedures om zorgvragers in buikligging te plaatsen mogen alleen worden uitgevoerd door medewerkers die hierin getraind zijn. Volg het protocol van het ziekenhuis voor het in buikligging plaatsen van kritisch zieke zorgvragers.
- Zo nodig en in overeenstemming met het ziekenhuisbeleid dienen veiligheidshekken te worden gebruikt.
- De volgende informatie is bedoeld als beknopte leidraad voor hoe het matras te gebruiken als een zorgvrager in buikligging moet worden geplaatst. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product voor gedetailleerde instructies en andere belangrijke informatie.

1

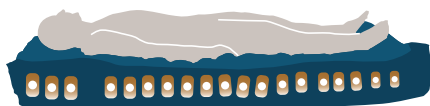

Plaats de zorgvrager in rugligging op het matras. Plaats de zorgvrager zo dat de schouders op één lijn zijn met de 4e cel vanaf het hoofdeinde van het matras.

Druk op de knop Statisch om de pomp in de statische modus te schakelen, en de cellen constant blijven met alle cellen gelijkmatig opgeblazen.

Als de zorgvrager gedraaid wordt, moet het matras stabiel zijn en niet alternen zodat de zorgvrager correct op het matras gepositioneerd blijft.



Alle Wound Valves moeten gesloten zijn en omhoog wijzen, dit geeft aan dat alle cellen in het matras zijn opgeblazen.



Statische modus kiezen. De statische modus wordt bevestigd doordat het gele indicatielampje van de knop gaat branden.




Comfort Control ingesteld op Firm.



Wound Valves mogen alleen worden geopend als specifieke cellen gedurende langere periodes niet mogen worden opgeblazen. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product voor gedetailleerde informatie.

2

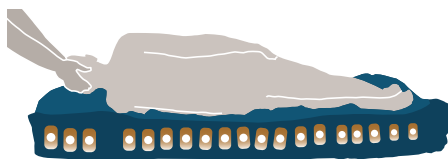

Als de hoofdsectie moet leeglopen opent u daartoe de Wound Valves op de drie hoofdsectiecellen.

De persoon die verantwoordelijk is voor het luchtwegbeheer en de positie van het hoofd neemt plaats aan het hoofdeinde van het bed om de draaiprocedure te coördineren.

Verplaats de zorgvrager naar één kant van het bed, zo ver als veilig en comfortabel is. Draai de zorgvrager in een zijdelingse positie/op zijn zij.



Open de Wound Valves op de drie hoofdsectiecellen zodat alleen deze leeglopen als dat vereist is.



Alle andere Wound Valves dienen gedurende deze tijd gesloten te blijven.




In statische modus blijven.



Comfort Control blijft ingesteld op Firm.

3

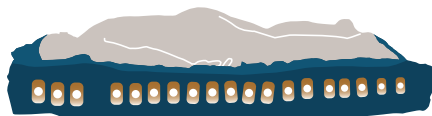

Draai de zorgvrager langzaam in buikligging terwijl u het hoofd van de zorgvrager ondersteunt.

De schouders van de zorgvrager dienen te zijn gepositioneerd op de 4e cel vanaf het hoofdeinde van het matras.

Zorg ervoor dat snoeren en delen van de monitoringapparatuur niet onder het lichaam van de zorgvrager terechtkomen.

Pas de positie van het hoofd aan met kussens, schuim of gel-pads zodat een comfortabele houding wordt bereikt zonder hyperextensie.



Alle Wound Valves wijzen omhoog (alle cellen opgeblazen) behalve de Wound Valves van de hoofdsectie, die open moeten blijven als de hoofdsectie niet moet worden opgeblazen.



In statische modus blijven.



Comfort Control blijft ingesteld op Firm.

4



Selecteer de alternierende drukmodus door de Statische modusknop in te drukken. Het gele lampje brandt niet langer.

Positioneer de ledematen en het hoofd van de zorgvrager zoals voorgeschreven in het buikliggingsprotocol van uw ziekenhuis.

Met behulp van Wound Valve-technologie kunnen specifieke luchtcellen worden ontlucht om druk af te laten van gevoelige lichaamsgebieden, zoals de cellen onder de tenen en het genitale gebied. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het product voor volledige instructies.

Regelmatig moet worden gecontroleerd om ervoor te zorgen dat er speciaal op anatomisch gevoelige gebieden van de zorgvrager geen druk wordt opgebouwd.



Pas individuele Wound Valves aan zoals vereist om op specifieke anatomische punten lucht af te laten.

- Laat slechts één cel in de rompsectie leeg.
- Laat slechts één cel in de kuit/hielsectie leeg.

Laat niet meer cellen in elk gebied leeg anders kan dit gevolgen hebben de ondersteuning van de zorgvrager tijdens de normale alternierende cyclus.



Selecteer de alternierende modus door de Statische modusknop één maal in te drukken. Het gele lampje brandt niet langer.



Comfort Control ingesteld als passend.

