


# Enterprise 5000X

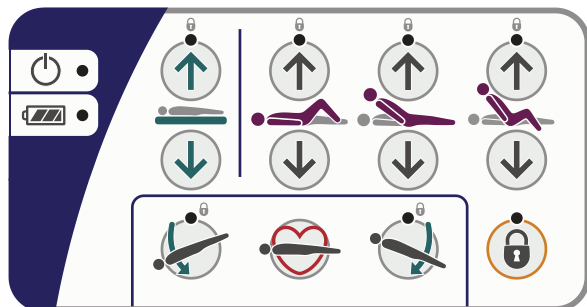

## Slaugytojo valdymo skydelis (SVS)

## Paciento nuotolinio valdymo pulteliai



Maitinimo įjungimo indikatorius



Šviesdiodinis baterijos būsenos indikatorius



visiškai įkrautas



kraunama



išsikrovęs



**ŠPR mygtukas** – išlyginama čiužinio platforma.



Nuleisti galvūgalį  
(Trendelenburgo padėtis).



Nuleisti kojūgalį  
(atvirkštinė Trendelenburgo padėtis).




**Funkcijų blokavimo mygtukas** – paspauskite mygtuką, po to paspauskite pasirinktą (-us) slaugytojo valdymo skydelio mygtuką (-us), kad užblokuotumėte / atblokuotumėte funkciją. Geltona lemputė = užblokuota



**Automatinis kėdės pakėlimo mygtukas** – paspauskite ir palaikykite kėdės padėčiai pakeisti.



**Automatinis kėdės nuleidimo mygtukas** – čiužinio platforma grąžinama į plokščią ir lygią padėtį.

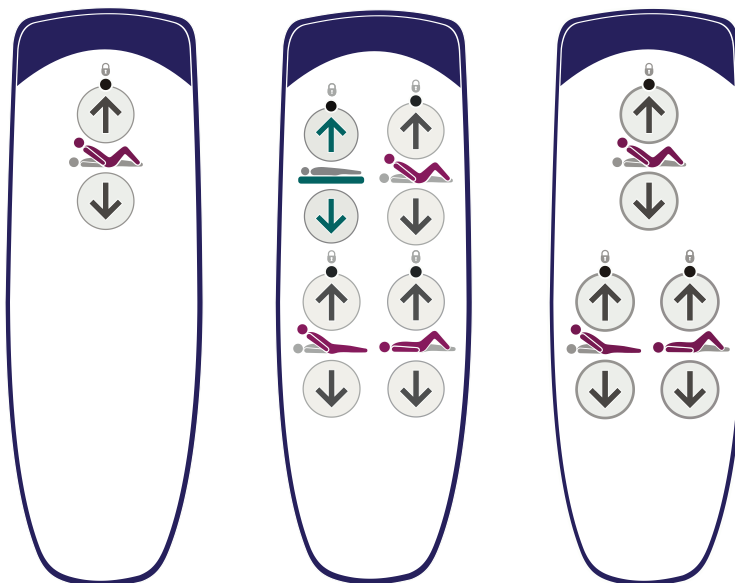

Pakelti / nuleisti čiužinio platformą.



Pakelti / nuleisti šlaunų dalį.



Pakelti / nuleisti nugaros atlošą.



**„Bio-Contour“ pakėlimo mygtukas** (tik pacientui valdyti) – pakelti nugaros atlošą ir šlaunų dalį.



**„Bio-Contour“ nuleidimo mygtukas** (tik pacientui valdyti) – grąžinama į plokščią padėtį.

