


Enterprise 5000X



간호인용 조절 장치 패널(ACP)

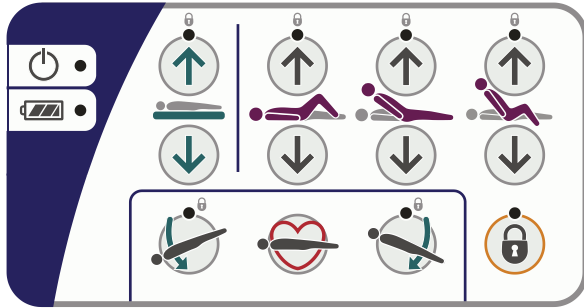

전원 켜짐 표시등

배터리 상태 LED 표시등

완전 충전됨

충전 중

방전됨

CPR 버튼 - 매트리스 플랫폼을 편평하게 합니다.

머리 끝 내림
(트렌델렌버그 자세).


발 끝 내림
(역 트렌델렌버그 자세).

기능 잠금 버튼 - 이 버튼을 눌러 기능을 잠금/잠금 해제한 다음, 선택한 간호인용 조절 장치 패널 버튼을 누릅니다.
노란색 등 = 잠금

자동 의자 올림 버튼 - 의자 자세가 될 때까지 길게 누릅니다.

자동 의자 내림 버튼 - 매트리스 플랫폼을 수평으로 되돌려 놓습니다.

환자용 단말기

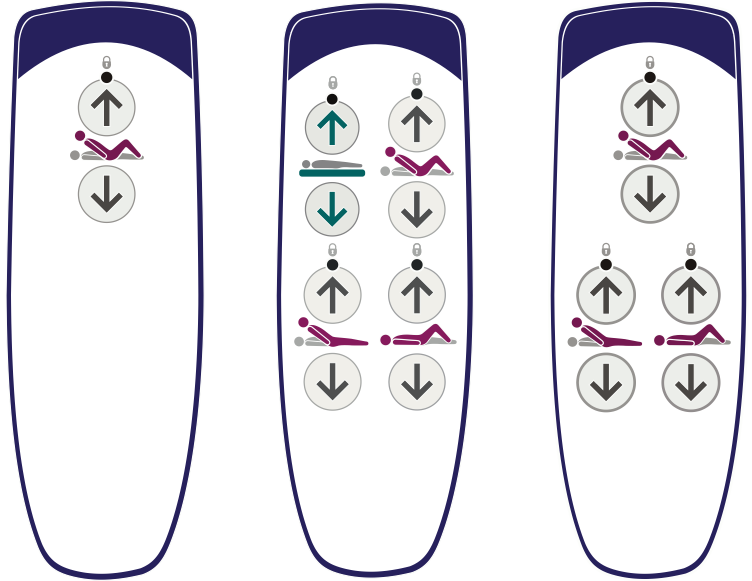

매트리스 플랫폼을 올립니다/내립니다.



허벅지 부분을 올립니다/내립니다.



등받이를 올립니다/내립니다.



Bio-Contour 올림 버튼
(환자 조절장치 전용) -
등받이와 허벅지 부분을 올립니다.

Bio-Contour 내림 버튼
(환자 조절장치 전용) - 수평 위치로 되돌려 놓습니다.