


## Enterprise 5000X



## Panel sterowania opiekuna

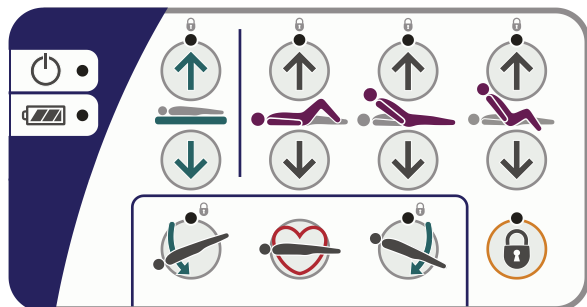

Wskaźnik włączonego zasilania



Wskaźnik LED statusu naładowania baterii



● w pełni naładowany




● ładowanie



● rozładowany

**Przycisk CPR** — spłaszcza platformę materaca.Obniżanie wezglowia  
(pozycja Trendelenburga).Obniżanie strony nóg  
(odwrócona pozycja Trendelenburga).**Przycisk blokady funkcji** — należy nacisnąć ten przycisk, a następnie nacisnąć wybrany przycisk (przyciski) panelu sterowania opiekuna, aby zablokować/odblokować daną funkcję. Żółta kontrolka = blokada**Przycisk automatycznego krzesła** — nacisnąć i przytrzymać, aby uzyskać pozycję krzesła**Przycisk automatycznego krzesła ze strzałką do dołu** — ponownie ustawia platformę materaca w pozycji poziomej.

## Piloty pacjenta

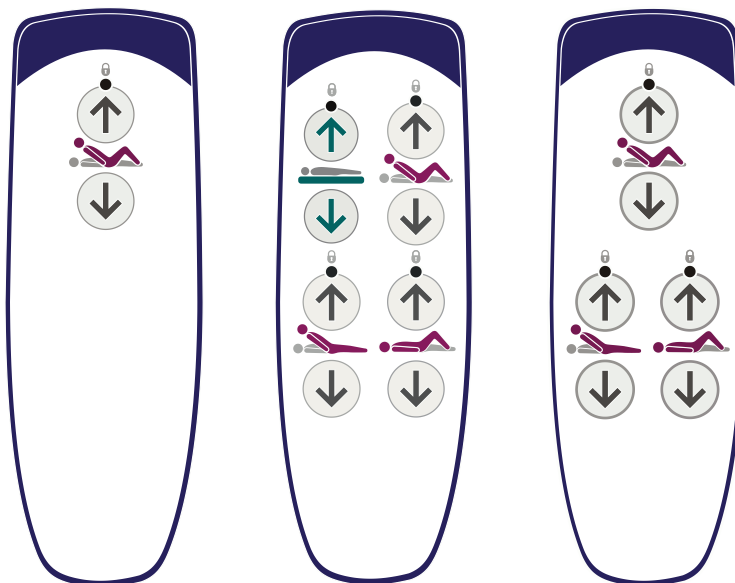

Podnoszenie/obniżanie platformy materaca.



Podnoszenie/obniżanie części udowej.



Podnoszenie/obniżanie oparcia pleców.

**Przycisk pozycji Bio-Contour** (sterowana tylko przez pacjenta) — podnoszenie oparcia pleców i części udowej.**Przycisk pozycji Bio-Contour ze strzałką do dołu** (sterowana tylko przez pacjenta) — powrót do pozycji płaskiej.