


# Enterprise 5000X

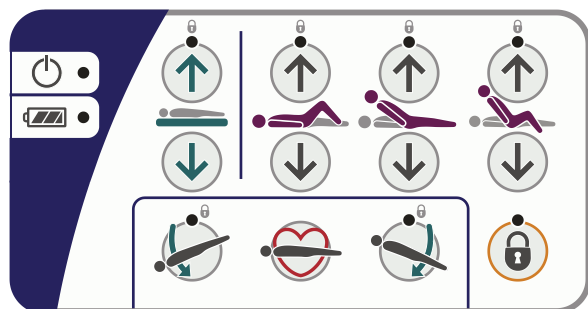

## Painel de controlo do operador (ACP)

## Comandos manuais do paciente



Indicador de ativação



Indicador LED do estado da bateria



totalmente carregada



a carregar



descarregada



**Botão RCP** - fazer o estrado do colchão ficar plano.



Baixar a cabeceira  
(Posição de Trendelenburg).



Baixar o lado dos pés  
(posição Trendelenburg invertido(a)).




**Botão de bloqueio da função** - premir o botão e depois premir o(s) botão(ões) do Painel de controlo do operador selecionado(s) para bloquear/desbloquear a função.  
Luz amarela = bloqueado



**Botão Auto-Chair para cima** - premir e manter premido para posicionar a cadeira.



**Botão Auto-Chair para baixo** - fazer o estrado do colchão voltar para uma posição plana e nivelada.

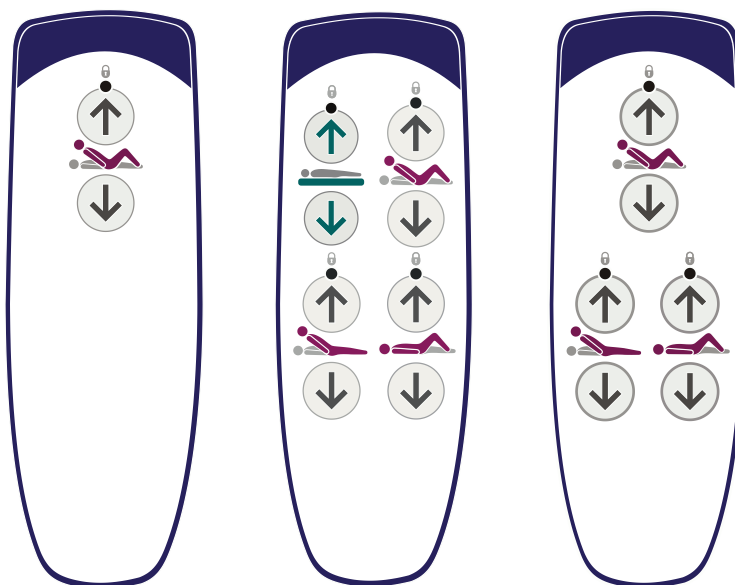

Subir/baixar o estrado do colchão.



Subir/baixar a secção da coxa.



Subir/baixar o apoio das costas.



**Botão Bio-Contour para cima**  
(apenas comando do paciente) - levantar o apoio das costas e a secção da coxa.

**Botão Bio-Contour para baixo**  
(apenas comando do paciente) - voltar para a posição plana.