


## Anwender-Steuerkonsole

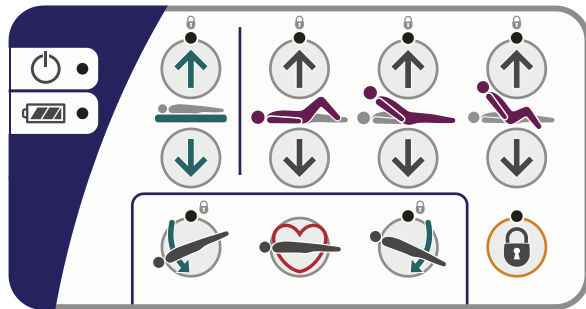

Netzkontrolllampe



LED-Akkuladezustandsanzeige



voll geladen



Ladevorgang



entladen



**CPR-Taste** – bringt die Liegefläche in eine ebene Position.



Absenken des Kopfteils (Trendelenburg-Position).



Absenken des Fußteils (Anti-Trendelenburg-Position).




**Funktionssperrtaste** – Drücken Sie die Taste und drücken Sie dann die ausgewählte(n) Taste(n) auf der Anwender-Steuerkonsole, um die Funktion zu sperren/entsperren. Gelbes Licht = gesperrt



**Taste „Auto-Chair hoch“**  
– gedrückt halten für Stuhlposition.  
**Taste „Auto-Chair runter“**  
– setzt die Liegefläche wieder in eine flache und ebene Position zurück.

## Handbedienungen für den Patienten

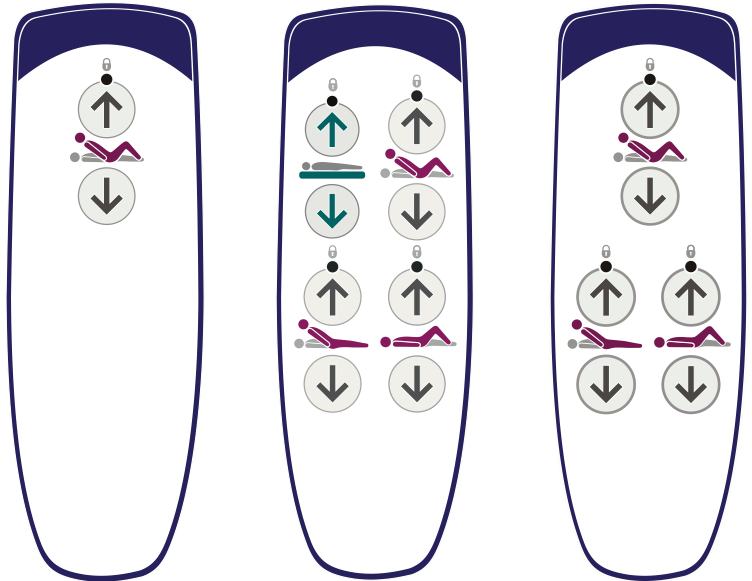

Hochstellen/Absenken der Liegefläche.



Hochstellen/Absenken des Oberschenkelsegments.



Hochstellen/Absenken der Rückenlehne.



**Taste „Bio-Contour hoch“**  
(nur Patientensteuerung)  
– Hochstellen der Rückenlehne und des Oberschenkelsegments.  
**Taste „Bio-Contour runter“**  
(nur Patientensteuerung)  
– Rückkehr zu einer ebenen Position.