







Enterprise 5000X



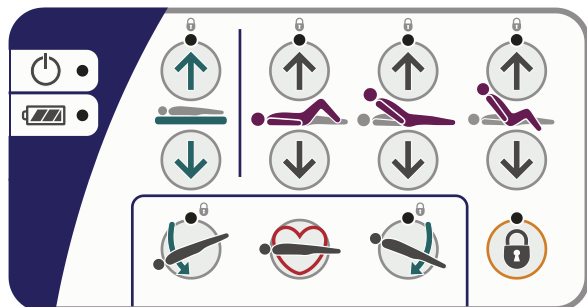

Panel de control del cuidador (PCC)





-  Indicador de energía conmutada
-  Indicador LED del estado de la batería
 -  ● carga completa
 -  ● cargando
 -  ● descargada


 **Botón de RCP:** coloca el somier en posición horizontal.

 Bajar el cabecero (posición de Trendelenburg).


 Bajar el extremo del piecero (posición anti-Trendelenburg).


 **Botón de bloqueo de funciones:** pulse el botón y, a continuación, pulse los botones del panel de control del cuidador seleccionado para bloquear/desbloquear la función. Luz amarilla = bloqueada


 **Botón de ascenso automático del asiento:** mantener pulsado para la posición de silla.


 **Botón de descenso automático del asiento:** volver a colocar el somier en una posición horizontal y nivelada.


Mandos de control del paciente

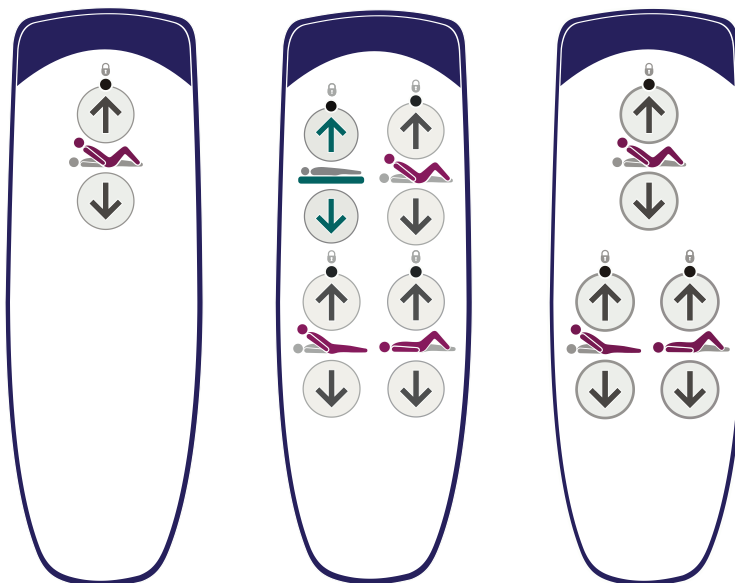


 Elevar/Descender el somier.

 Elevar/Descender la sección de los muslos.

 Elevar/Descender el respaldo.

 **Botón de ascenso de Bio-Contour** (solo para el control del paciente): elevar las secciones del respaldo y los muslos.

 **Botón de descenso de Bio-Contour** (solo para el control del paciente): volver a la posición horizontal.