


Enterprise 5000X



看護人員控制面板 (ACP)

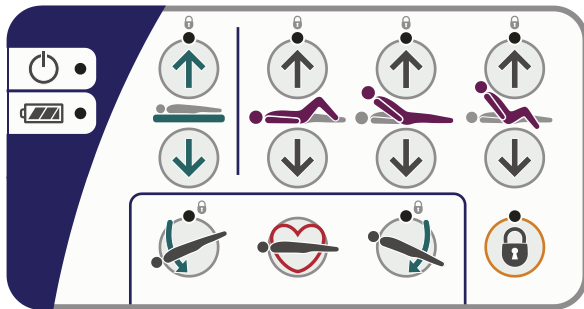

電源開啟指示燈

電池狀態 LED 指示燈

充飽電

充電中

已放電

CPR 按鈕 - 床架會展平。

降低頭部端
(頭低腳高型態)。


降低腳端
(頭高腳低型態)。

功能鎖按鈕 - 按下按鈕，然後按下選擇的看護人員控制面板按鈕，即可將功能鎖定/解鎖。
黃燈 = 鎖定

一鍵式椅位功能向上按鈕 - 按住此鈕可呈座椅型態。

一鍵式椅位功能向下按鈕 - 會讓床架變回水平平坦狀。

病患手持裝置

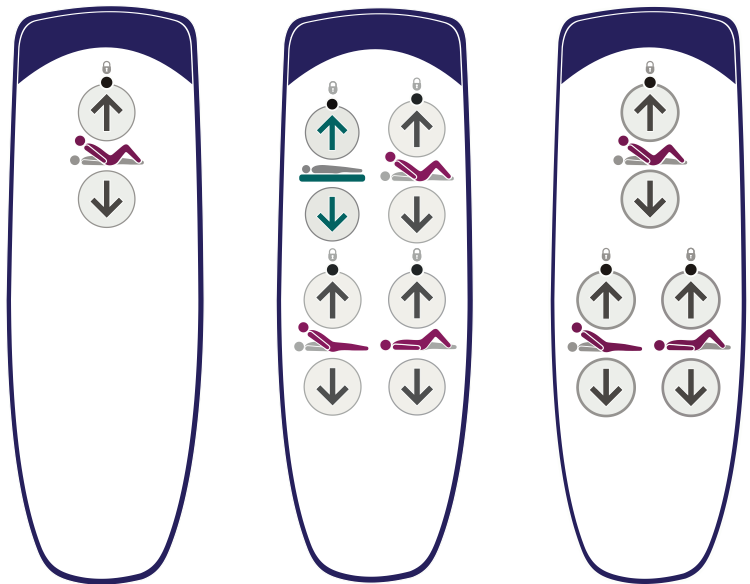

將床架升起/降低。



將大腿部分升起/降低。



將靠背升起/降低。



Bio-Contour 向上按鈕
(只由病患控制) -
將靠背與大腿部分升起。

Bio-Contour 向下按鈕
(只由病患控制) - 回到平坦位置。