


Enterprise 5000X



Panneau de commande soignant

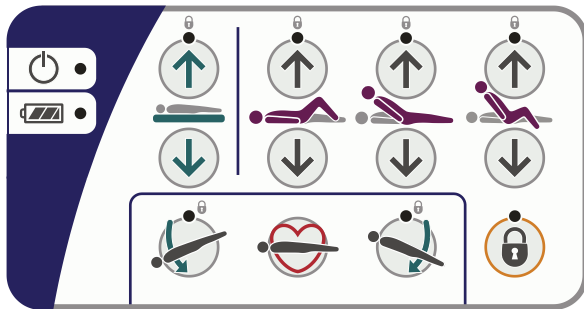

• Indicateur lumineux de mise sous tension

• Indicateur LED de l'état de la batterie

• pleine charge

• en charge

• déchargé

• **Touche CPR** - aplatir le sommier.

• Extrémité inférieure de la tête
(Position décline).


• Extrémité inférieure des pieds
(Position proclive).

• **Bouton de verrouillage des fonctions**
– appuyer sur le bouton, puis sur le(s)
bouton(s) du panneau de commande
soignant correspondant à la/aux fonction(s)
à verrouiller ou à déverrouiller.
Voyant de couleur jaune = verrouillé

• **Bouton de levage Auto-Chair**
– appuyer et maintenir enfoncé pour
atteindre la position du siège.

• **Bouton d'abaissement Auto-Chair**
– retour du sommier en position horizontale.

Télécommandes pour patient

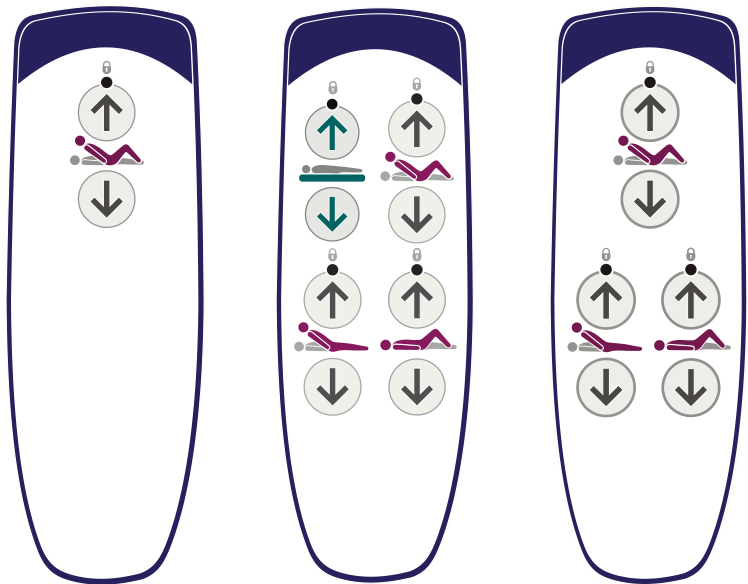

• Lever/abaisser le sommier.

• Lever/abaisser la section cuisses.

• Lever/abaisser le dossier.

• **Bouton de levage Bio-Contour**
(contrôle patient uniquement)
– lever les sections dossier et cuisses.

• **Bouton d'abaissement Bio-Contour**
(contrôle patient uniquement)
– retour à la position horizontale.