



Enterprise 8000X




Refakatçi Kontrol Paneli (RKP)

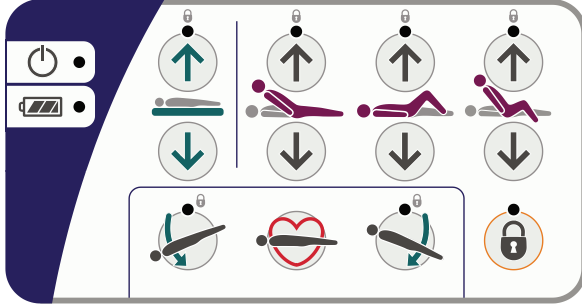


Sağlık Personeli Kontrolleri

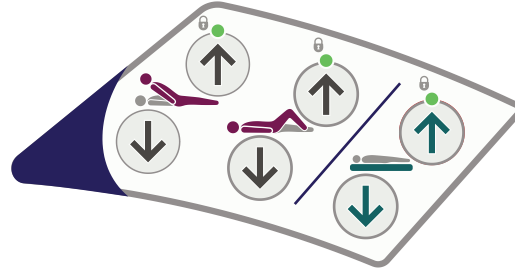

Hasta El Kontrolü (örnek)

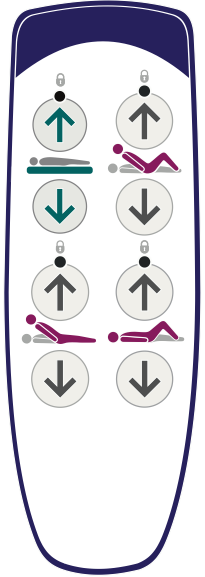

Hasta Kontrolleri

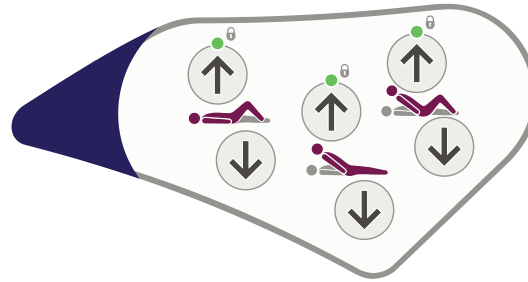

Güç Açık Göstergesi



Batarya Durumu LED göstergesi



şarj tam dolu



şarj oluyor



şarjı bitmiş

**CPR düğmesi** - Yatak platformunu düzleştirir.Baş ucunu aşağı indirir
(Trendelenburg konumu).Ayak ucunu aşağı indirir
(ters Trendelenburg konumu).**Fonksiyon Kilidi düğmesi** - Düğmeye basın, ardından fonksiyonu kilitlemek/fonksiyonun kilidini açmak için seçilen Refakatçi Kontrol Paneli düğmesine/düğmelerine basın. Sarı ışık = kilitli**Otomatik sandalye kaldırma düğmesi** - Sandalye pozisyonu için basılı tutun.**Otomatik sandalye indirme düğmesi** - Yatak platformunu düz ve yere paralel pozisyona döndürür.

Yatak platformunu yükseltir/alçaltır.



Uyluk bölümünü yükseltir/alçaltır.



Sırt desteğini yükseltir/alçaltır.

**Bio-Contour yükseltme düğmesi** (yalnızca hasta kontrolü) - Sırt desteğini ve uyluk bölümünü yükseltin.**Bio-Contour alçaltma düğmesi** (yalnızca hasta kontrolü) - Düz pozisyona döndürür.