

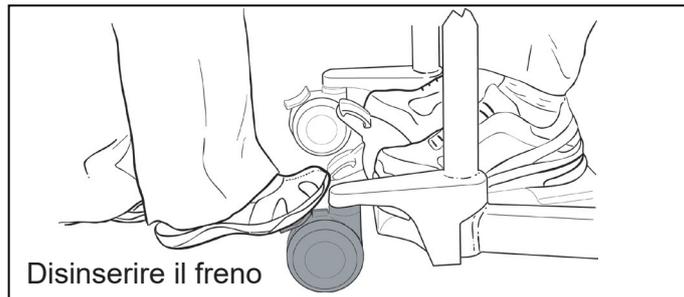
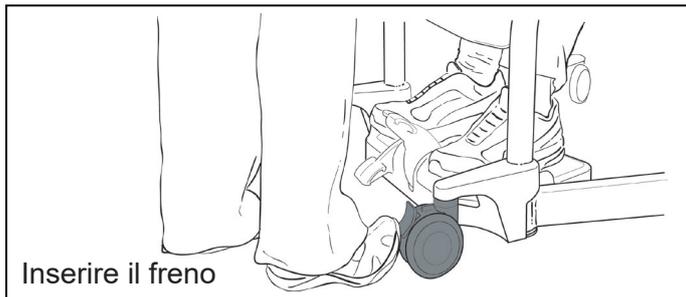


Inserire e disinserire il freno

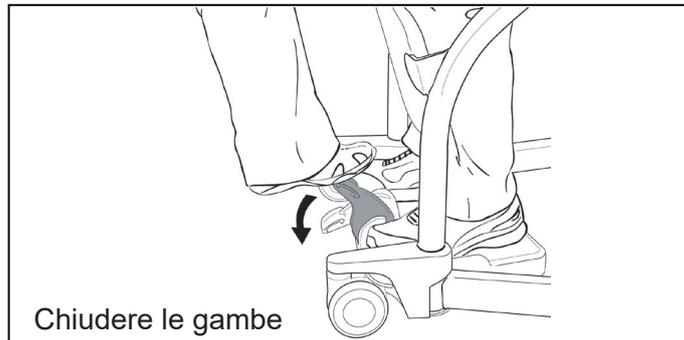



Aprire e chiudere le gambe

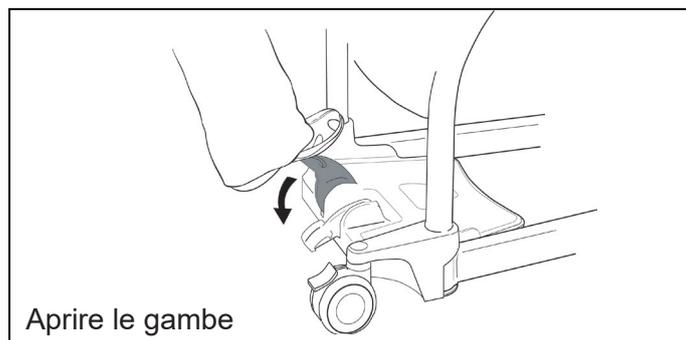

Cuscini orientabili



Pomelli attacco corsetti

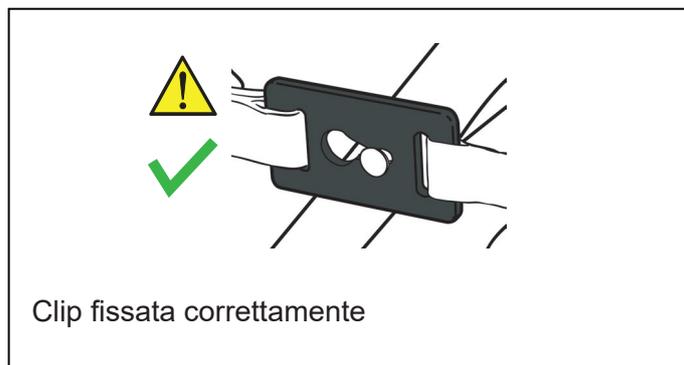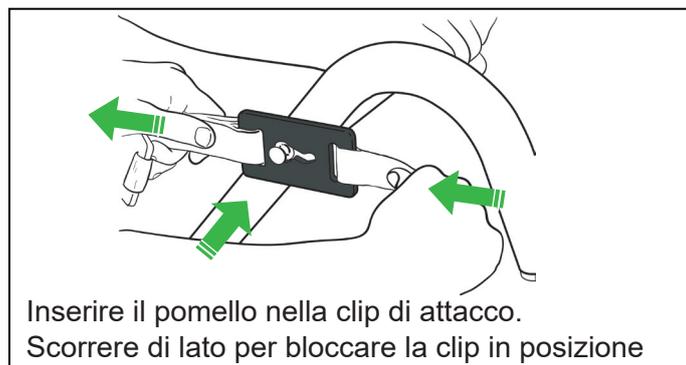

Pulizia e disinfezione

Pulire con un panno inumidito e una soluzione di acqua tiepida e detergente disinfettante.

Possono essere utilizzate salviettine disinfettanti, imbevute di una soluzione a base di alcol isopropilico al 70%.

Quando si utilizzano le salviettine, strofinare il sollevapazienti con forza.

Non usare solventi a base di fenolo, cloro o tali da poter danneggiare le finiture.