





Sara Stedy / Sara Stedy Compact

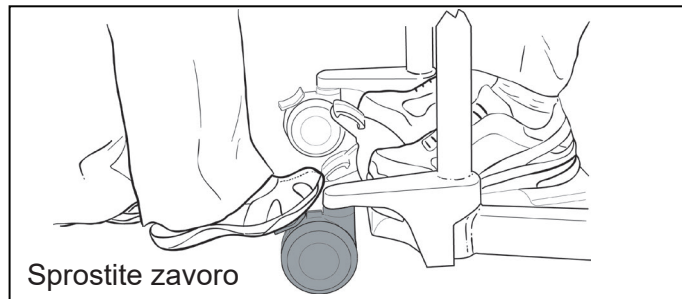



Aktiviranje in sproščanje zavore

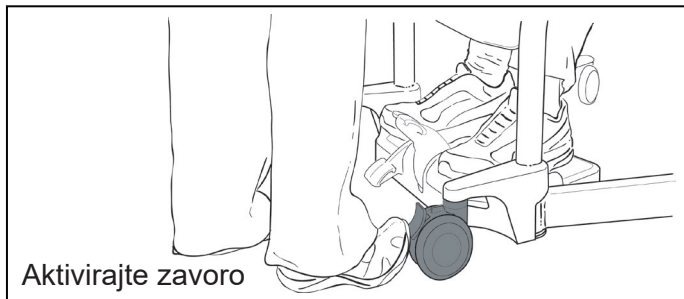



Odpiranje in zapiranje nog

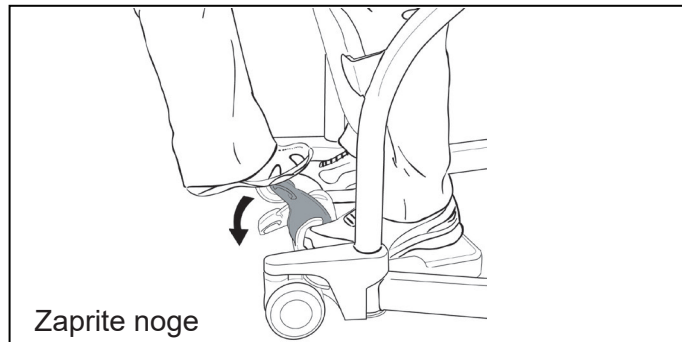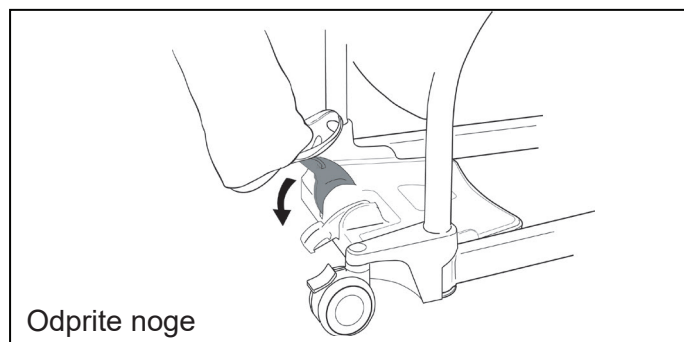

Vrtenje blazin

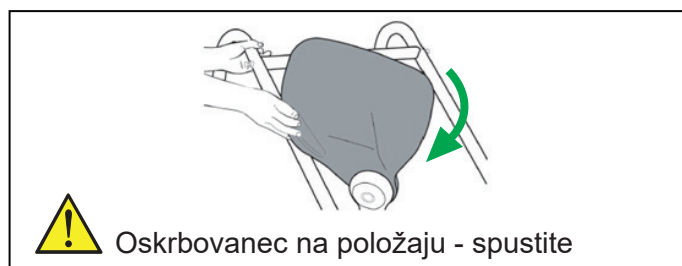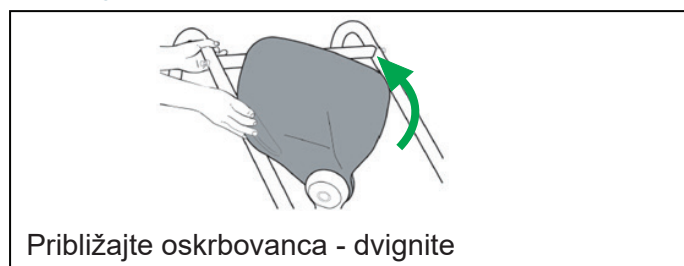

Tečaji za pritrditev vreče

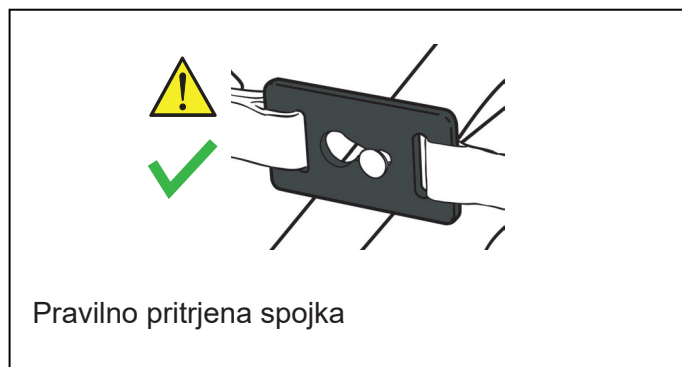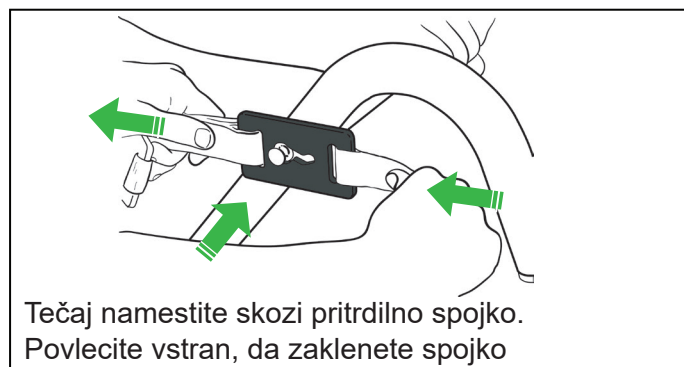

Čiščenje in razkuževanje

Pripomoček očistite s krpo, navlaženo s toplo vodo in razkužilnim sredstvom.

Uporabite lahko tudi razkužilne krpe, prepojene s 70-odstotno raztopino izopropilnega alkohola.

Dvigalo močno zdrgnite s krpami.

Ne uporabljajte topil na osnovi fenola, klora ali podobnih drugih topil, ki lahko poškodujejo površino.

