



Enterprise 9000X





アテンダントコントロールパネル (ACP)

介助者用コントロール類

患者用ハンドセット

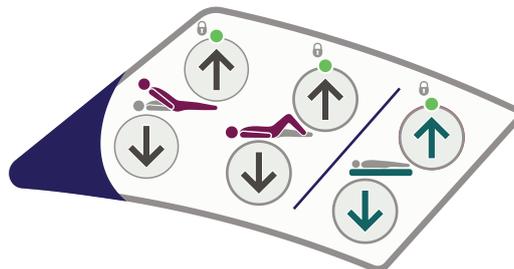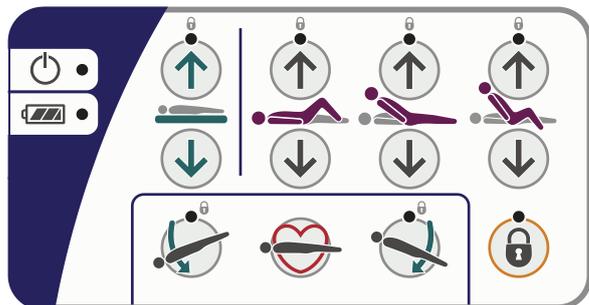

患者用コントロール類

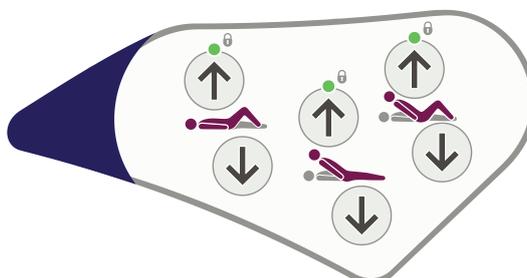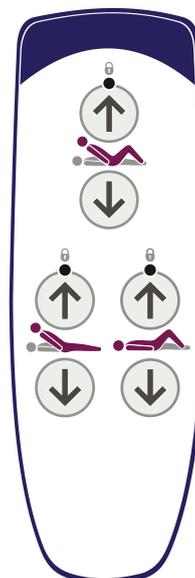

電源オンインジケータ



バッテリーステータスLEDインジケータ



完全に充電されています



充電中



放電しています



CPRボタン - マットレスのプラットフォームを平らにします。



下部ヘッドエンド (低頭位傾斜(トレンデレンブルグ)姿勢)。



下部フットエンド (逆低頭位傾斜(逆トレンデレンブルグ)姿勢)。



機能ロックボタン - ボタンを押してから、選択したアテンダントコントロールパネルのボタンを押して、機能をロック/ロック解除します。黄色ランプ = ロックされている状態



オートチェア上昇ボタン - 押し続けると椅子の位置になります。



オートチェア下降ボタン - マットレスプラットフォームは水平位置に戻ります。



マットレスプラットフォームを上昇/下降させます。



大腿部セクションの上昇/下降。



背もたれを上昇/下降させます。




Bio-Contour上昇ボタン (患者によるコントロールのみ) - 背もたれと大腿部セクションを上昇させます。



Bio-Contour下降ボタン (患者によるコントロールのみ) - フラット位置に戻ります。

患者体重測定とVariZone動き検出コントロール

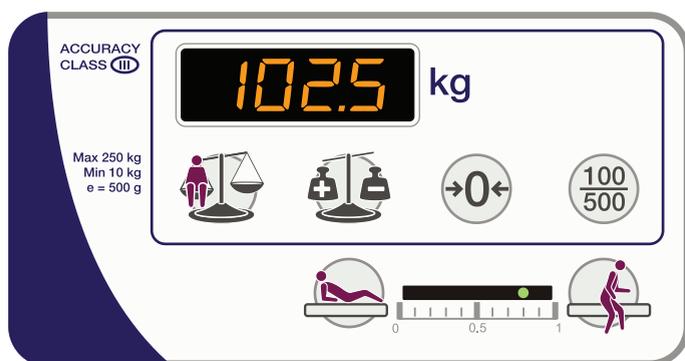

体重 — 患者の体重を計算・表示します。



自動補正 — 表示された患者の体重に影響を与えずに、項目を追加または削除できます。



ゼロ — 計量システムをリセットします。



体重表示を選択 — 患者の体重を、最も近い100 gまたは500 gに四捨五入します。



ベッド内 — 患者の動き検出を有効/無効にして、システムの感度を上げることができます。



患者の動き検出閾値表示 — インジケータにより、現在のシステム状態と患者の動き検出の感度が表示されます。



Egress — 患者の動き検出を有効/無効にし、システムの感度を下げることができます。