



Enterprise 9000X




שלט ידני למטופל

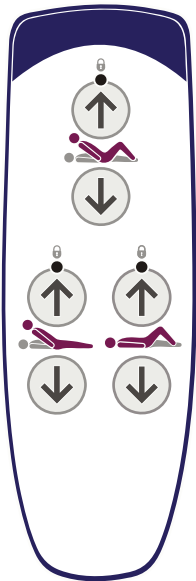


בקרות למטפל

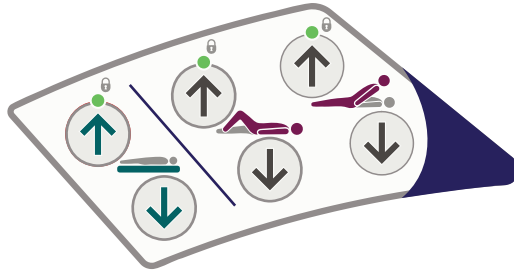

בקרות למטופל

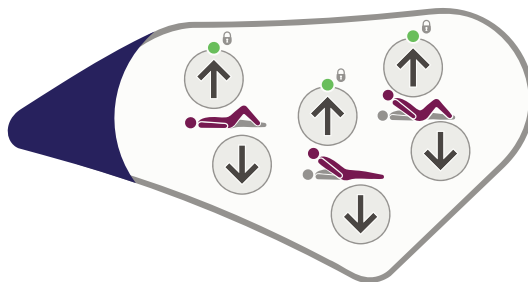

לוח בקרה למטפל (ACP)

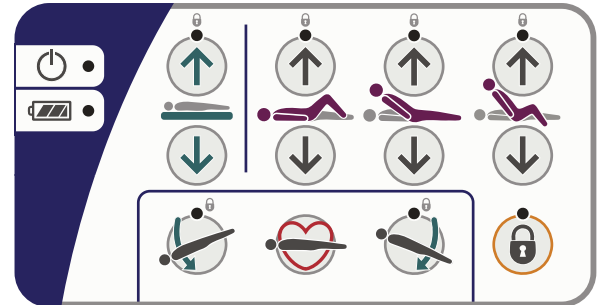

מחווני הפעלה

מחווני LED של מצב סוללה

טעונה במלואה

נטענת

התרוקנה

לחצן החייאה (CPR) - מחזיר את פלטפורמת המזרן למצב שטוח.

הנמכת קצה הראש (תנוחת טרנדלנבורג).

הנמכת קצה הרגליים (תנוחת טרנדלנבורג הפוכה).

לחצן נעילת פונקציות - לחץ על הלחצן ולאחר מכן לחץ על לחצני לוח הבקרה הנבחרים של המטפל כדי לנעול/לבטל נעילה של פונקציה. נורית צהובה = נעול

לחצן הרמת כיסא אוטומטי - לחץ והחזק עבור תנוחת כיסא.

לחצן הורדת כיסא אוטומטי - החזר את פלטפורמת המזרן לתנוחה שטוחה ומאוזנת.


הגבה/הנמך את פלטפורמת המזרן.

הגבה/הנמך את מקטע הירך.

הגבה/הנמך את משענת הגב.

לחצן הרמת Bio-Contour (בקרה למטופל בלבד) - הגבה את משענת הגב ואת מקטע הירך.

לחצן הורדת Bio-Contour (בקרה למטופל בלבד) - חזור לתנוחה שטוחה.

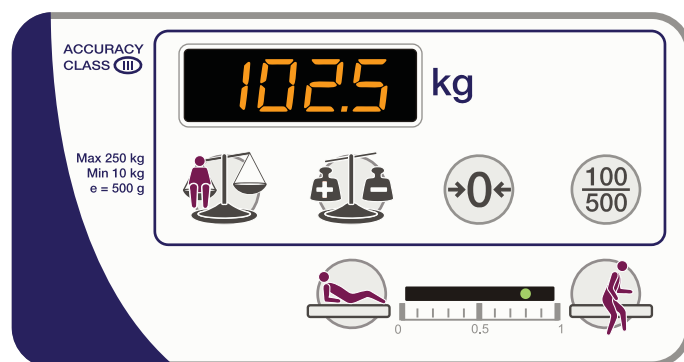

משקל - חשב והצג את משקל המטופל.



פיצוי אוטומטי - מאפשר הוספה או הסרה של פריטים מבלי להשפיע על משקל המטופל המצוין.



אפס - אפס מערכת שקילה.



בחר תצוגת משקל - מעגל את משקל המטופל ל-100 הגרם או 500 הגרם הקרובים ביותר.



במיטה - הפעל/השבת את זיהוי תנועת המטופל והגבר את רגישות המערכת.



תצוגת סף זיהוי של תנועת מטופל - מחוון המראה את מצב המערכת הנוכחי ואת הרגישות שנבחרה עבור זיהוי תנועת המטופל.



יציאה - הפעל/השבת את זיהוי תנועת המטופל והחלש את רגישות המערכת.

