


Enterprise 9000X

Anwender-Steuerkonsole

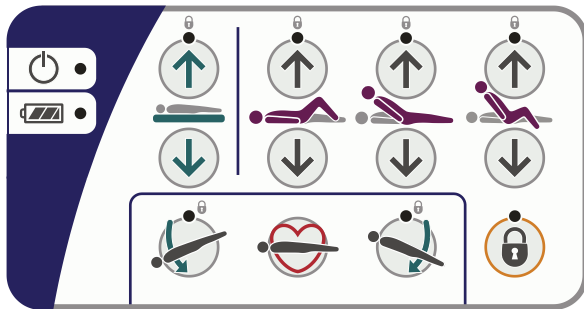

Netzkontrolllampe



LED-Akkuladezustandsanzeige



voll geladen



Ladevorgang



entladen



CPR-Taste – bringt die Liegefläche in eine ebene Position.



Absenken des Kopfteils (Trendelenburg-Position).



Absenken des Fußteils (Anti-Trendelenburg-Position).




Funktionssperrtaste – Drücken Sie die Taste und drücken Sie dann die ausgewählte(n) Taste(n) auf der Anwender-Steuerkonsole, um die Funktion zu sperren/entsperren. Gelbes Licht = gesperrt




Taste „Auto-Chair hoch“
– gedrückt halten für Stuhlposition.
Taste „Auto-Chair runter“
– setzt die Liegefläche wieder in eine flache und ebene Position zurück.


Bedienelemente für Pflegekraft

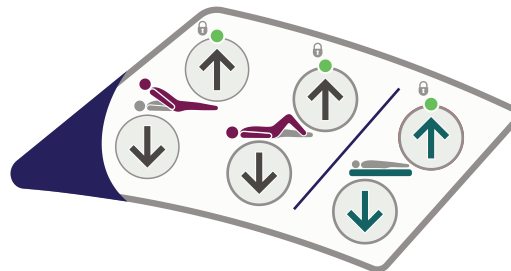

Fernbedienung für Patienten

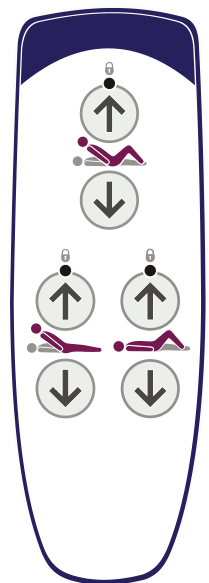

Patienten-Bedienfelder

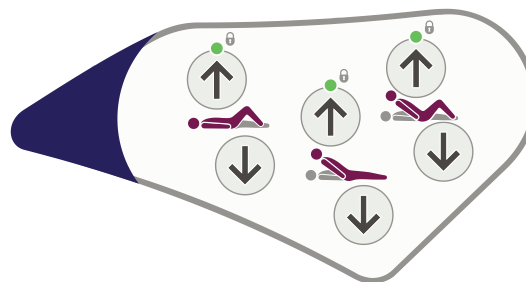

Hochstellen/Absenken der Liegefläche.



Hochstellen/Absenken des Oberschenkelsegments.




Hochstellen/Absenken der Rückenlehne.



Taste „Bio-Contour hoch“
(nur Patientensteuerung)
– Hochstellen der Rückenlehne und des Oberschenkelsegments.
Taste „Bio-Contour runter“
(nur Patientensteuerung)
– Rückkehr zu einer ebenen Position.

Kontrollanzeigen für das Wiegen des Patienten und die VariZone Patientenerfassung

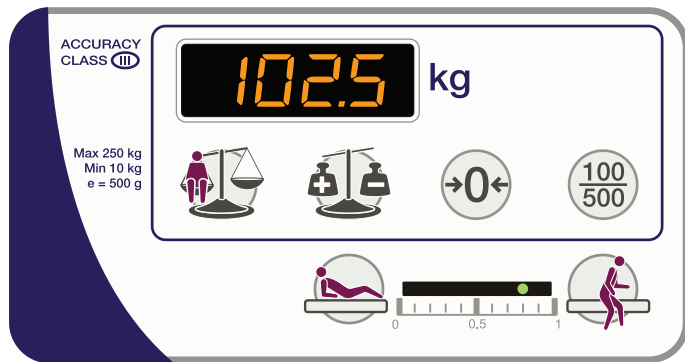

Wiegen – Patientengewicht berechnen und anzeigen.



Autokompensation – ermöglicht das Hinzufügen oder Entfernen von Gegenständen ohne Beeinflussung des angegebenen Patientengewichts.




Null – Zurückstellen der Wiegeeinheit.



Gewichtsanzeigenauswahl – Abrunden des Patientengewichts auf den nächsten 100-g- bzw. 500-g-Wert.



Im Bett – Aktivieren/Deaktivieren der Patientenerfassung und Erhöhen der Empfindlichkeit des Systems.

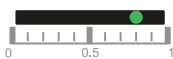

Schwellenwert der Patientenerfassung – Eine LED zeigt den aktuellen Systemstatus und die ausgewählte Empfindlichkeit der Patientenerfassung an.



Ausstieg – Aktivieren/Deaktivieren der Patientenerfassung und Verringern der Empfindlichkeit des Systems.

