



Otpuštanje oslonca za leđa u slučaju KPR-a

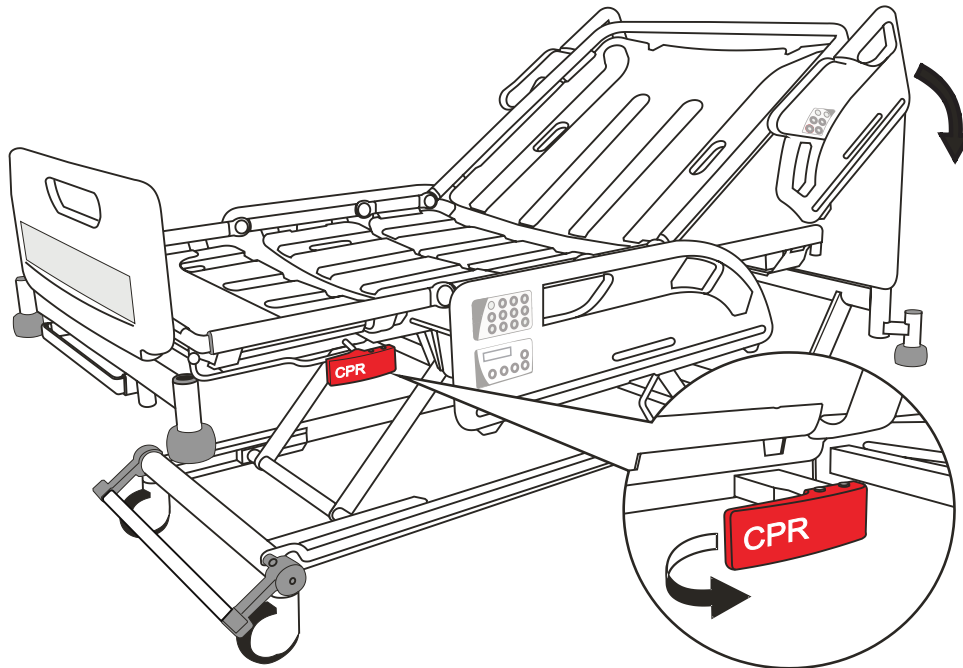


Povucite crvenu ručku za KPR koja se nalazi sa svake strane kreveta da biste brzo spustili oslonac za leđa.

Kočnice i upravljanje

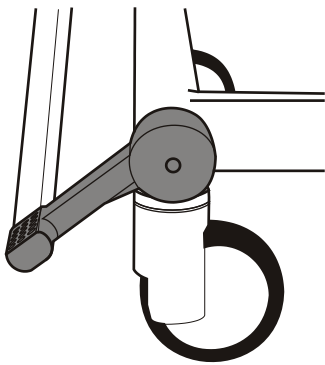


Kočnica

Kočnice se primjenjuju na sva četiri kotača.

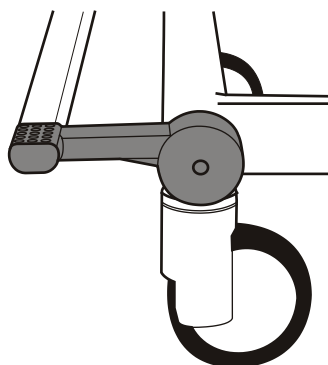

Slobodno

Sva četiri kotača mogu se slobodno rotirati i okretati oko osi.

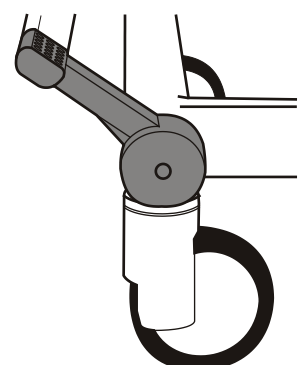


Upravljanje

Sva četiri kotača mogu se rotirati, kotač za upravljanje ne može se okretati oko svoje osi.

Kočnice trebaju biti pritisnute uvijek kada je krevet na mjestu.

Bočne šine

1

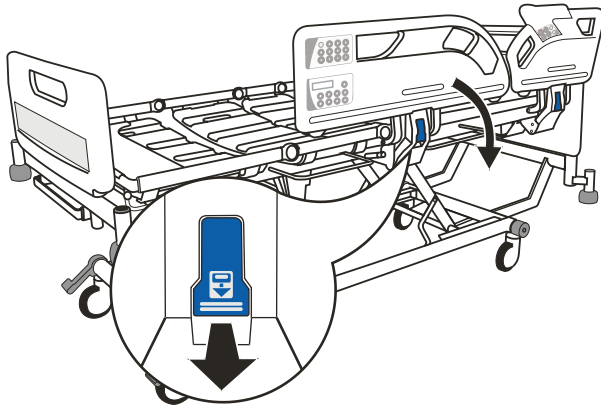


Povucite plavu šipku za otpuštanje da biste spustili bočnu ogradu.

2




Provjerite jesu li bočne ograde sigurno zaključane kada se nalaze u podignutom položaju.

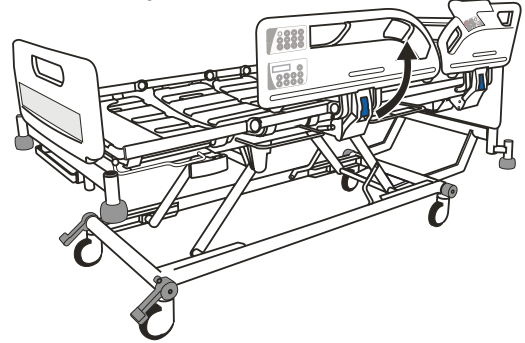

Bočnu ogradu podignite tako da uhvatite ručku bočne ograde i povučete je prema gore i dalje od kreveta dok se ne zaključa u povišenom položaju.


Podešavanje duljine kreveta (tri položaja namještanja)

1

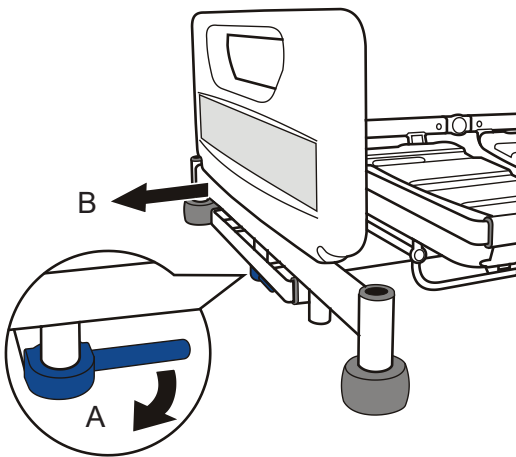

Povucite plavu ručku za zaključavanje produženog dijela kreveta (A). Izvucite okvir kreveta (B) u željeni položaj i otpustite ručku.


2

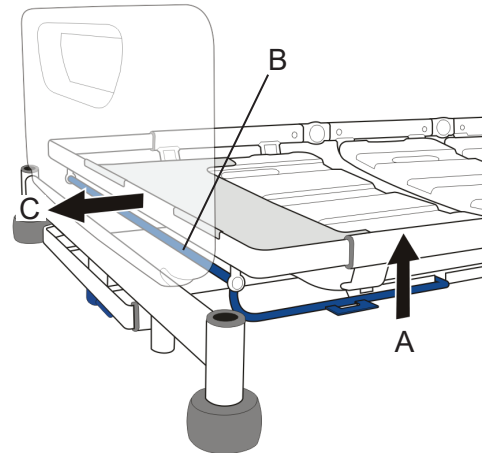

Podignite plavu šipku za produživanje (A) i držite sredinu poprečne prečke (B), a zatim povucite platformu za madrac u položaj (C).


Podešavanje odjeljka za listove

1

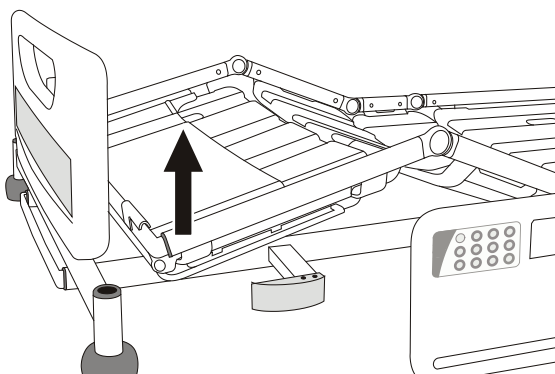

Uхватite stranu okvira odjeljka za listove i podignite odjeljak za listove.

2

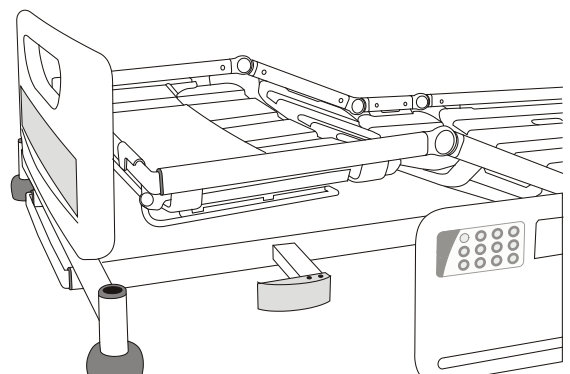

Podižite ga dok se ne zaključa u vodoravnom položaju.