



## CPR背もたれ解除

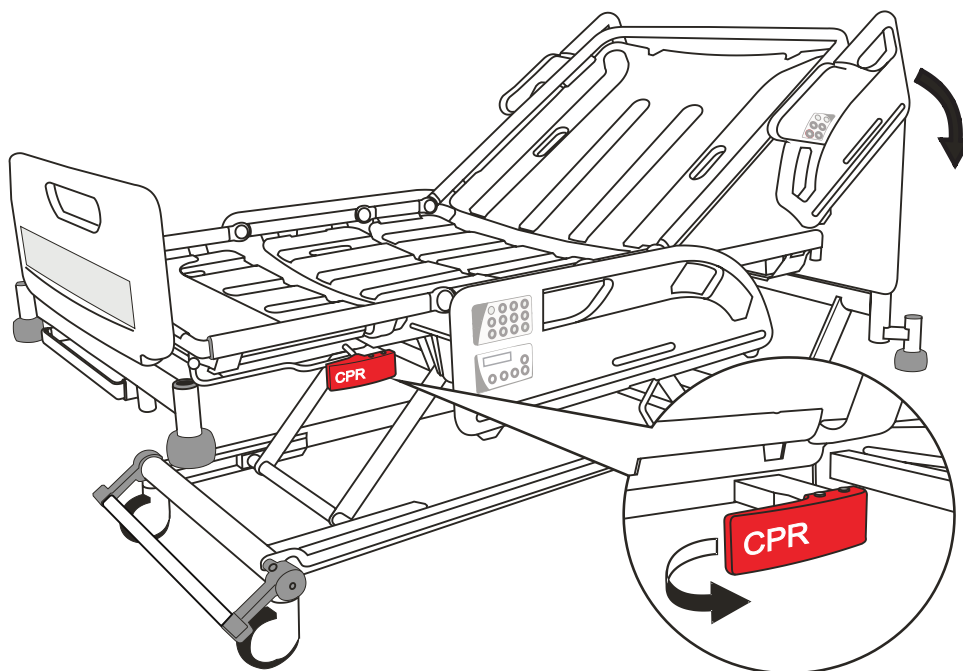


背もたれを素早く下降させるには、ベッドの側面にある赤のCPR（心肺機能蘇生）ハンドルを引きます。

## ブレーキとステアリング

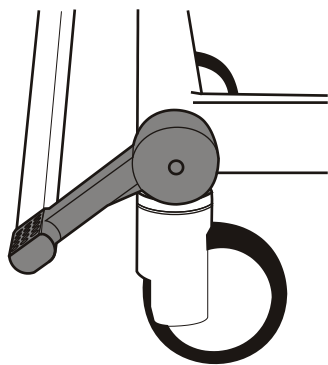


### ブレーキ

ブレーキは4つのキャスターすべてにかけられます。

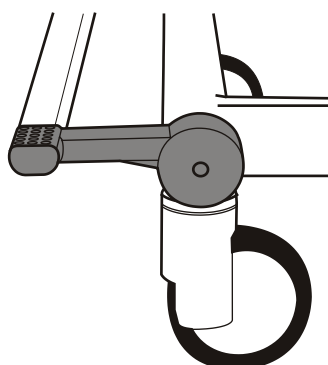

### フリー

4つのキャスターはすべて自由に回転および旋回が可能です。

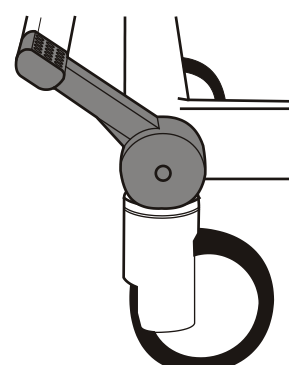


### ステア

4つのキャスターはすべて回転可能で、ステアリングキャスターは旋回できません。

ベッドを固定する際は必ずブレーキを使用するようにしてください。

## サイドレール

1

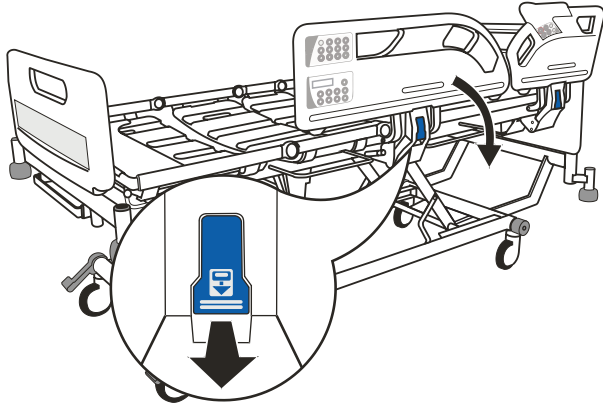


サイドレールを下降させるには、青のリリースレバーを引いてください。

2




サイドレールが上昇位置にあるとき、それがしっかりとロックされていることを確認してください。

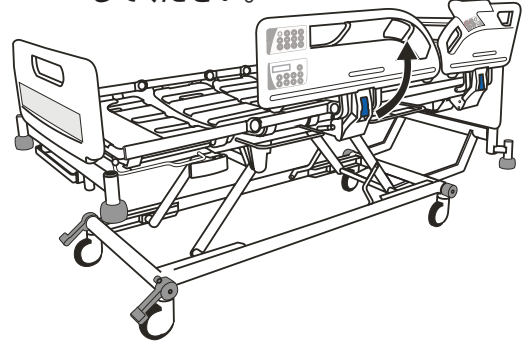

サイドレールを上昇させるには、サイドレールハンドルをつかみ、上昇位置でロックするまでベッドからサイドレールを引き上げます。


## ベッド長調整 (3つの設定位置)

1

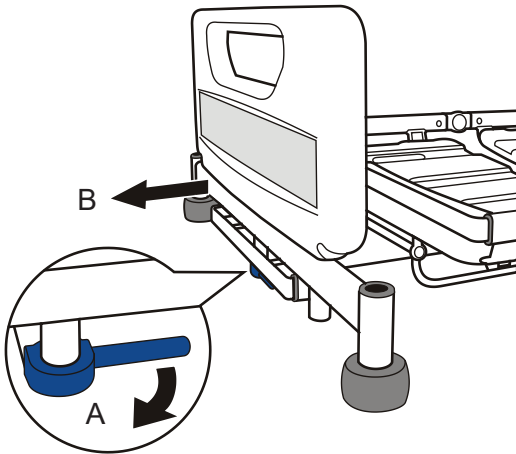

青い伸長ロックハンドル (A)を引きます。ベッドフレーム (B)を希望する位置まで引き出して、ハンドルを戻します。


2

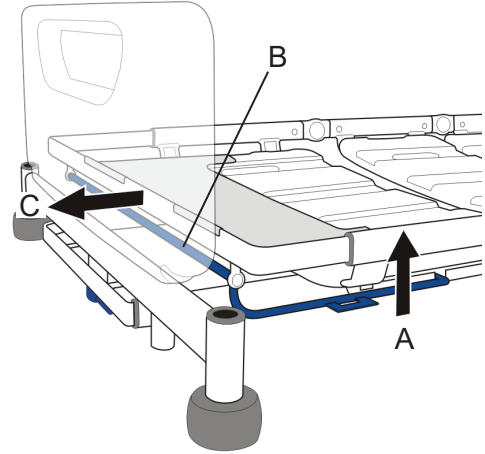

青の拡張留め具バー (A)を持ち上げて、クロスバー (B)の中央を持ち、位置 (C)までマットレスプラットフォームを引き出します。


## 下腿部セクションの調整

1

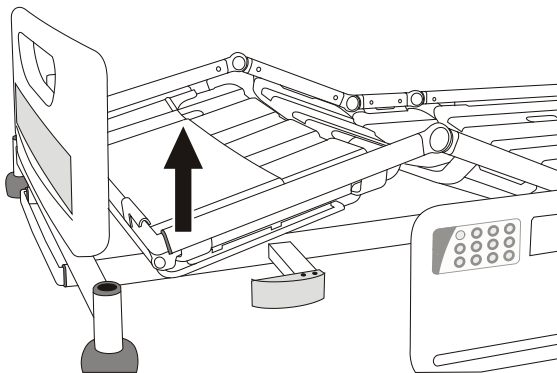

下腿部セクションフレームの側面を持ち、下腿部セクションを上を持ち上げます。

2

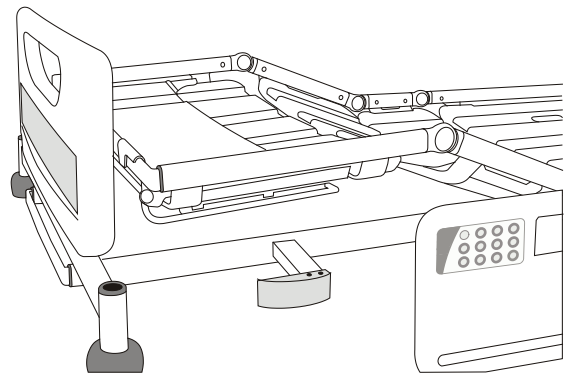

水平位置でラッチするまで持ち上げます。