

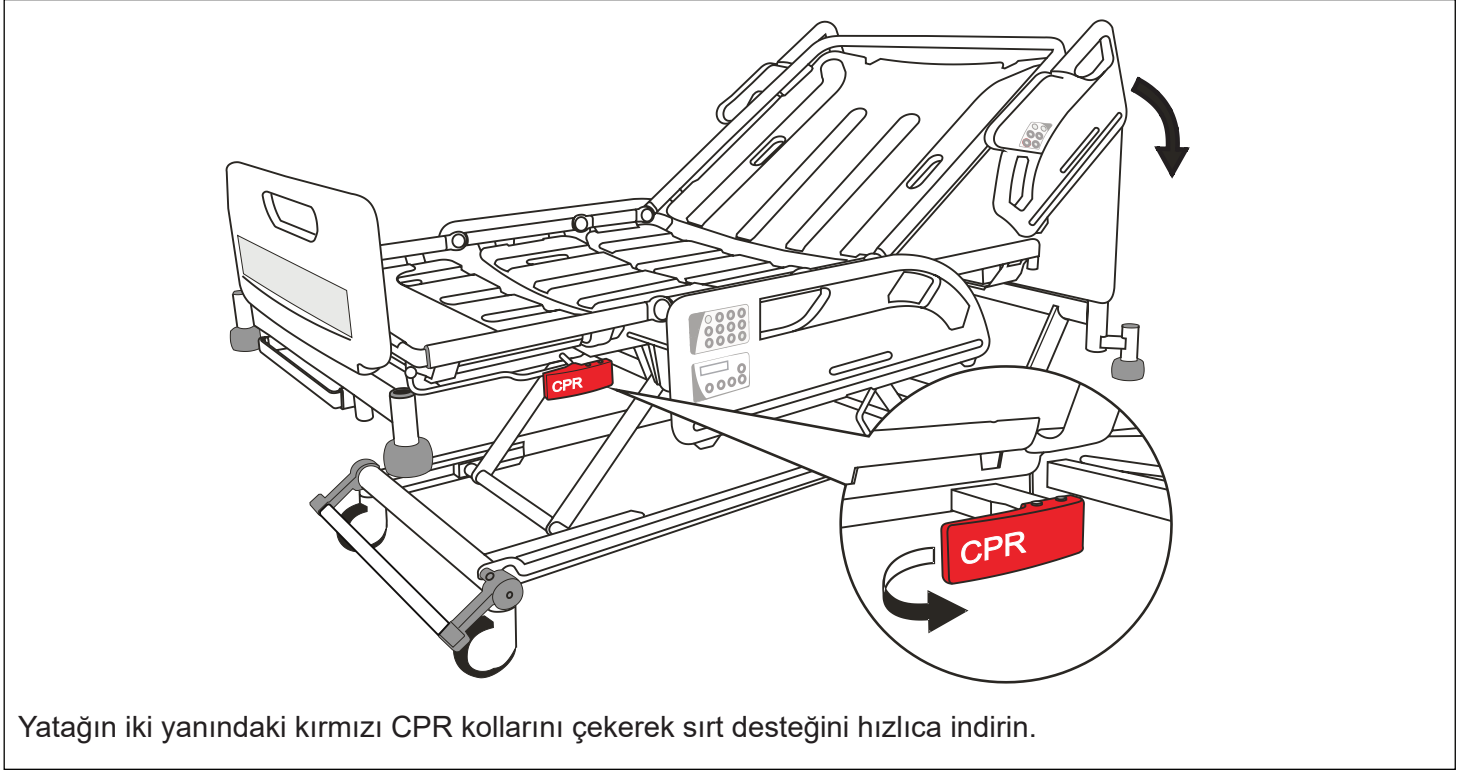
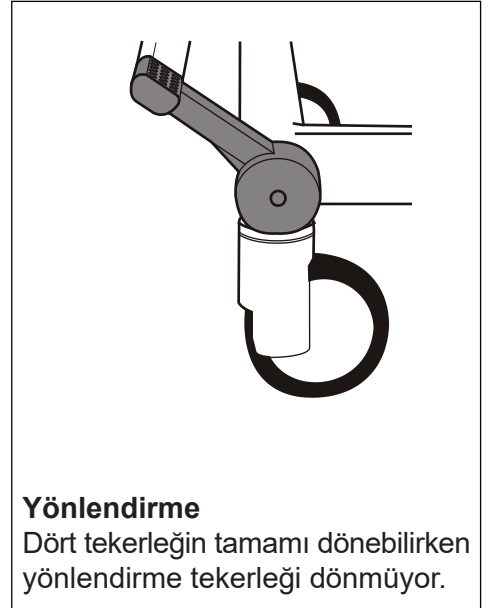


CPR sırt desteği bırakma kolu

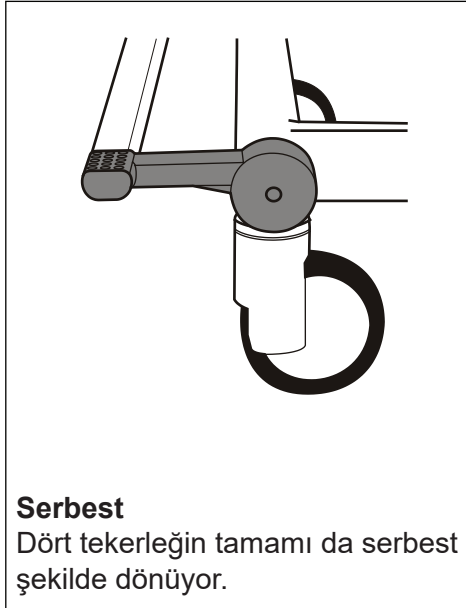


Frenler ve yönlendirme

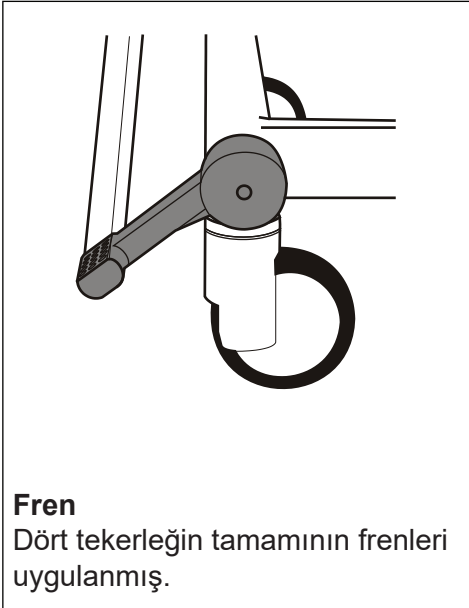

Yatak sabitken frenler daima uygulanmış olmalıdır.

Kenar korkulukları

1

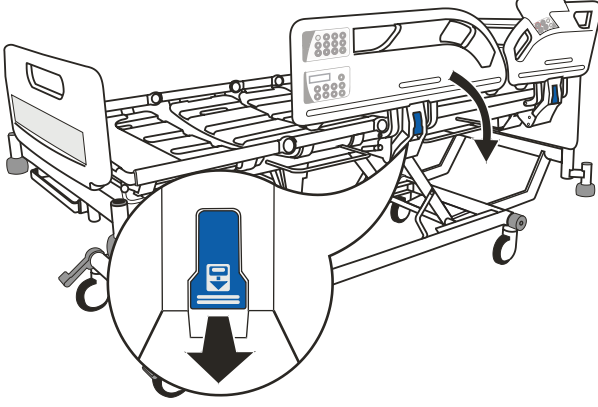


Mavi renkli açma kolunu çekerek kenar korkuluğunu aşağı indirin.

2




Kenar korkuluğunun kalkık konumda kilitli olduğundan emin olun.

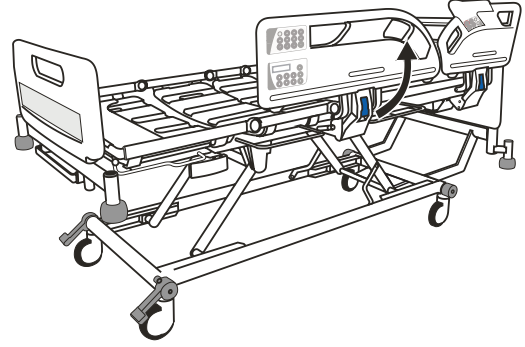

Kenar korkuluğunu kaldırmak için korkuluğun kolunu tutun ve kenar korkuluğunu yukarı konumda kilitlenene kadar yukarı ve yatağın dışına doğru çekin.


Yatak boyunu ayarlama (üç ayar konumu)

1

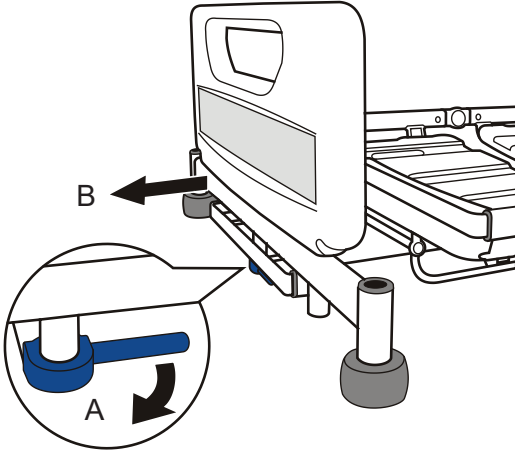

Mavi uzatma kilitleme kolunu (A) çekin. Yatak profilini (B), istenilen konuma çekin ve kolu bırakın.


2

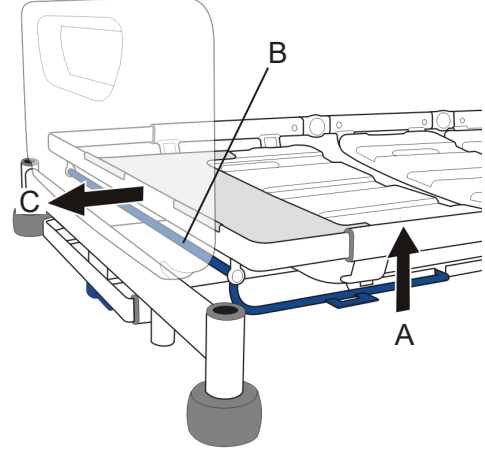

Mavi uzatma çubuğunu (A) kaldırın ve enine çubuğun (B) ortasından tutarak yatak platformunu (C) pozisyonuna çekin.


Baldır kısmını ayarlama

1

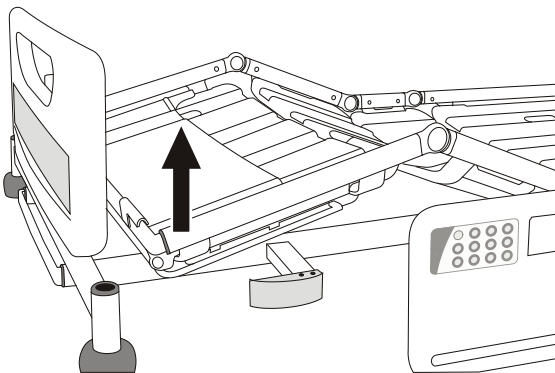

Baldır kısmı profilinin yan tarafını tutun ve baldır kısmını yukarı kaldırın.

2

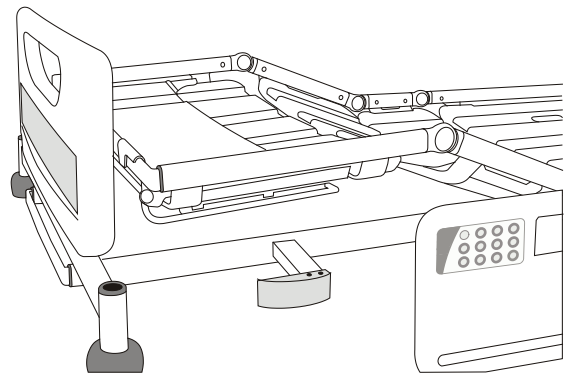

Yatay konuma kilitlenene kadar kaldırın.