



## Uvoľnenie páky chrbtovej opierky pre CPR

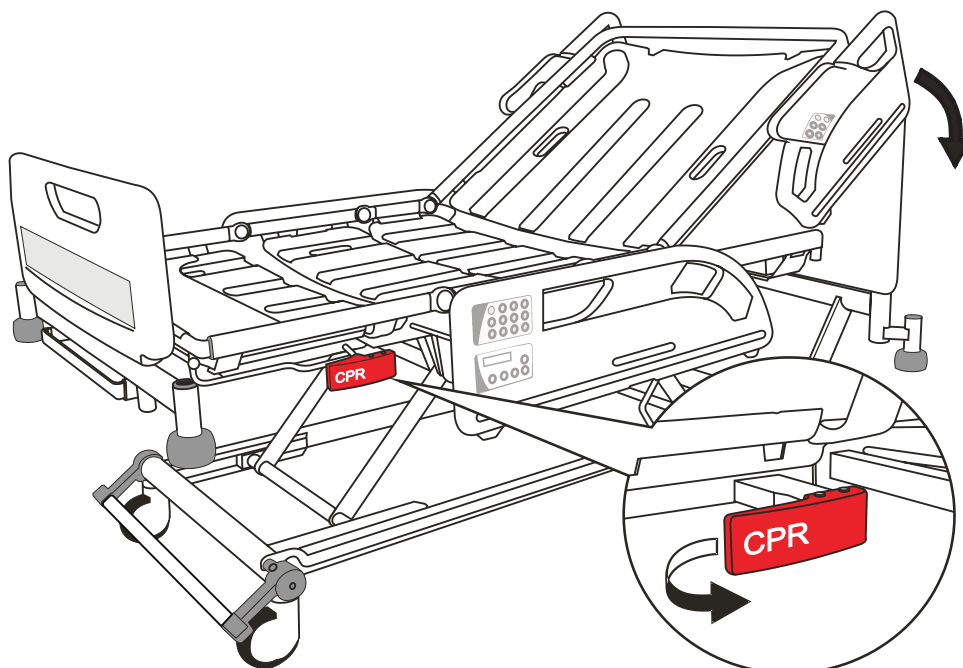


Na rýchle spustenie chrbtovej opierky potiahnite červenú CPR rukoväť, ktorá sa nachádza na oboch stranách lôžka.

## Brzdy a riadenie

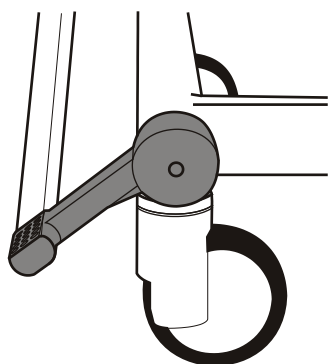


### Brzda

Všetky štyri kolieska sú zabrzdené.

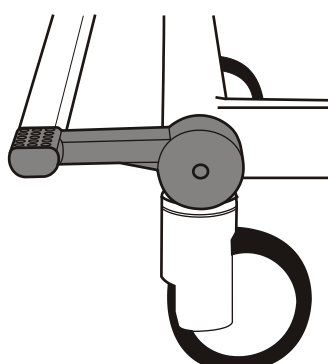

### Voľné

Všetky štyri kolieska môžu voľne rotovať a otáčať sa.

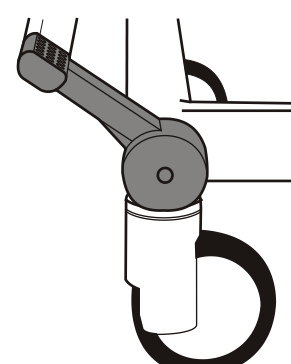


### Riadenie

Všetky štyri kolieska môžu rotovať, riadiace koliesko sa nemôže otáčať.

Brzdy musia byť použité vždy, keď je lôžko stacionárne.

## Postrannice

1

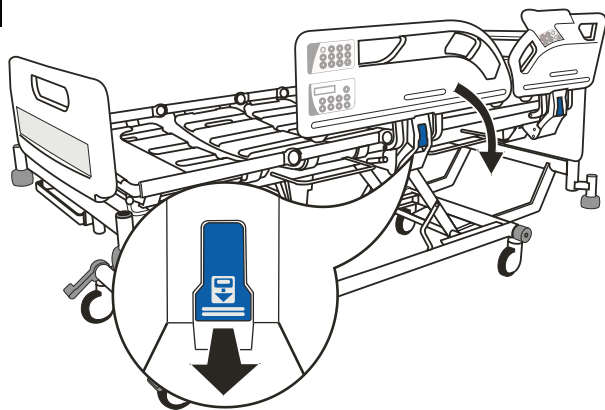


Na spustenie postrannice potiahnite modrú uvoľňovaciu páku.

2




Uistite sa, že je postrannica vo zdvihnutej polohe bezpečne zaistená.

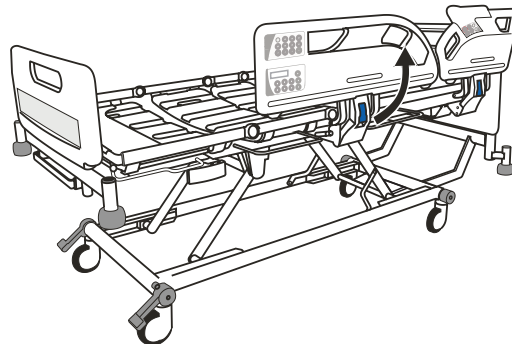

Na zdvihnutie postrannice uchopte rukoväť postrannice a postrannicu potiahnite nahor smerom od lôžka, kým sa nezaistí vo zdvihnutej polohe.


## Nastavenie dĺžky lôžka (tri dostupné polohy)

1

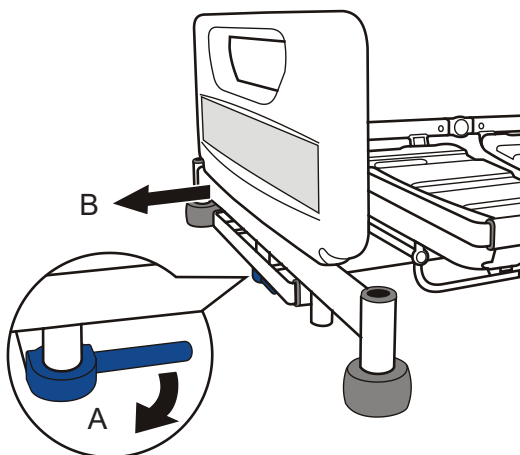

Potiahnite modrú rukoväť na zaistenie predĺženia (A). Vytiahnite rám lôžka (B) do požadovanej polohy a pustite rukoväť.


2

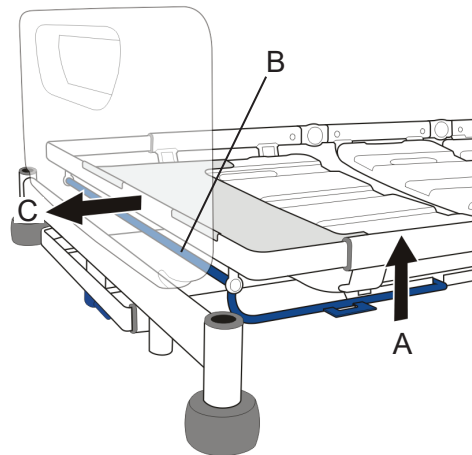

Zdvihnute modrú tyč na zaistenie predĺženia (A) a podržte stred priečnej tyčky (B), potom potiahnite ložnú plochu matraca do požadovanej polohy (C).


## Nastavenie lýtkovej časti

1

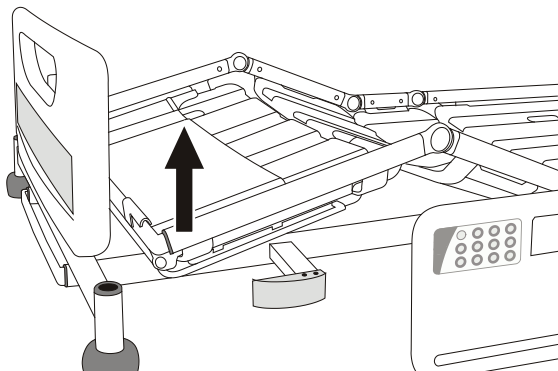

Podržte stranu lýtkovej časti rámu a manuálne zdvíhajte lýtkovú časť nahor.

2

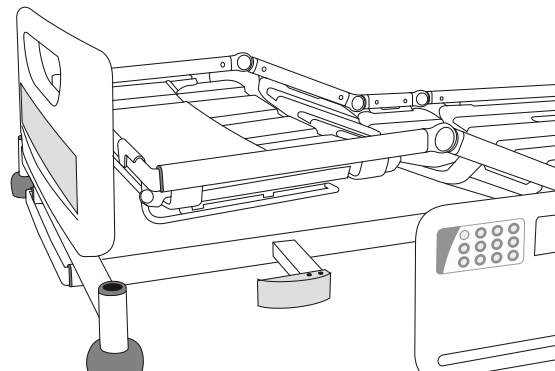

Zdvíhajte, kým sa nezachytí v horizontálnej polohe.

