

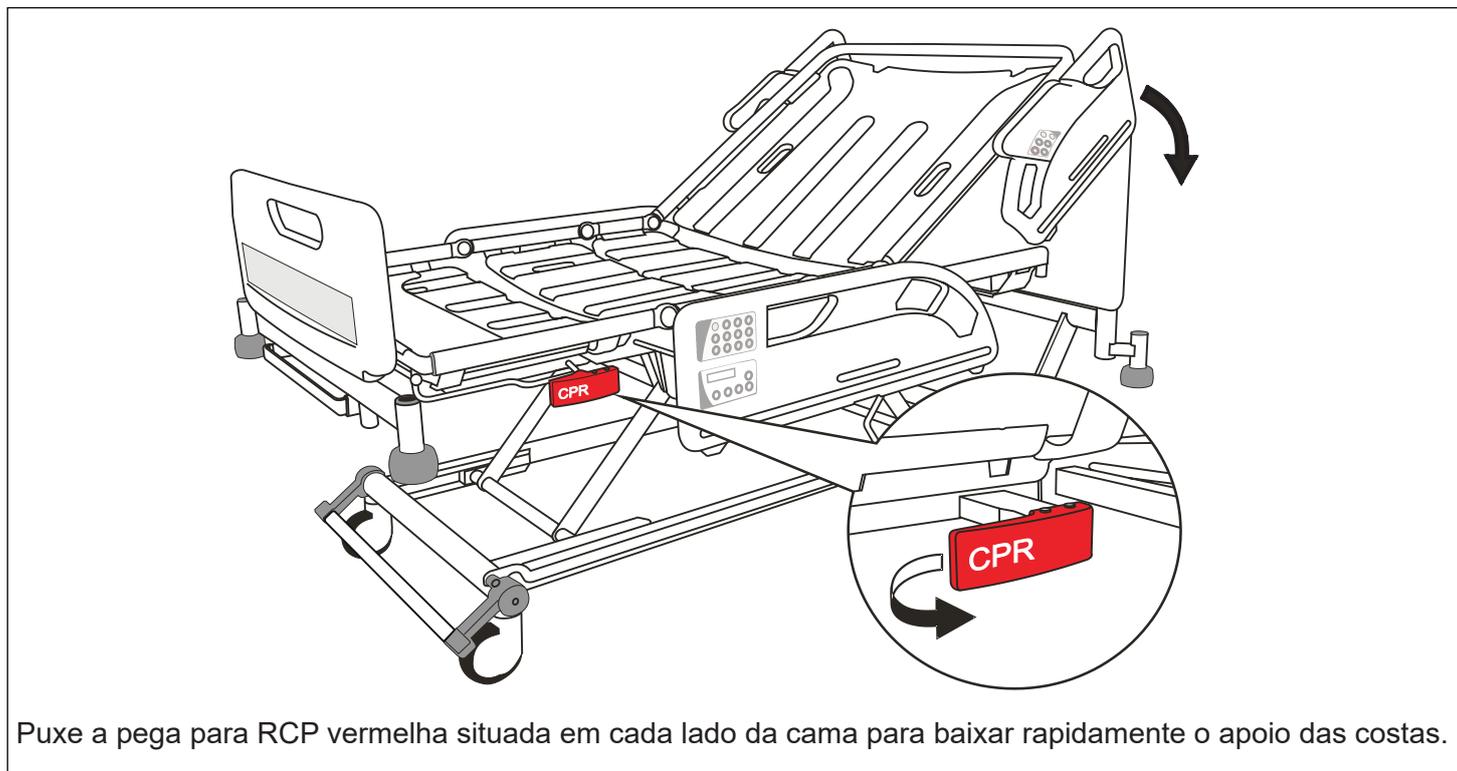
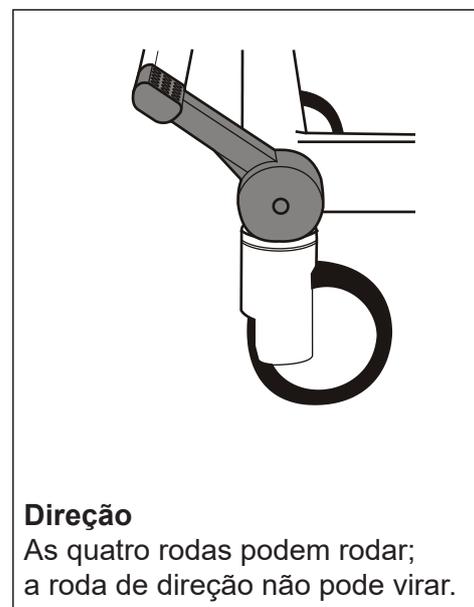


## Desengate do apoio das costas para RCP

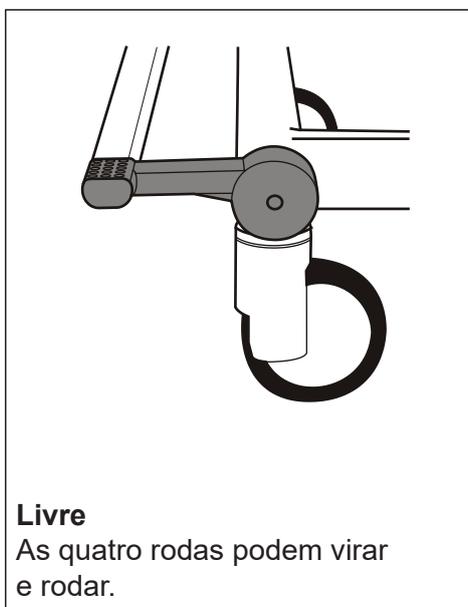


## Travões e direção

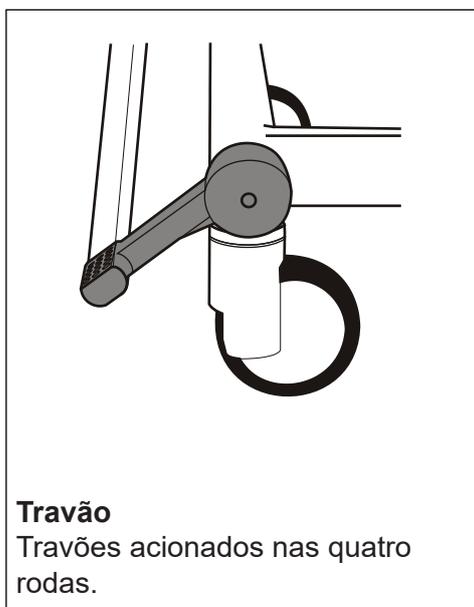

Os travões devem ser sempre acionados quando a cama estiver estacionária.

## Grades de segurança

1

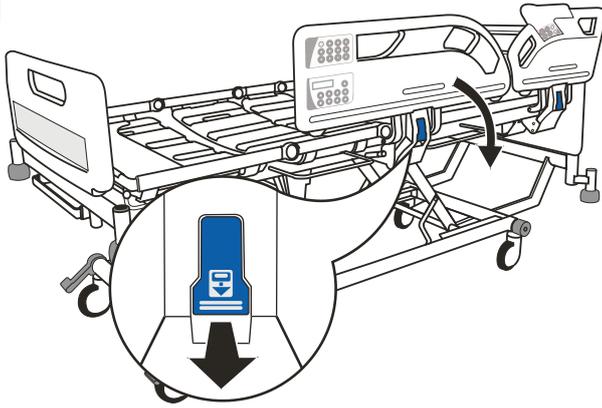


Puxe a alavanca de libertação azul para baixar a grade lateral.

2




Certifique-se de que a grade lateral está bloqueada com segurança quando estiver na posição subida.

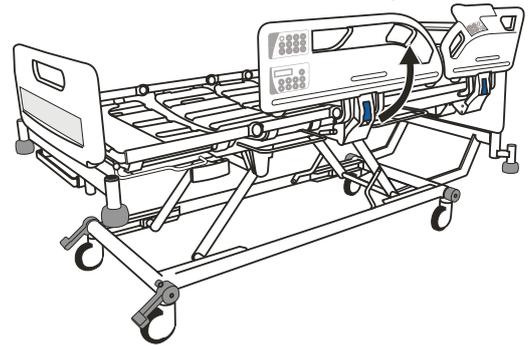

Para levantar a grade lateral, puxe-a para cima segurando na pega e afastando-a da cama, até trancar na posição subida.


## Ajuste do comprimento da cama (três posições definidas)

1

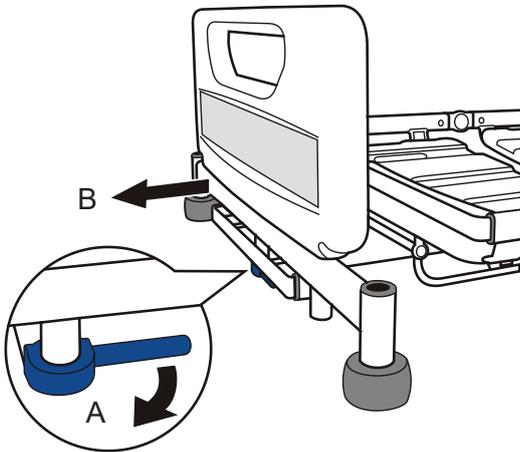

Puxe o manípulo azul de travão da extensão (A). Puxe a estrutura de cama (B) para a posição desejada e solte o manípulo.


2

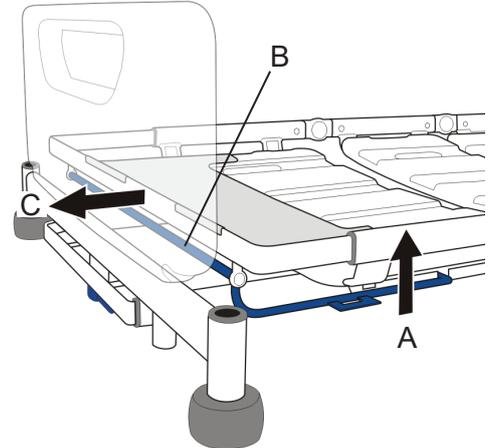

Levante a barra do fecho da extensão azul (A) e segure a parte do meio da trave (B). Depois, puxe o estrado do colchão para a posição (C).


## Ajuste da secção dos gémeos

1

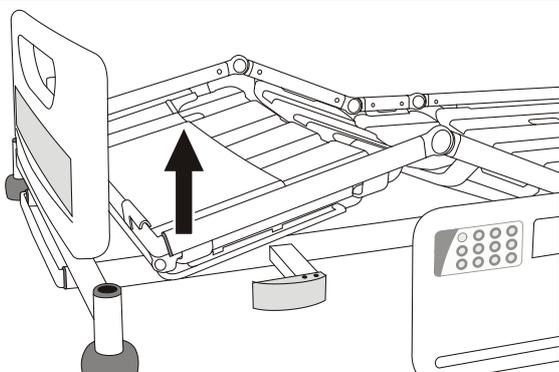

Segure o lado da estrutura da secção dos gémeos e levante a secção dos gémeos para cima.

2

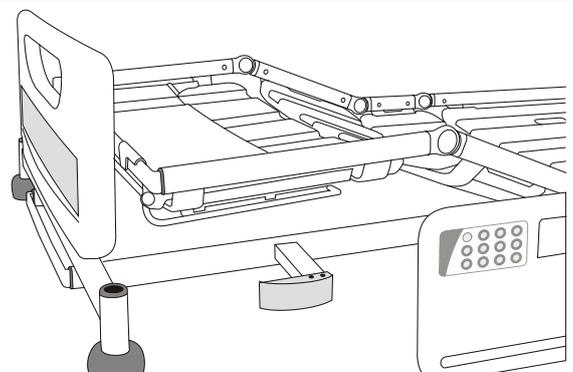

Levante até encaixar na posição horizontal.