



## Nhà tựa lưng CPR

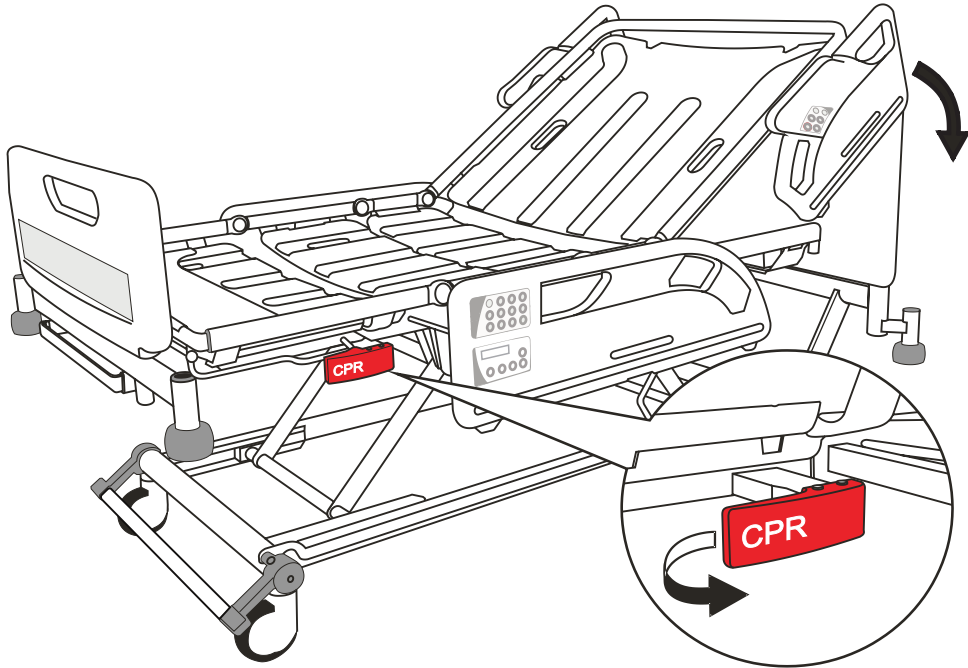


Kéo tay cầm CPR màu đỏ nằm ở hai bên giường để nhanh chóng hạ thấp phần tựa lưng.

## Phanh và hệ thống lái

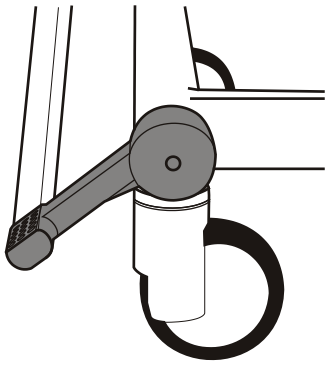


### Phanh

Phanh được lắp đặt trên cả bốn bánh xe.

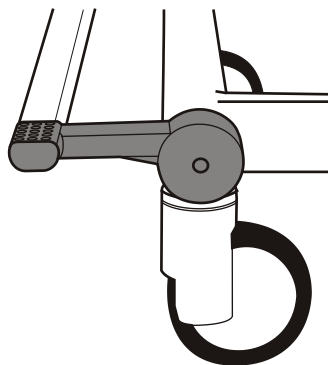

### Tự do

Cả bốn bánh xe có thể lăn và xoay vùn tự do.

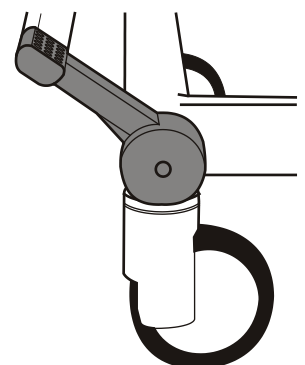


### Lái

Cả bốn bánh xe có thể xoay trong khi tay lái không thể xoay.

Luôn gài phanh tất cả thời gian khi giường đứng yên.

## Ray bên

1

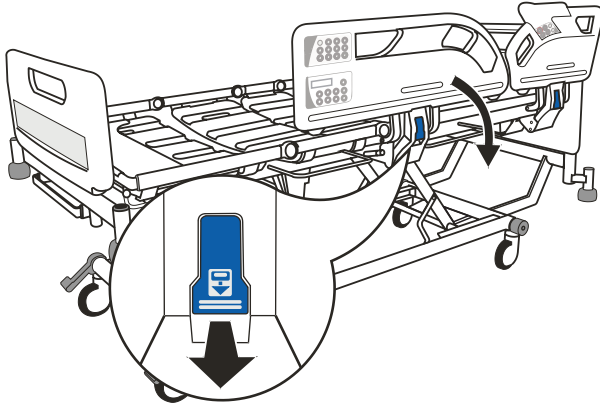


Kéo cần gạt màu xanh để hạ thấp thanh ray bên.

2




Kiểm tra để đảm bảo thanh ray bên được khóa an toàn khi ở vị trí nâng.

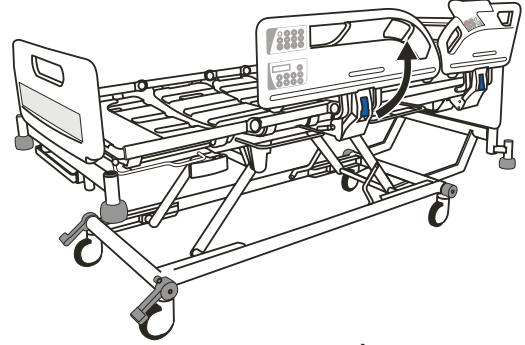

Để nâng thanh ray bên, giữ tay cầm thanh ray bên và kéo thanh ray bên lên và ra khỏi giường cho tới khi tay vịn khớp vào vị trí nâng.


## Điều chỉnh độ dài giường (ba vị trí)

1

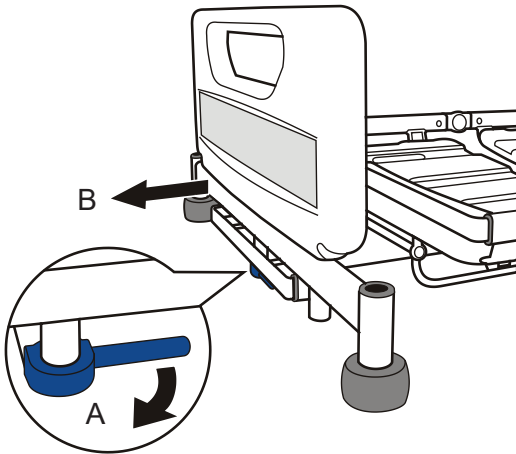

Kéo tay khóa mở rộng màu xanh dương (A). Kéo khung giường (B) ra tới vị trí theo yêu cầu và nhả tay cầm.


2

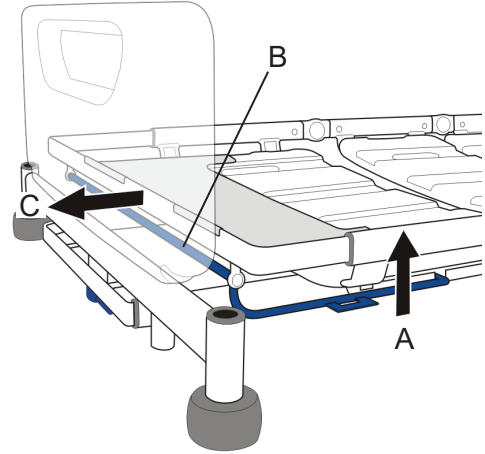

Nhấc thanh bắt mở rộng màu xanh dương (A) lên và nắm tay ở giữa xà ngang cuối giường (B), và kéo tấm đỡ đệm ra tới vị trí (C).


## Điều chỉnh phần bấp chân

1

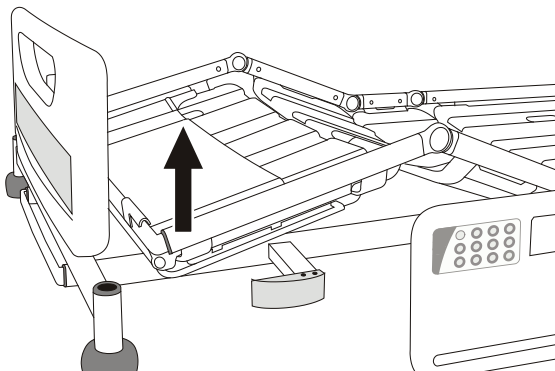

Giữ cạnh của khung phần bấp đùi và nâng bấp chân lên trên.

2

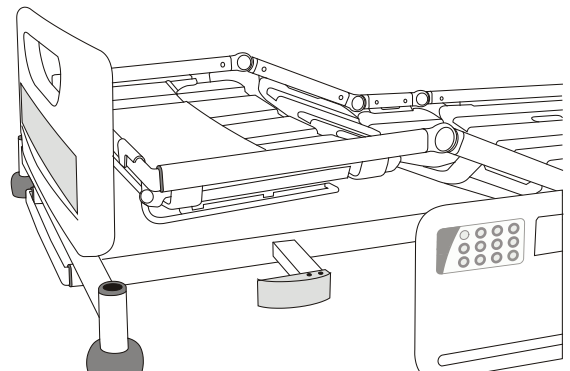

Nâng cho đến khi chốt ở vị trí nằm ngang.