



CPR-Notfallauslösung

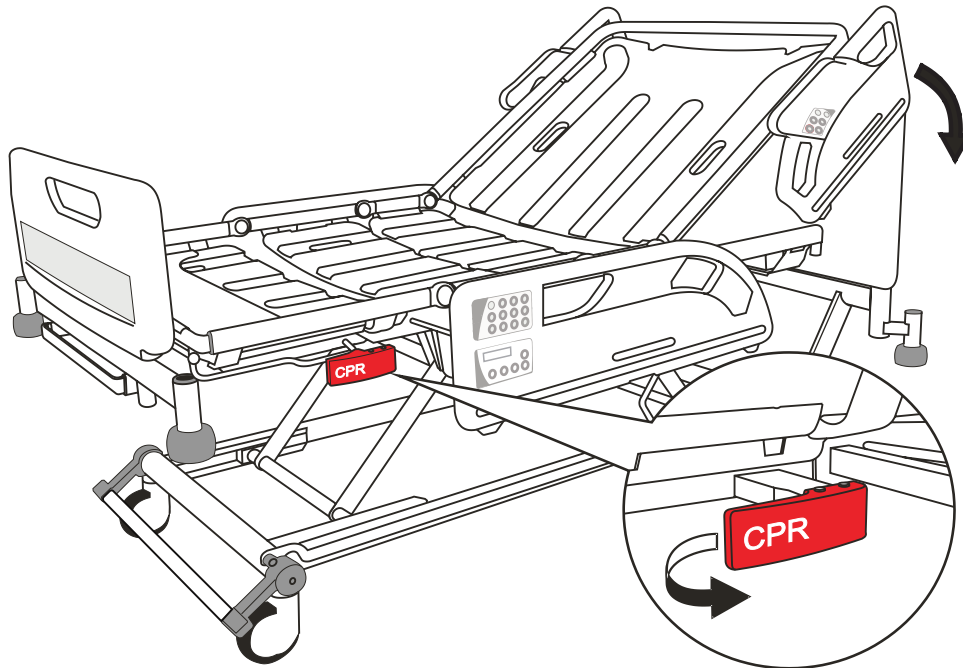


Ziehen Sie an dem roten CPR-Griff an einer der beiden Bettseiten, um die Rückenlehne schnell abzusenken.

Bremsen und Lenken

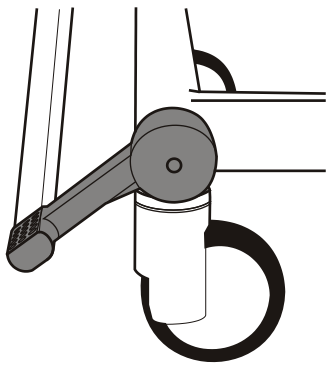


Bremse

Bremsen an allen vier Lenkrollen festgestellt.

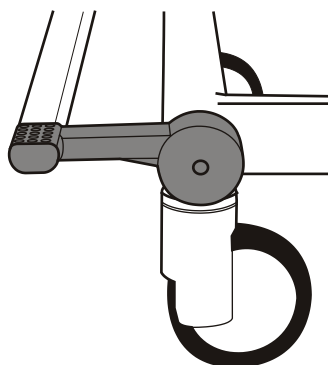

Frei

Alle vier Lenkrollen können sich frei drehen und schwenken.

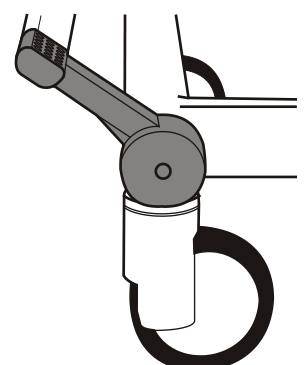


Lenken

Alle vier Lenkrollen können sich drehen, aber die Richtungskrolle kann nicht geschwenkt werden.

Die Bremsen sollten stets arretiert sein, wenn das Bett steht.

Sicherheitsseiten

1

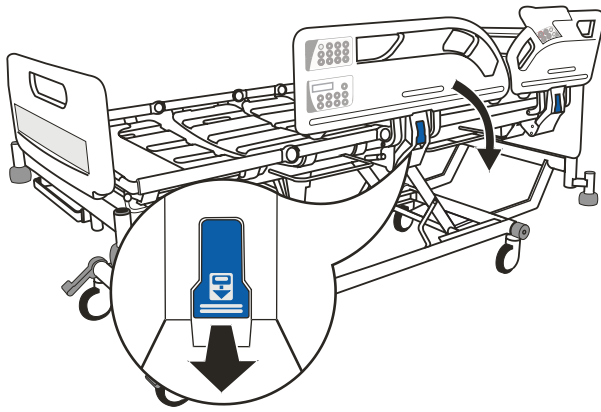


Ziehen Sie an dem blauen Lösehebel, um die Sicherheitsseite abzusenken.

2




Achten Sie darauf, dass die Sicherheitsseiten in der hochgeklappten Position richtig eingerastet sind.

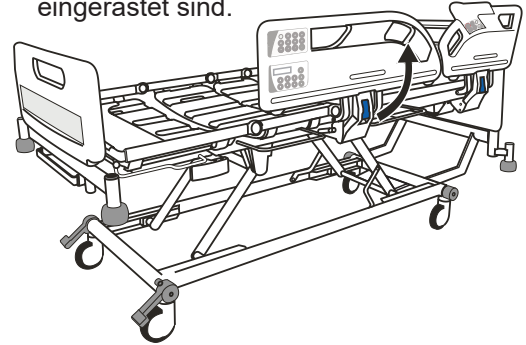

Um die Sicherheitsseite anzuheben, halten Sie den Griff der Sicherheitsseite fest und ziehen Sie die Sicherheitsseite nach oben vom Bett weg, bis sie in der hochgeklappten Position einrastet.


Anpassung der Bettlänge (drei Positionen)

1

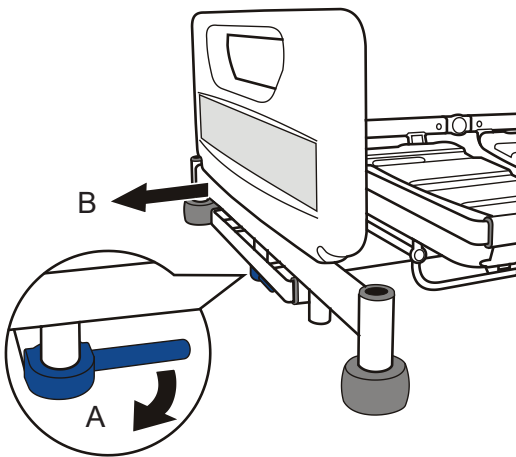

Den blauen Verriegelungshebel ziehen (A). Den Bettrahmen (B) in die gewünschte Position ausziehen und den Hebel loslassen.


2

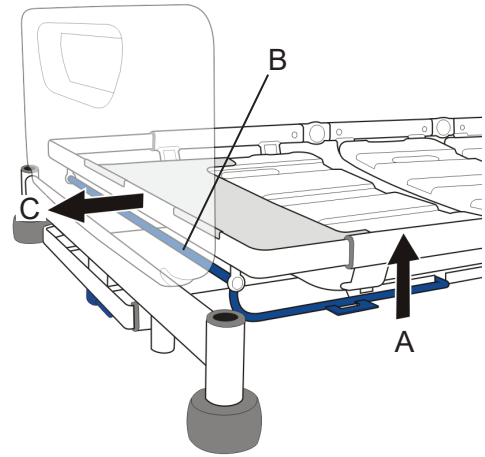

Den blauen Verriegelungshebel nach oben ziehen (A) und die Querstange (B) in der Mitte festhalten, dann die Matratzen-Liegefläche in die gewünschte Position ausziehen (C).


Einstellung des Unterschenkelsegments

1

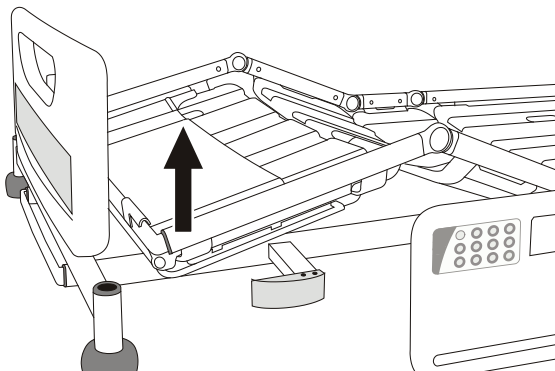

Halten Sie den Rahmen des Unterschenkelsegments an der Seite fest und heben Sie das Unterschenkelsegment an.

2

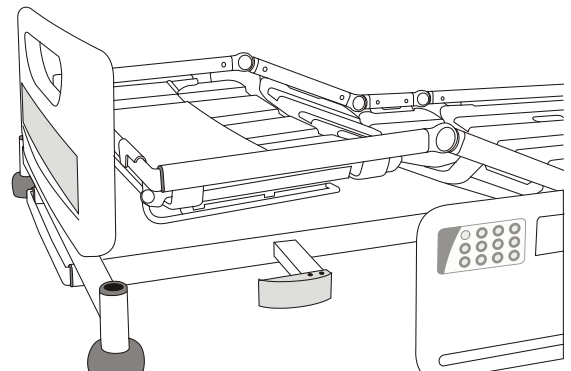

Heben Sie es an, bis es in der horizontalen Position einrastet.