



Sblocco CPR schienale

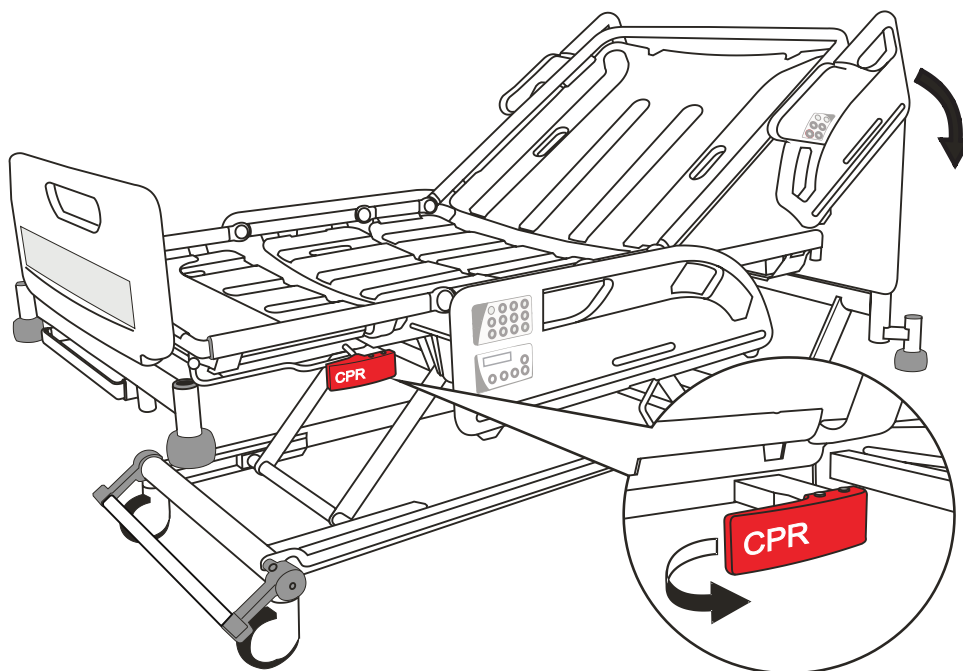


Tirare la maniglia rossa CPR su entrambi i lati del letto per abbassare velocemente lo schienale.

Sistema frenante e di guida

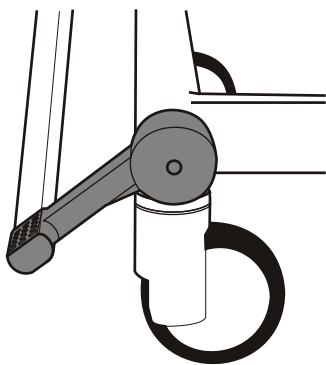


Freni inseriti

Freni inseriti su tutte e quattro le ruote.

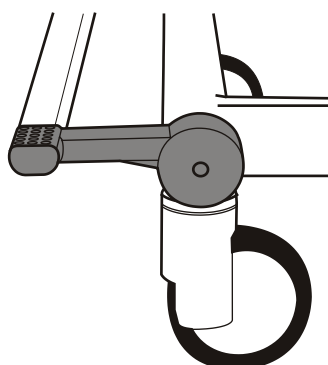

Freni non inseriti

Tutte e quattro le ruote possono girare e ruotare liberamente.

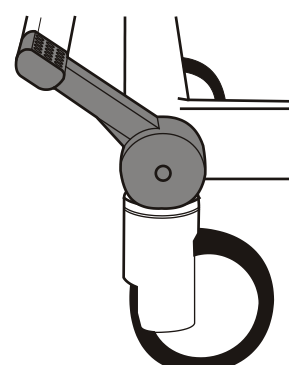


Sistema di guida

Tutte e quattro le ruote possono girare, ma la ruota direzionale è bloccata.

I freni devono essere sempre inseriti quando il letto è fermo.

Spondine laterali

1

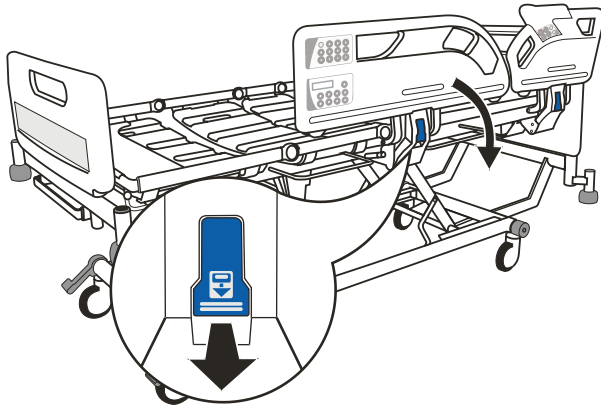


Tirare la leva blu di sgancio per abbassare la spondina laterale.

2




Accertarsi che la spondina laterale sia bloccata quando è in posizione alzata.

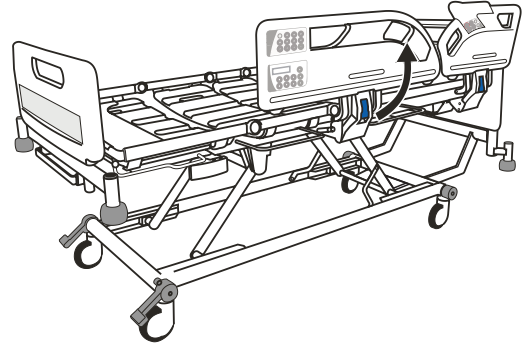

Per sollevare la spondina laterale, afferrare la maniglia della spondina e tirare verso l'alto e verso l'esterno la spondina laterale fino a bloccarla in posizione alzata.


Regolazione della lunghezza del letto (tre posizioni predefinite)

1

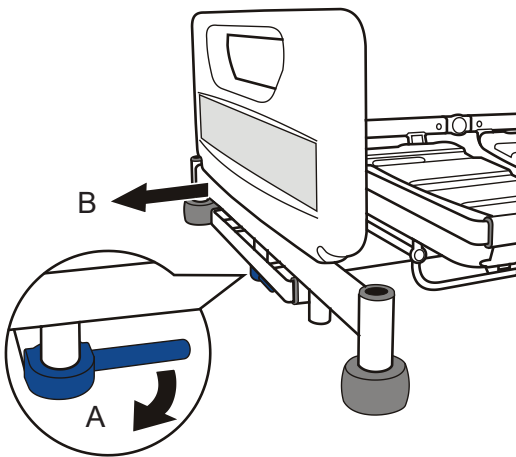

Tirare la maniglia blu di blocco estensione (A). Estrarre il telaio del letto (B) come desiderato e rilasciare la maniglia.


2

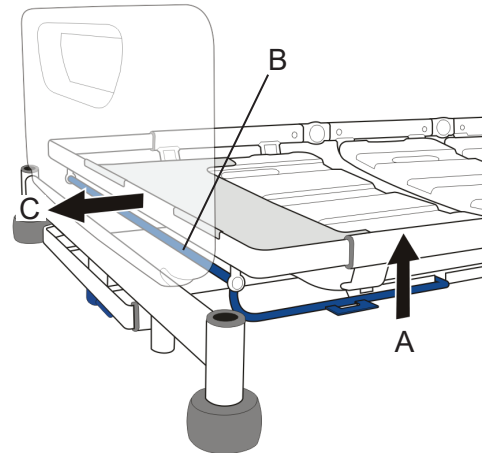

Sollevare la barra blu di supporto estensione (A) e afferrare la barra trasversale nel mezzo (B), quindi estrarre il pianale portamaterasso come desiderato (C).


Regolazione della sezione polpaccio

1

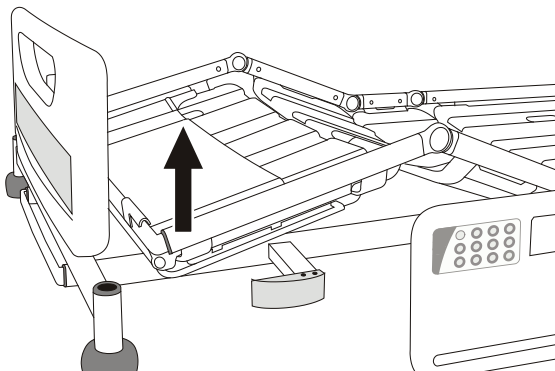

Afferrare il telaio della sezione polpaccio da un lato per sollevare la sezione polpaccio.

2

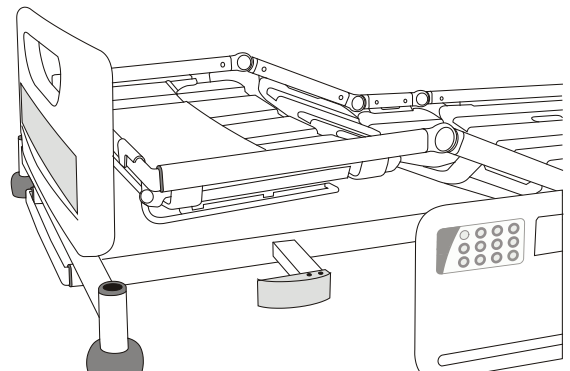

Sollevare finché non arriva in posizione orizzontale.