



CPR-ryglænsudløser

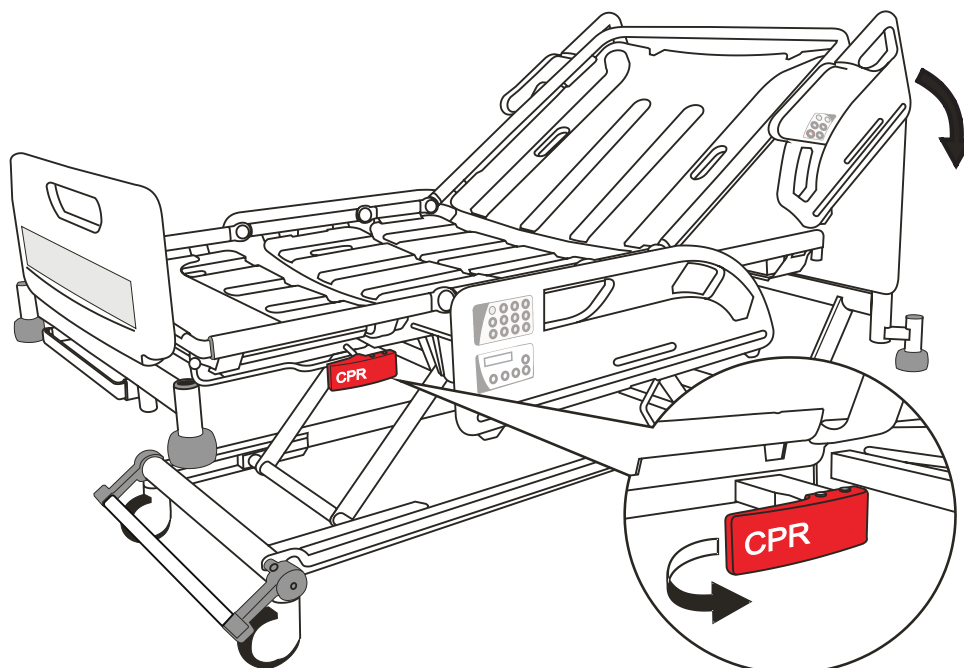


Træk i det røde CPR-håndtag, der er placeret i begge sider af sengen, for at sænke ryglænet hurtigt.

Bremser og styring

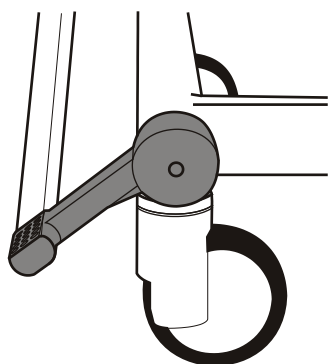


Bremser

Bremserne er aktiveret på alle fire hjul.

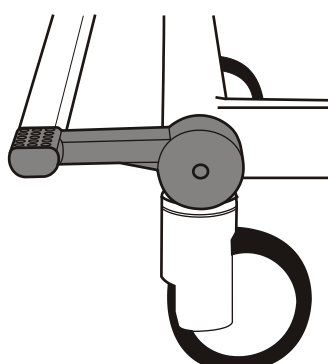

Ingen begrænsninger

Alle fire hjul kan rotere og dreje frit.

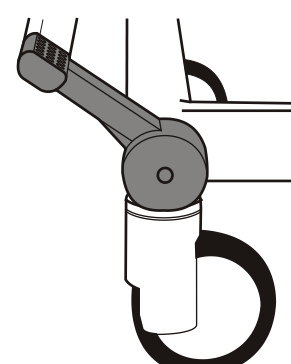


Styr

Alle fire hjul kan rotere, styrehjulet kan ikke dreje.

Bremserne skal altid være aktiveret, når sengen står stille.

Sengeheste

1

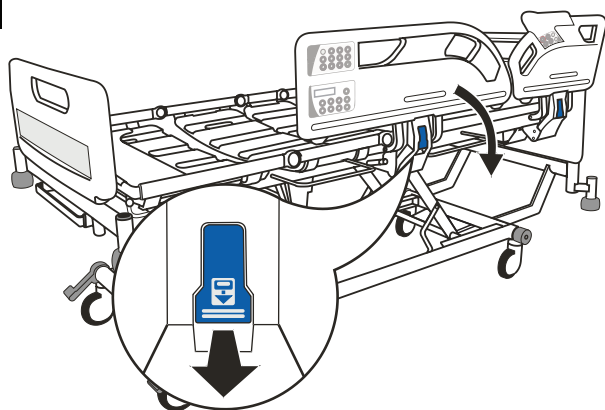


Træk i det blå udløserhåndtag for at sænke sengehesten.

2




Sørg for, at sengehesten er fastlåst, når den er i hævet position.

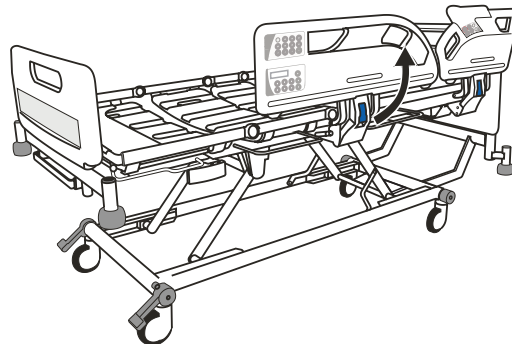

For at hæve sengehesten: Hold i håndtaget til sengehesten, og træk sengehesten op og væk fra sengen, indtil den låses fast i hævet position.


Tilpasning af sengelængde (tre faste positioner)

1

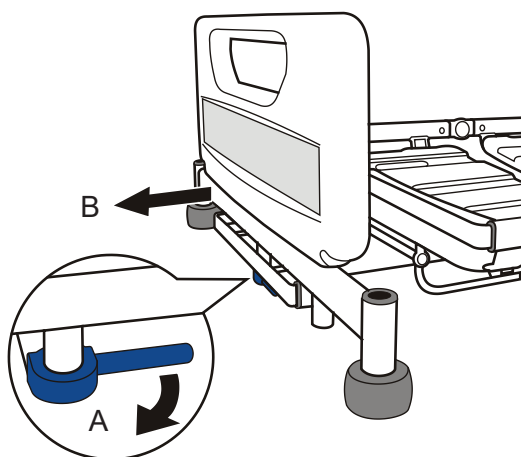

Træk i det blå forlængerlåsehåndtag (A). Træk sengerammen (B) ud til den ønskede position, og slip håndtaget.


2

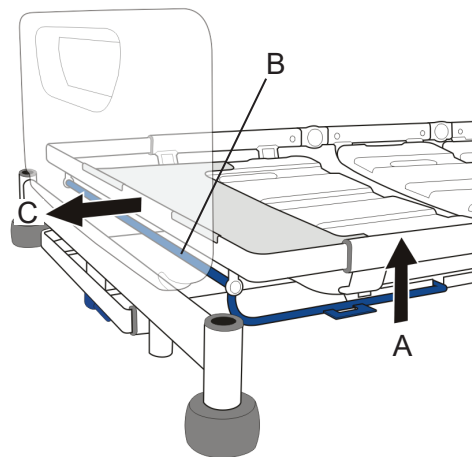

Løft den blå forlængerlåsestang (A), og hold fast i midten af tværstangen (B). Træk derefter liggefladen til den ønskede position (C).


Tilpasning af lægsektion

1

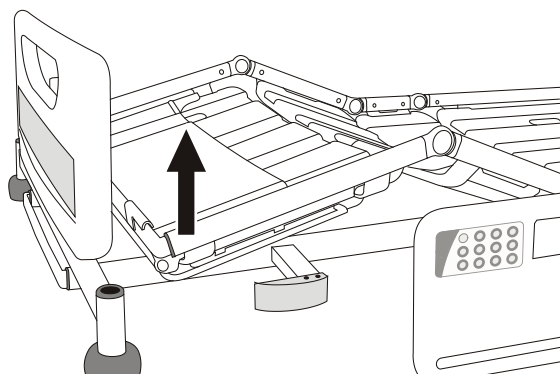

Hold i siden af lægsektionens ramme, og løft lægsektionen opad.

2

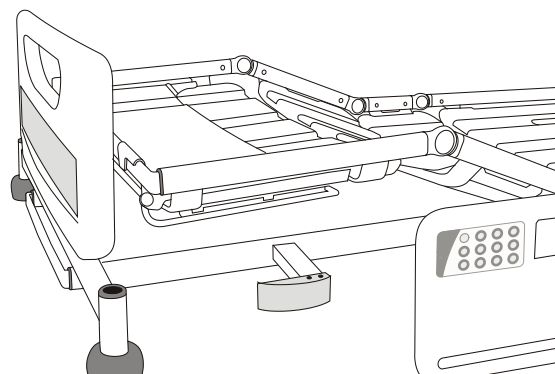

Løft, indtil den går i indgreb i vandret position.