



Uvolnění opěrky zad pro kardiopulmonální resuscitaci

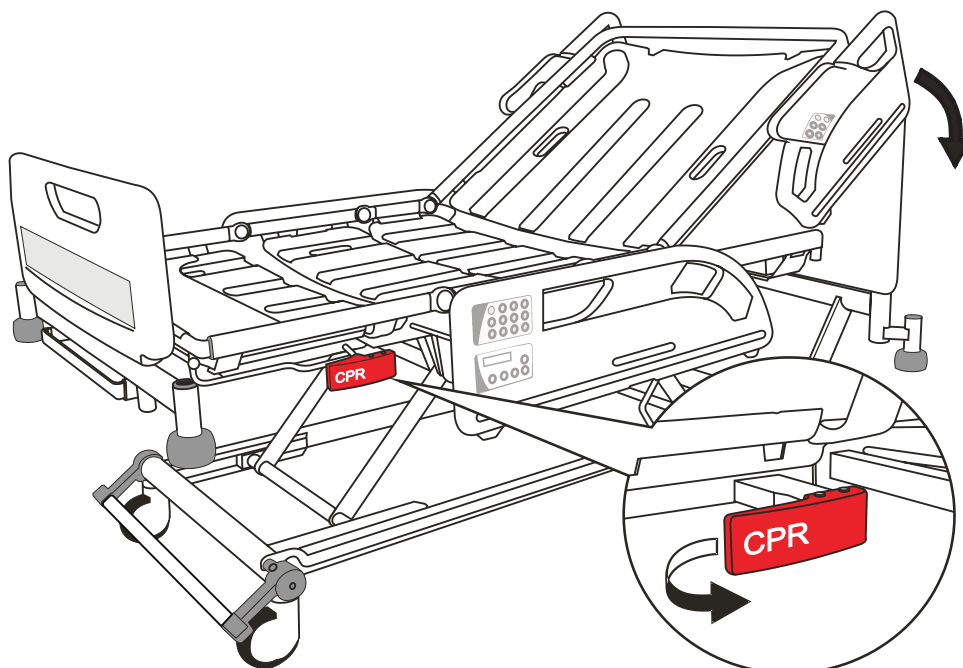


Zatáhněte za červenou rukojeť CPR, která se nachází na obou stranách lůžka a slouží k rychlému snížení opěrky zad.

Brzdy a řízení

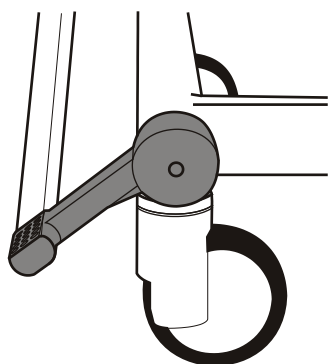


Brzda

Brzdy jsou použity na všech čtyřech kolečkách.

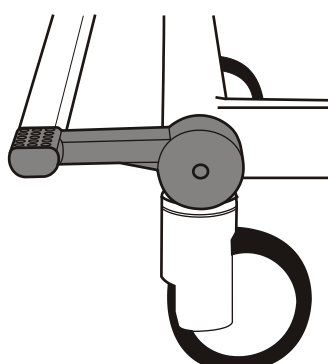

Volno

Všechna čtyři kolečka se volně otáčejí (i kolem své osy).

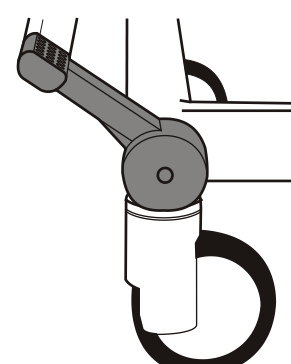


Řízení

Všechna čtyři kolečka se mohou volně otáčet, ale řídicí kolečko se neotáčí kolem své osy.

Brzdy použijte vždy, když lůžko stojí na místě.

Postranice

1

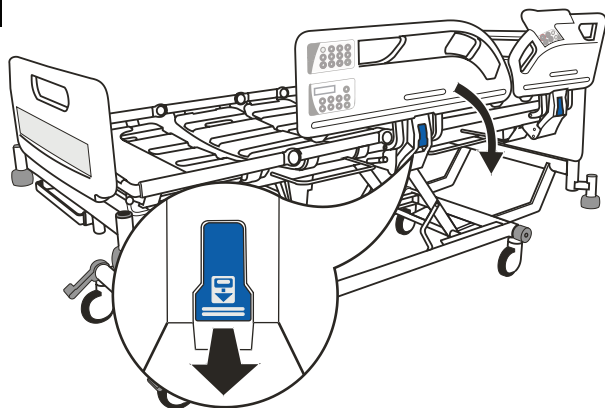


Zatáhněte za modrou uvolňovací páčku pro snížení postranice.

2




Ujistěte se, že postranice ve zvednuté poloze jsou bezpečně zajištěny.

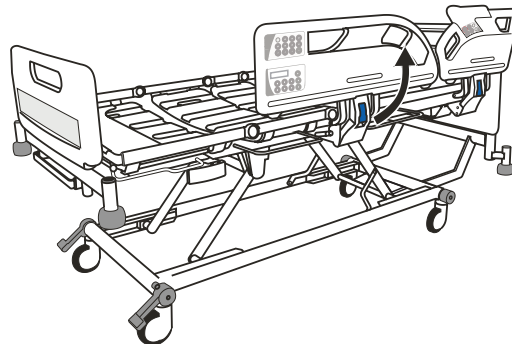

Pro zvednutí postranice přidržeť rukojeť postranice, pak zatáhněte postranici nahoru a směrem od lůžka, dokud nezapadne do zvednuté pozice.


Nastavení délky lůžka (tři přednastavené pozice)

1

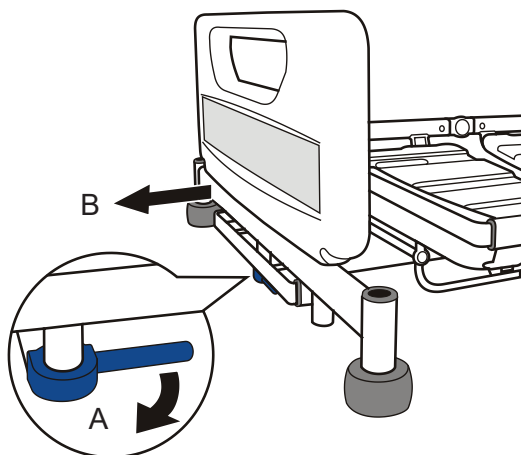

Zatáhněte za modrou pojistnou páčku prodloužení (A). Vytáhněte rám lůžka (B) do požadované polohy a páčku uvolněte.


2

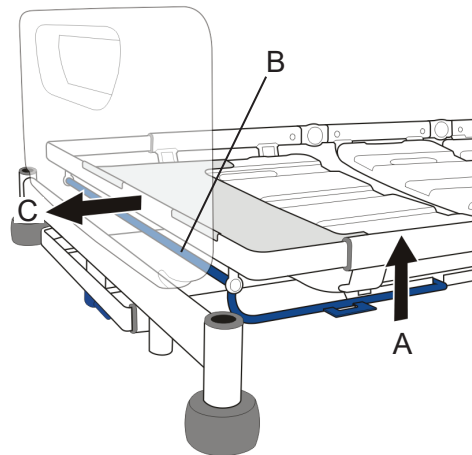

Zvedněte modrou ruční páčku prodloužení (A), přidržeť střední část příčky (B) a vytáhněte platformu matrace do požadované pozice (C).


Nastavení lýtkové části

1

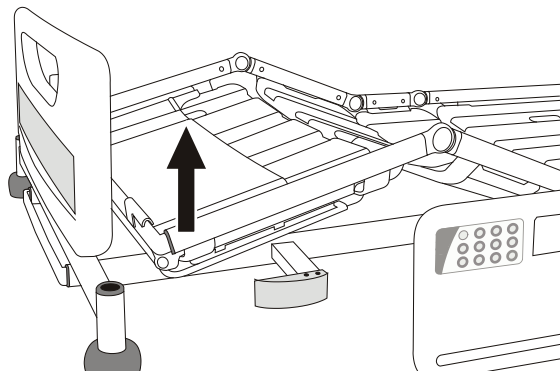

Uchopte rám lýtkové části po stranách a lýtkovou část zvedejte vzhůru.

2

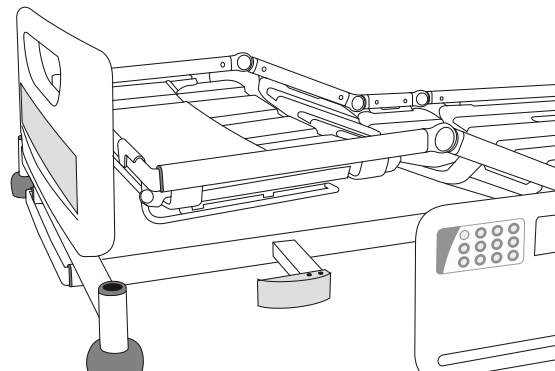

Zvedejte, dokud nezapadne ve vodorovné pozici.

