



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изключете леглото от електрозахранването, преди да започнете всякаква дейност по почистване или поддръжка. Леглото все още ще работи на захранване от батерията, ако функцията не е била заключена от КПзП.

Не позволявайте електрическият щепсел или захранващият кабел да се намокрят.

ВНИМАНИЕ

Не използвайте абразивни съединения или гъби, нито дезинфектанти на базата на фенола.

Не използвайте водоструйка, нито миещи тунели.

Не отстранявайте смазката от буталата на активатора.

Ежеседмично почиствайте и дезинфекцирайте.

Почистете и дезинфекцирайте преди нови пациенти.

Необходими аксесоари:

- Предпазно облекло
- Неутрален детергент
- Натриев дихлоризоцианурат (NaDCC) в концентрация от 1000 ppm (0,1%) активен хлор
- Натриев дихлоризоцианурат (NaDCC) в концентрация от 10 000 ppm (1%) активен хлор
- Топла вода
- Кърпа за еднократна употреба
- Хартиени салфетки за еднократна употреба

Като дезинфектант се препоръчва натриев дихлоризоцианурат (NaDCC). Ако протоколите на здравното заведение изискват използването на дезинфектант, различен от NaDCC, използвайте го внимателно и в съответствие с инструкциите на производителя.

Почистване

1. Махнете матрака и всички аксесоари от леглото.
2. Отстранете от леглото таблата за глава, таблата за крака и сегментите на матрачната платформа.
3. Почистете всички повърхности с кърпа за еднократна употреба, напоена с вода и неутрален детергент. Започнете с горните части на леглото и работете по всички хоризонтални повърхности. Работете методично към долните части на леглото и почистете колелата последни.
4. Избършете с нова кърпа за еднократна употреба, напоена с вода. Подсушете с хартиени салфетки за еднократна употреба.
5. Оставете почистените части да изсъхнат, преди да поставите отново матрака.

Дезинфекция

6. Избършете всички повърхности с NaDCC (1000 ppm активен хлор). В случай на натрупване на телесни течности, например кръв, избършете с NaDCC (10 000 ppm активен хлор).

