



AVERTISSEMENT

Débrancher le lit de l'alimentation électrique avant toute opération de nettoyage ou de maintenance. Le lit continue à fonctionner à l'aide de la batterie si la fonction n'a pas été verrouillée sur le panneau de commande soignant.

Ne jamais mouiller la fiche ou le cordon d'alimentation électrique.

ATTENTION

Ne pas utiliser de tampons abrasifs ou de composés abrasifs, ni de désinfectants à base de phénol.

Ne pas recourir au nettoyage à jet de vapeur ou par tunnel de lavage.

Ne pas retirer la graisse des vérins.

Nettoyer et désinfecter chaque semaine.

Nettoyer et désinfecter avant chaque nouveau patient.

Accessoires nécessaires :

- Vêtements de protection
- Solution détergente neutre
- Dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à 1 000 ppm (0,1 %) de chlore disponible
- Dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) à 10 000 ppm (1 %) de chlore disponible
- Eau chaude
- Linge jetable
- Serviettes en papier jetables

Le dichloroisocyanurate de sodium (NaDCC) est recommandé en tant que désinfectant. Si les protocoles de l'établissement requièrent l'utilisation d'un désinfectant autre que le NaDCC, procéder avec précaution conformément aux instructions du fabricant.

Nettoyage

1. Retirer le matelas et tous les accessoires du lit.
2. Retirer la tête de lit, le pied de lit et les plaques du sommier du lit.
3. Nettoyer toutes les surfaces avec un linge jetable imprégné d'eau et de solution détergente neutre. Commencer par les sections supérieures du lit et toutes les surfaces horizontales. Poursuivre méthodiquement en direction des sections inférieures du lit et terminer par les roulettes.
4. Essuyer avec un nouveau linge jetable imprégné d'eau. Sécher avec des serviettes en papier jetables.
5. Avant de replacer le matelas, veiller à bien sécher les parties nettoyées.

Désinfection

6. Essuyer toutes les surfaces avec du NaDCC (1 000 ppm de chlore disponible). Pour les fluides corporels, tels que le sang, essuyer avec du NaDCC (10 000 ppm de chlore disponible).

