

Enterprise 5000X, 8000X, 9000X



WAARSCHUWING

Koppel het bed los van de netvoeding voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Het bed blijft op de accu werken als de functie niet geblokkeerd is op het bedieningspaneel voor de zorgverlener.

Voorkom dat de stekker of voedingskabel nat wordt.

LET OP

Gebruik geen schurende bestanddelen of schuursponsen, of desinfectiemiddelen op basis van fenol.

Gebruik geen hogedrukreiniging of wastunnels.

Verwijder het smeermiddel van de ventielzuigers niet.

Wekelijks reinigen en desinfecteren.

Reinigen en desinfecteren vóór gebruik door nieuwe zorgvragers.

Benodigde accessoires:

- Beschermende kleding
- Neutraal reinigingsmiddel
- Natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC) in een concentratie van 1.000 ppm (0,1% vrij chloor)
- Natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC) in een concentratie van 10.000 ppm (1% vrij chloor)
- Warmwaterkraan
- Wegwerpdoek
- Papieren handdoeken voor eenmalig gebruik

Natriumdichloorisocyanuraat (NaDCC) wordt aanbevolen als desinfectiemiddel. Als de protocollen van de instelling het gebruik van een ander desinfectiemiddel dan NaDCC voorschrijven, gebruik dat middel dan zorgvuldig en volgens de instructies van de fabrikant.

Reinigen

1. Verwijder de matras en eventuele accessoires van het bed.
2. Verwijder het hoofdeinde, voeteneinde en de ligvlakplaten van het bed.
3. Reinig alle oppervlakken met een wegwerpdoek die is bevochtigd met water en een neutraal reinigingsmiddel. Begin met de bovenste delen van het bed en werk alle horizontale oppervlakken af. Werk systematisch in de richting van de lagere delen van het bed en reinig de wielen het laatst.
4. Neem alle delen opnieuw af met een nieuwe wegwerpdoek die is bevochtigd met water. Droog alle delen af met papieren handdoeken voor eenmalig gebruik.
5. Laat de gereinigde delen drogen vóór de matras weer op het bed wordt gelegd.

Desinfectie

6. Neem alle oppervlakken af met NaDCC (1.000 ppm vrij chloor). In geval van besmetting met lichaamsvloeistof, zoals bloed, afnemen met NaDCC (10.000 ppm vrij chloor).

