

# Enterprise 5000X, 8000X, 9000X

**UWAGA**

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub czynności konserwacyjnych należy odłączyć łóżko od zasilania. Łóżko będzie nadal korzystać z zasilania bateryjnego, jeżeli funkcja ta nie zostanie zablokowana na panelu sterowania opiekuna.

Nie wolno dopuszczać do zamoczenia wtyczki lub przewodu zasilającego.

**OSTRZEŻENIE**

Nie używać środków i materiałów ściernych ani środków dezynfekcyjnych na bazie fenolu.

Nie czyścić przy użyciu myjki ciśnieniowej lub w myjniach.

Nie usuwać smaru z tłoków siłownika.

Czyścić i dezynfekować raz w tygodniu.

Czyścić i dezynfekować przed zmianą pacjenta.

Potrzebne akcesoria:

- Odzież ochronna
- Neutralny detergent
- Dichloroizocyjanuran sodu (NaDCC) o stężeniu 1000 ppm (0,1%) dostępnego chloru
- Dichloroizocyjanuran sodu (NaDCC) o stężeniu 10 000 ppm (1%) dostępnego chloru
- Woda ciepła
- Jednorazowa ściereczka
- Jednorazowe ręczniki papierowe

Dichloroizocyjanuran sodu (NaDCC) jest zalecanym środkiem dezynfekcyjnym. Jeżeli obowiązujące procedury wymagają użycia innego środka dezynfekcyjnego niż NaDCC, należy go używać ostrożnie, zgodnie z instrukcją producenta.

## Czyszczenie

1. Zdjąć materac i wszystkie akcesoria z łóżka.
2. Zdjąć z łóżka panel wezgłowia, podnózek i platformę materaca.
3. Wyczyścić wszystkie powierzchnie jednorazową ściereczką nasączoną wodą i neutralnym detergentem. Zacząć od czyszczenia górnych części łóżka oraz wszystkich powierzchni poziomych. Przejść do części dolnych i na końcu wyczyścić koła.
4. Wytrzeć nową jednorazową ściereczką nasączoną wodą. Osuszyć ręcznikami papierowymi.
5. Przed wymianą materaca wysuszyć wyczyszczone elementy.

## Dezynfekcja

6. Wytrzeć wszystkie powierzchnie NaDCC (1000 ppm dostępnego chloru). W przypadku gromadzenia się płynów ustrojowych, np. krwi, wytrzeć NaDCC (10 000 ppm dostępnego chloru).

