



AVISO

Desligue a cama da alimentação elétrica antes de iniciar qualquer atividade de limpeza ou manutenção. A cama continuará a funcionar com carga da bateria se a função não tiver sido bloqueada no ACP. Não deixe que a tomada ou cabo de energia fiquem molhados.

CUIDADO

Não use buchas ou compostos abrasivos ou desinfetantes à base de fenol.
Não use limpeza com jatos ou túneis de lavagem.
Não remova manchas de graxa dos pistões do atuador.

Limpe e desinfete semanalmente.
Limpe e desinfete antes de utilizar com pacientes novos.

Acessórios necessários:

- Vestuário de proteção
- Detergente neutro
- Dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) numa concentração de 1000 ppm (0,1%) de cloro disponível
- Dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) numa concentração de 10 000 ppm (1%) de cloro disponível
- Água quente
- Pano descartável
- Toalhas de papel descartáveis

O dicloroisocianurato de sódio (NaDCC) é recomendado como desinfetante. Se os protocolos da instalação exigirem a utilização de um desinfetante que não NaDCC, utilize com cuidado e de acordo com as instruções do fabricante.

Limpeza

1. Retire o colchão e todos os acessórios da cama.
2. Retire os lençóis da cabeceira, da placa dos pés e do estrado do colchão da cama.
3. Limpe todas as superfícies com um pano descartável humedecido com água e detergente neutro. Comece pelas partes superiores da cama e trabalhe ao longo de todas as superfícies horizontais. Trabalhe metodicamente em direção às partes inferiores da cama e, por último, limpe as rodas.
4. Passe um pano descartável novo humedecido com água. Seque com toalhas de papel descartáveis.
5. Deixe as partes limpas secarem antes de substituir o colchão.

Desinfecção

6. Limpe todas as superfícies com NaDCC (1000 ppm de cloro disponível). No caso de derrame de fluidos corporais, por ex., sangue, limpe com NaDCC (10 000 ppm de cloro disponível).

