

**VAROVANIE**

Pred začatím akejkoľvek činnosti údržby odpojte lôžko od nástennej zásuvky. Ak funkcia nebola uzamknutá na OOP, lôžko bude aj naďalej pracovať pri napájaní z batérie.

Nedovoľte, aby došlo k namočeniu elektrickej zástrčky alebo elektrického kábla.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte abrazívne látky, tampóny ani dezinfekčné prostriedky na báze fenolu.

Zariadenie nečistite prúdom pary ani v čistiacich tuneloch.

Neodstraňujte mazivo z piestov pohonu.

Čistite a dezinfikujte raz týždenne.

Čistite a dezinfikujte pred použitím novým pacientom/klientom.

Potrebné príslušenstvo:

- Ochranné oblečenie
- Neutrálny detergent
- Dichlórízokyanurát sodný (NaDCC) s 1 000 ppm (0,1 %) voľného chlóru
- Dichlórízokyanurát sodný (NaDCC) s 10 000 ppm (1 %) voľného chlóru
- Teplá voda
- Jednorazová tkanina
- Jednorazové papierové utierky

Ako dezinfekčný prostriedok sa odporúča použiť dichlórízokyanurát sodný (NaDCC). Ak protokoly zariadenia vyžadujú použitie iného dezinfekčného prostriedku než NaDCC, používajte ho opatrne a v súlade s pokynmi od výrobcu.

Čistenie

1. Odstráňte matrac a všetko príslušenstvo z lôžka.
2. Z lôžka odstráňte hlavový panel, nožný panel a plachty z ložnej plochy matraca.
3. Vyčistite všetky povrchy jednorazovou tkaninou navlhčenou vo vode s neutrálnym čistiacim prostriedkom. Začnite s hornými časťami lôžka a postupujte čistením všetkých vodorovných plôch. Pracujte systematicky smerom k dolným častiam lôžka a ako posledné vyčistite kolieska.
4. Utrite ich novou jednorazovou tkaninou navlhčenou vo vode. Usušte ich jednorazovými papierovými utierkami.
5. Pred vrátením matraca na miesto nechajte vyčistené časti úplne vyschnúť.

Dezinfekcia

6. Všetky povrchy utrite s NaDCC (1 000 ppm voľného chlóru).
V prípade prítomnosti telesných tekutín, napr. krvi, ich utrite s NaDCC (10 000 ppm voľného chlóru).

