

# Enterprise 5000X, 8000X, 9000X

**VARNING**

Koppla ur sängen från elnätet innan någon form av rengöring eller underhåll utförs. Sängen kan fortfarande manövreras med batterier om funktionen inte har stängts av med hjälp av personalhandkontrollen.

Låt inte elkontakten eller elkabeln bli våta.

**AKTA**

Använd inte slipande ämnen eller kuddar eller fenolbaserade desinficeringsmedel.

Använd inte trycktvätt eller tvättunnel.

Ta inte bort fett från ställdonskolvarna.

Rengör och desinficera en gång i veckan.

Rengör och desinficera före ny patient.

Tillbehör som behövs:

- Skyddskläder
- Neutralt rengöringsmedel
- Natriumdikloroisocyanurat (NaDCC) vid 1 000 ppm (0,1 %) fritt klor
- Natriumdikloroisocyanurat (NaDCC) vid 10 000 ppm (1 %) fritt klor
- Varmvatten
- Engångsduk
- Pappershanddukar för engångsbruk

Natriumdikloroisocyanurat (NaDCC) rekommenderas som desinficeringsmedel.

Om användning av ett annat desinficeringsmedel än NaDCC krävs enligt anläggningens rutiner ska detta användas med försiktighet och i enlighet med tillverkarens anvisningar.

## Rengöring

1. Ta bort madrassen och alla tillbehör från sängen.
2. Ta bort huvudgaveln, fotgaveln och madrassplattformens delar från sängen.
3. Rengör alla ytor med en engångsduk fuktad med vatten och neutralt rengöringsmedel. Börja med sängens övre delar och rengör längs alla horisontella ytor. Arbeta metodiskt mot sängens nedre delar och rengör till sist hjulen.
4. Torka av med en engångsduk fuktad med vatten. Torka med pappershanddukar för engångsbruk.
5. Låt de rengjorda delarna torka innan madrassen läggs tillbaka.

## Desinficering

6. Torka alla ytor med NaDCC (1 000 ppm fritt klor). Om det har ansamlats kroppsvätskor, t.ex. blod, ska dessa torkas bort med NaDCC (10 000 ppm fritt klor).

