


Enterprise 5000X, 8000X



Seljatoe vabastuspide KPE-ks



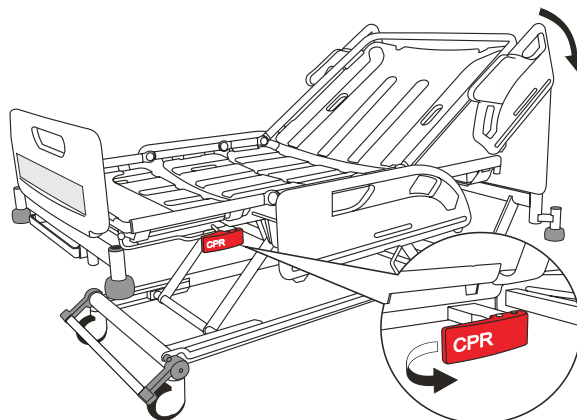


Tõmmake punast CPR-i (KPE) käepidet, mis asub mõlemal voodiküljel, et seljatuge kiirelt alla lasta.


Küljepiirded - Tõstmine



Ärge jätke küljepiirdeid tõstetud asendisse, kui lukustuspoltt on sinise käitusnupu taga nähtav.

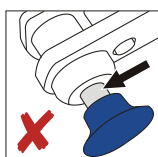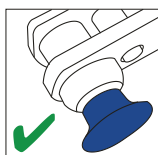
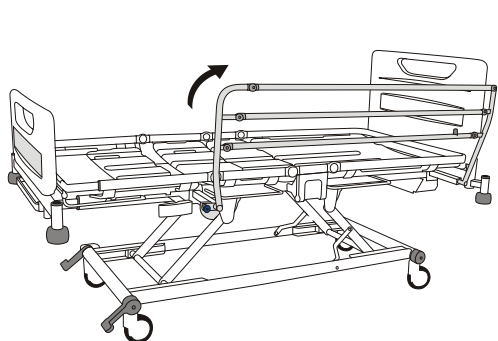


Veenduge, et tõstetud asendis olev küljepiire on korralikult lukustunud.

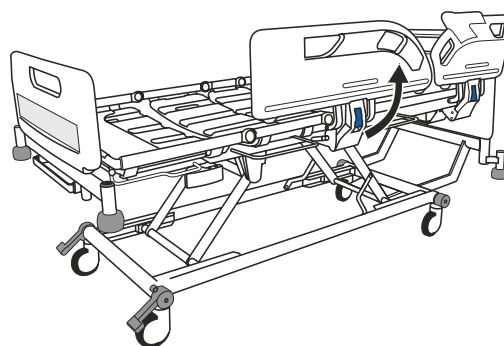


Hoidke küljepiirdest kinni. Tõmmake küljepiiret ülespoole, kuni see ülestõstetud asendis lukustub.

Küljepiirded - Langetamine

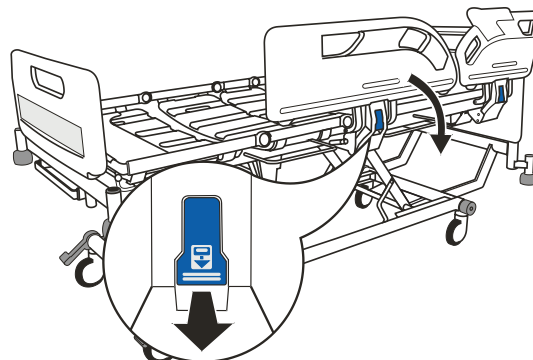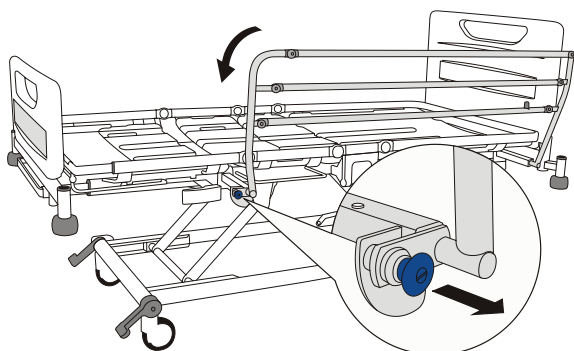


Hoidke küljepiirdest kinni. Tõmmake sinist käitusnuppu või sinist vabastuspidet ja laske küljepiire alla.

Pidurid ja juhtimine

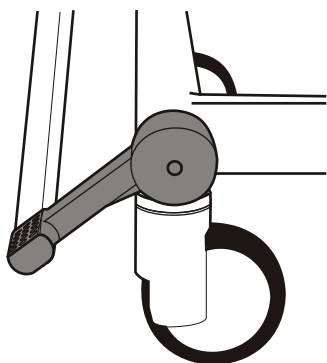


Pidur

Kõigil neljal rattal on pidurid peal.

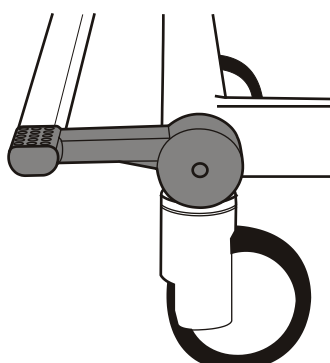

Vaba

Kõik neli ratast on vabalt veerevad ja pöörlevad.

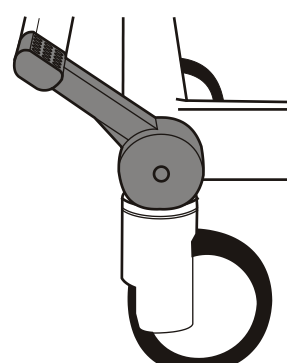


Juhtasend

Kõik neli ratast saavad veereda, juhtratas ei saa pöörelda.

Kui voodi seisab paigal, peavad selle pidurid alati peal olema.


Voodi pikkuse reguleerimine (kolm seadepunkti)

1

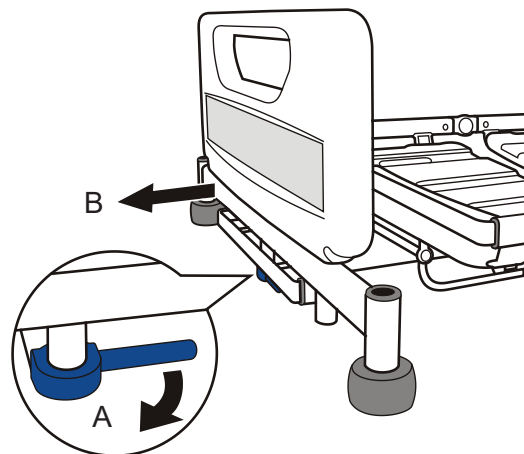

Tõmmake sinist pikenduse lukustamise käepidet (A). Tõmmake voodiraam (B) välja soovitud asendisse ja vabastage käepide.


2

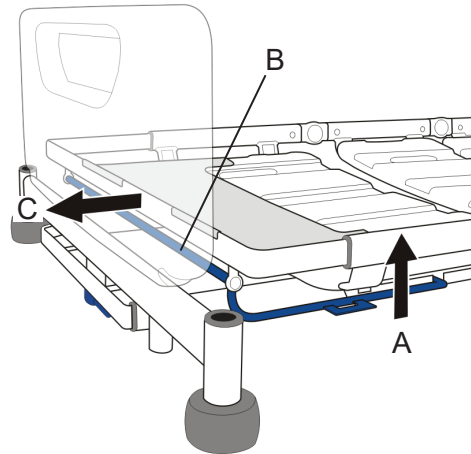

Tõstke sinist pikenduse kinnitusvarba (A) ning hoidke põikvarva keskosast kinni (B), seejärel tõmmake madratsialus vastavasse asendisse (C).


Sääreosa reguleerimine

1

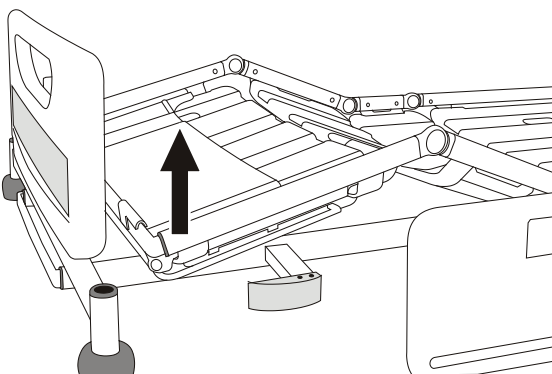

Hoidke sääreosa raami äärest kinni ja tõstke sääreosa üles.

2

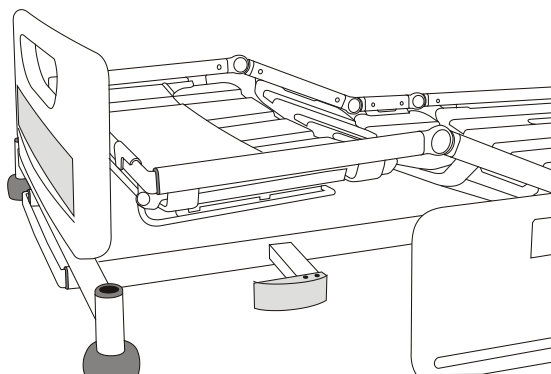

Tõstke, kuni see kinnitub horisontaalasendisse.