


Enterprise 5000X, 8000X



ที่ปลดล็อคพนักพิง CPR


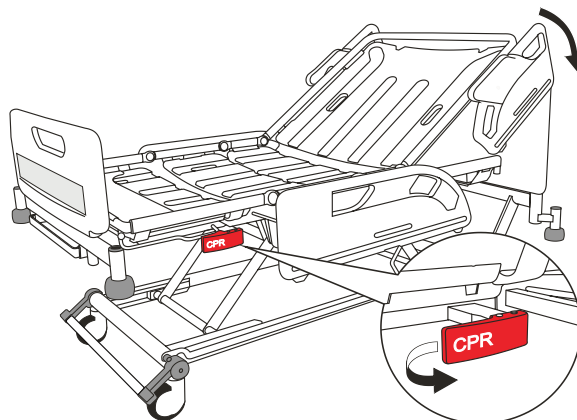


ดึงคาน CPR สีแดงที่อยู่ด้านใดด้านหนึ่งของเตียงเพื่อปลดระดับพนักพิงอย่างรวดเร็ว


ราวกันข้างเตียง - การยกขึ้น



อย่าปล่อยให้ราวกันข้างเตียงอยู่ในตำแหน่งยกขึ้น หากมองเห็นสลักเกลียวล็อคหลังปุ่มควบคุมสีน้ำเงิน

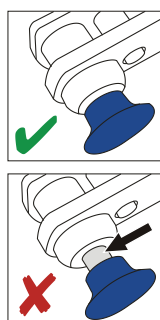
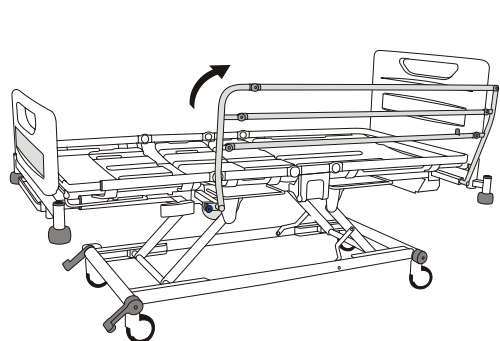


ตรวจสอบให้แน่ใจว่าราวกันข้างเตียงล็อกอยู่อย่างแน่นหนาเมื่ออยู่ในตำแหน่งยกขึ้น

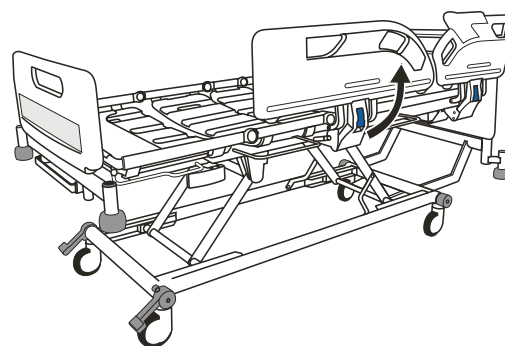


จับราวกันข้างเตียง ถึงราวกันข้างเตียงขึ้นจนกระทั่งราวล็อคเข้าที่

ราวกันข้างเตียง - การลดลง

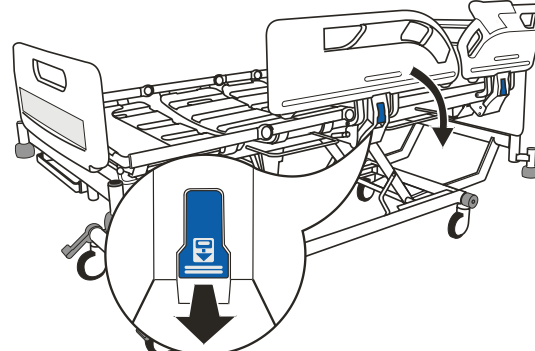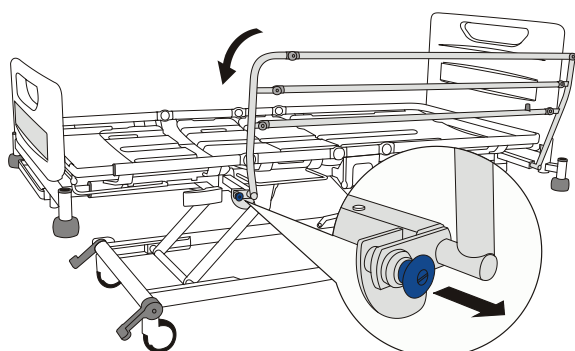


จับราวกันข้างเตียง ถึงปุ่มควบคุมสีน้ำเงินหรือคันปล่อยสีน้ำเงิน และลดราวกันข้างเตียงลง

เบรคและการบังคับทิศทาง

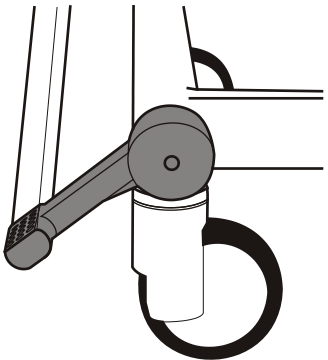

เบรค
เบรคจะใช้กับล้อเลื่อนทั้งสองล้อ

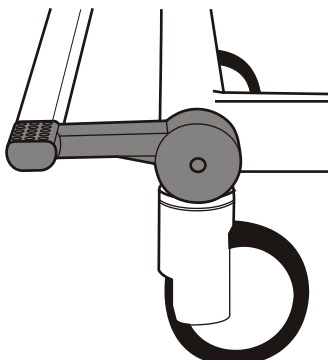

อิสระ
ล้อเลื่อนทั้งสองล้อหมุนและเคลื่อนได้อย่างอิสระ




บังคับทิศทาง
ล้อเลื่อนทั้งสองล้อสามารถหมุนได้ ล้อบังคับทิศทางไม่สามารถหมุนรอบได้

ควรใช้เบรคเสมอเมื่อเตียงหยุดอยู่กับที่


การปรับความยาวเตียง (สามตำแหน่งที่กำหนดไว้)

1

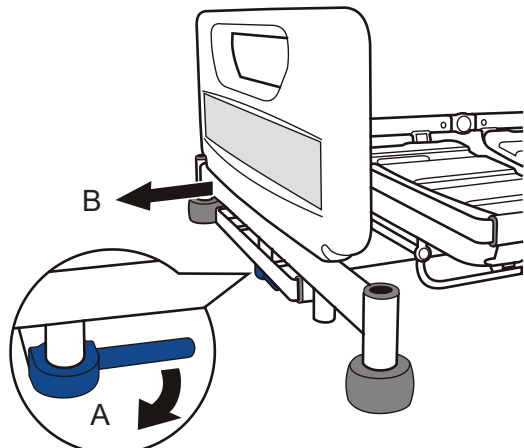

ดึงคันล็อกสีน้ำเงินที่ยื่นออกมา (A) ดึงโครงเตียงออก (B) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการและปล่อยคันล็อก


2

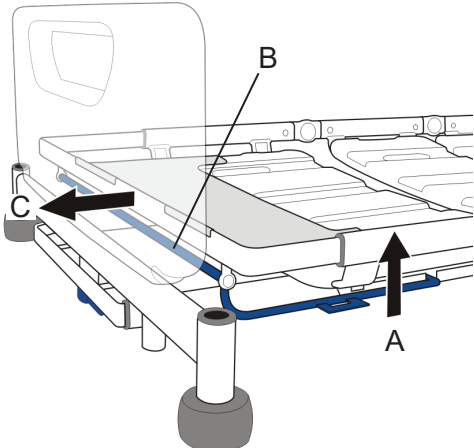

ยกก้านจับส่วนขยายสีน้ำเงิน (A) ขึ้น และจับที่ตรงกลางของแผ่นวางขา (B) จากนั้น ดึงแผ่นรองเบาะไปยังตำแหน่ง (C)


การปรับส่วนนอน

1

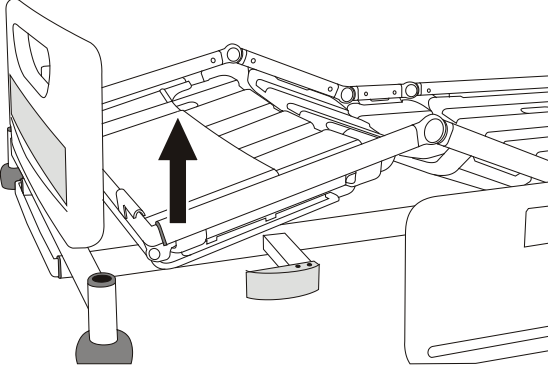

จับด้านข้างของเฟรมของส่วนนอน และยกส่วนนอนขึ้น

2

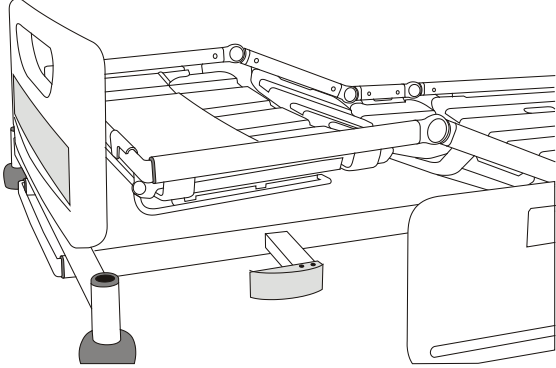

ยกขึ้นจนกระทั่งล้ออยู่ในตำแหน่งแนวนอน