




Enterprise 5000X, 8000X


تحرير مسند الظهر لإجراء الإنعاش القلبي الرئوي (CPR)

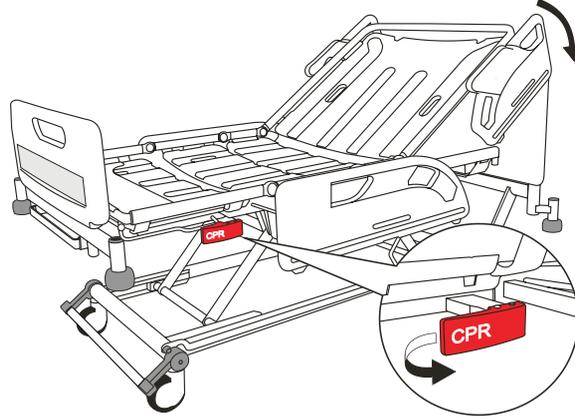



اسحب مقبض الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) الموجود على أي من جانبي السرير لخفض مسند الظهر بسرعة.

القضبان الجانبية - الرفع

تأكد من أن القضبان الجانبية مٌقفلت بإحكام عندما تكون في الموضع المرفوع.


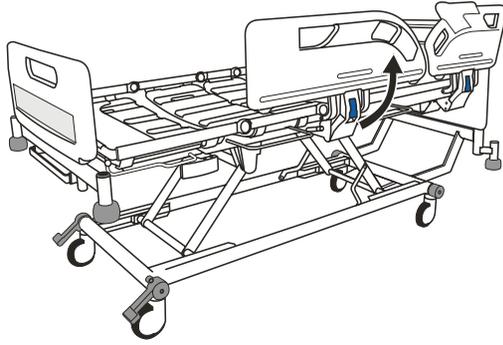


لا تترك القضبان الجانبية في الوضع المرفوع إذا كان برغي القفل ظاهرًا خلف التشغيل الأزرق.

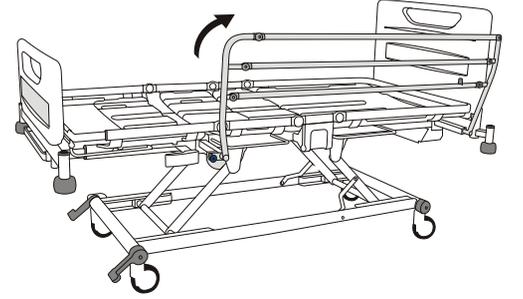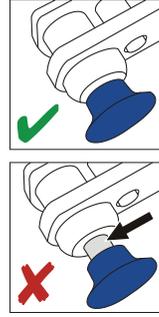

أمسك القضيب الجانبي. اسحب القضبان الجانبية لأعلى حتى تستقر في الوضع المرفوع.


القضبان الجانبية - الخفض

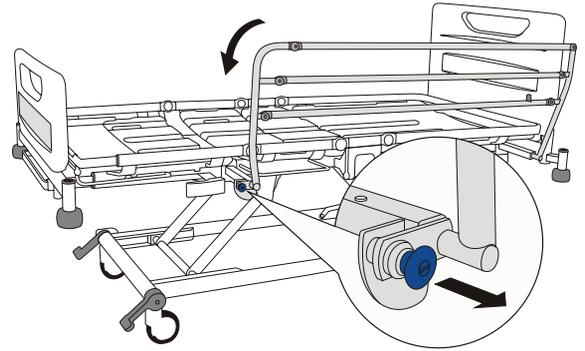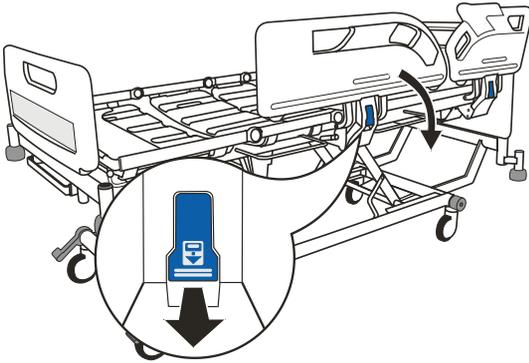

أمسك القضيب الجانبي. اسحب مقبض التشغيل الأزرق أو ذراع التحرير الأزرق وقم بخفض القضبان الجانبية.



التوجيه
بإمكان جميع العجلات الأربع أن تدور
ولا يُمكن لعجلات التوجيه أن تتمحور.

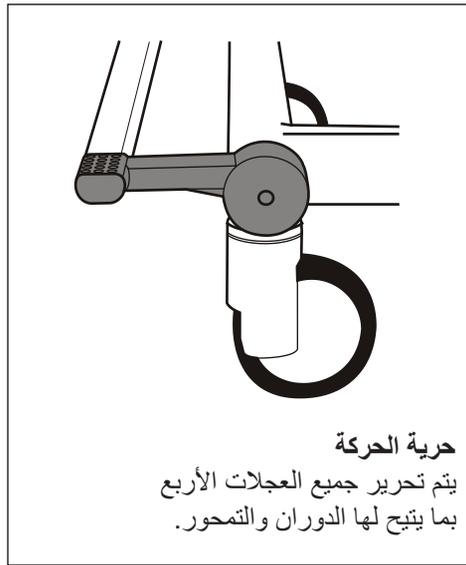


حرية الحركة
يتم تحرير جميع العجلات الأربع
بما يتيح لها الدوران والتمحور.




الفرامل
يتم تشغيل الفرامل في جميع العجلات الأربع.

يتعيّن تشغيل الفرامل في جميع الأوقات عندما يكون السرير ثابتاً.

ضبط طول السرير (ثلاثة أوضاع محددة)

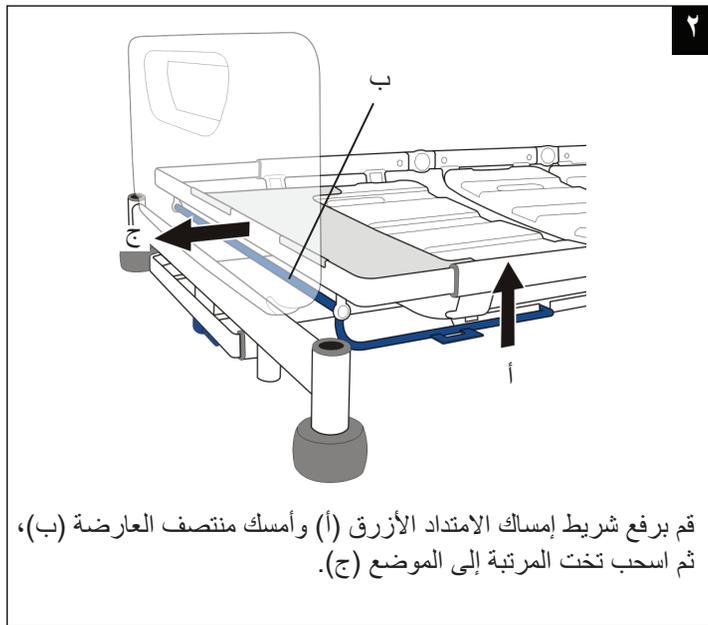


قم برفع شريط إمساك الامتداد الأزرق (أ) وأمسك منتصف العارضة (ب)،
ثم اسحب تخت المرتبة إلى الموضع (ج).

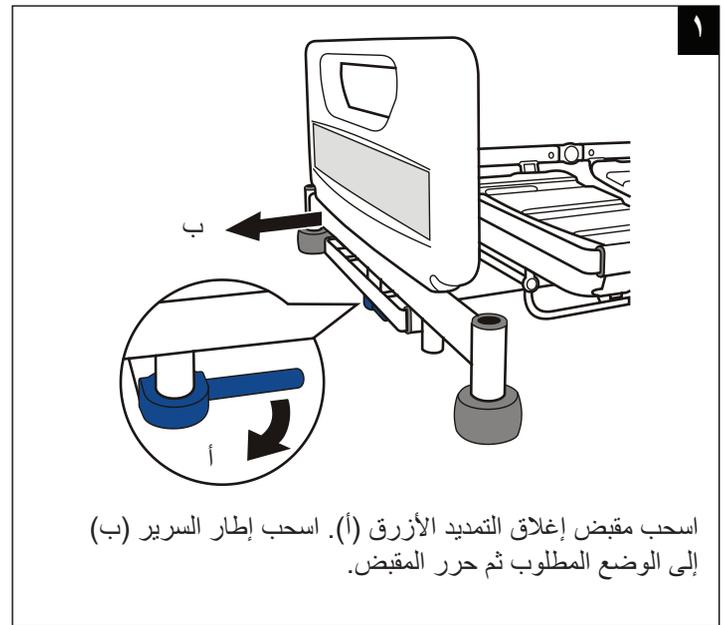


اسحب مقبض إغلاق التمديد الأزرق (أ). اسحب إطار السرير (ب)
إلى الوضع المطلوب ثم حرر المقبض.

ضبط قسم الساق

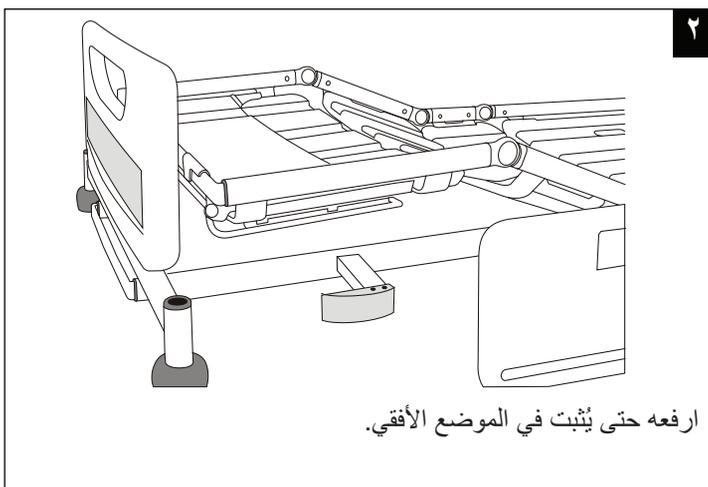

ارفعه حتى يُثبت في الموضع الأفقي.

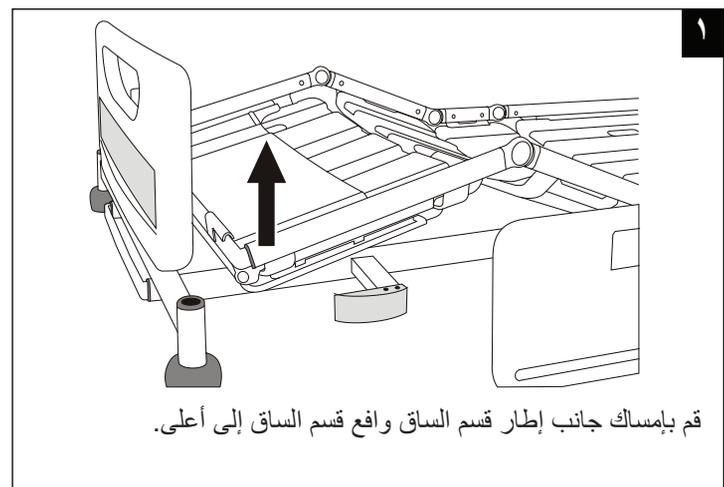

قم بإمساك جانب إطار قسم الساق وافع قسم الساق إلى أعلى.